

Producător: ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L. Sediul social: Municipiul Târgu Mureș, Str. PODENI, Nr. 44/A, Județ Mureș	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE		Ed.1 Rev.1 20.05.2021
DENUMIRE DISPOZITIV MEDICAL			TIP DISPOZITIV MEDICAL
☐ Proteză parțială de mână	☐ funcțională simplă		
	☐ funcțională simplă - silicon/începând de la un deget		
	☐ de deget, funcțională, simplă (silicon, model de baza)		
	☐ de deget, funcțională, simplă (silicon, model clasic)		
	☐ funcțională simplă (deget silicon – model de bază)		
	☐ funcțională simplă (deget silicon – model clasic)		
	☐ de deget funcțională simplă (de bază)		
	☐ de deget funcțională simplă (clasic)		
	☐ funcțională simplă – model de bază		
	☐ funcțională simplă – model clasic		
☐ Proteză pentru amputație inter-scapulo-toracică	☐ funcțională simplă		
	☐ funcțională, acționată prin cablu		

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PROTEZE PENTRU MEMBRUL SUPERIOR



Producător: ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	Ed.1 Rev.1 20.05.2021 Pag. 2/3
---	----------------------------------	--------------------------------------

1. Descrierea protezei de membru superior

ATENȚIE

- Citiți cu atenție acest document înainte de utilizarea dispozitivului medical și respectați indicațiile de siguranță.
- Instruiți utilizatorul asupra modului de utilizare în condiții de siguranță a dispozitivului medical.
- Adresați-vă producătorului dacă aveți întrebări referitoare la dispozitivul medical sau dacă survin probleme.
- Păstrați acest document.

1.1 Subansamble - Anexe: date tehnice ale subansamblelor utilizate.

2. Utilizare

2.1 Scop

Dispozitivul medical este destinat exclusiv utilizării în tratamentul protetic al membrului superior.

2.2 Domeniul de aplicare:

Este în conformitate cu standardele de calitate aplicabile dispozitivelor medicale.

2.3 Condiții de mediu

ATENȚIE

Utilizarea în condiții de mediu conform cerințelor producătorului.

3. Siguranță

ATENȚIE

- Răniri provocate prin cădere și deteriorarea dispozitivului medical.
- Mânuiți cu grijă proteza și componentele acestuia pentru a evita periclitatea siguranței dumneavoastră, precum și pentru prelungirea duratei de viață a protezei.
- Utilizați proteza în activitățile recomandate de către tehnicianul ortoprotezist.
- Înlocuiți proteza în situația în care gradul de mobilitate se modifică.
- Verificați periodic proteza pentru a identifica eventualele deteriorări în cazul în care aceasta a fost supusă unor suprasolicitări (de ex. prin cădere).
- Nu expuneți elementele componente ale sistemului la vibrații sau șocuri mecanice.
- Nu expuneți proteza la condiții de mediu improprie care pot provoca deteriorarea dispozitivului medical, afectând siguranța dumneavoastră.
- În cazul în care apar disfuncționalități ale protezei, vă rugăm contactați tehnicianul ortoprotezist de la OrtoProfil.

ATENȚIE

- Suprasolicitare mecanică.
- Răniri provocate prin cădere și deteriorarea dispozitivului medical.

Producător: ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L.	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	Ed.1 Rev.1 20.05.2021 Pag. 3/3
---	----------------------------------	--------------------------------------

4. Întreținere/Reparație

OrtoProfil recomandă ca, după o perioadă de acomodare cu proteza, perioadă ce poate varia de la caz la caz, să se efectueze reajustarea reglajelor protezei pentru funcționalitate optimă de către tehnicianului ortoprotezist al producătorului. Efectuarea reglajelor de către alte persoane decât tehnicianul ortoprotezist de la OrtoProfil duce la pierderea garanției.

Vă rugăm să verificați periodic proteza din punct de vedere al uzurii și al funcționalității. În cazul apariției unor disfuncționalități, adresați-vă tehnicianului ortoprotezist.

5. Informații privind reutilizarea

Proteza este configurată pe mărime individuală, motiv pentru care se interzice folosirea de către o altă persoană.

6. Informații juridice

Dispozitivul medical îndeplinește cerințele stipulate în prevederile legale aplicabile.

7. Garanție

Producătorul nu răspunde juridic pentru daune cauzate prin nerespectarea acestui document, în mod special prin utilizarea necorespunzătoare sau modificarea nepermisă a dispozitivului medical.