

Rampe pentru praguri

Instrucțiuni de utilizare (RO)



1 Rampe de acces informații generale

Stimate Client,

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin o descriere a dispozitivului medical și instrucțiuni importante pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a produsului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe utilizarea. Este deosebit de important să vă familiarizați cu cerințele de siguranță și să le respectați.

REHASENSE® își dezvoltă constant produsele și, prin urmare, își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și caracteristicile produselor fără o notificare prealabilă.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul sau **REHASENSE®** direct. Datele de contact se găsesc pe ultima pagină a acestor instrucțiuni.

2 Rampe pentru praguri Indicații și utilizarea conform destinației

Rampele sunt dispozitive medicale concepute exclusiv pentru a ajuta utilizatorii de scaune cu roțile sau scutere. Acestea permit persoanelor să traverseze puncte înalte (de exemplu, scări sau borduri) cu sau fără ajutorul unei alte persoane. Rampele permit utilizatorilor aflați într-un scaun cu roțile din cauza unei dizabilități să intre sau să iasă din clădiri, mașini, autobuze, etc. Rampele pot fi utilizate atât în interior, cât și în exterior. Orice altă utilizare este interzisă.

3 Rampe pentru praguri Informații privind siguranța

Asigurați-vă că aceste instrucțiuni au fost citite de toate persoanele care utilizează echipamentul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună și/sau vătămări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor.



Restricții de utilizare

- Produsul trebuie utilizat numai în stare impecabilă.
- Dacă găsiți defecte sau erori, contactați imediat vânzătorul.
- Acordați atenție informațiilor de pe eticheta produsului.
- Asigurați-vă că toate persoanele care utilizează rampa sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare nu vor fi recunoscute.
- Rampa nu trebuie încărcată cu o sarcină mai mare decât sarcina maximă descrisă în datele tehnice și pe etichetă.
- Rampa poate fi utilizată numai până la panta maximă (înălțimea maximă a treptelor) corespunzătoare lungimii sale. Aceste date pot fi găsite în datele tehnice și pe eticheta produsului.
- Rampa trebuie utilizată exclusiv în scopul pentru care a fost concepută.
- Evitați să efectuați modificări structurale ale rampelor, cu excepția cazului în care aveți permisiunea scrisă a producătorului pentru astfel de modificări.
- La desfășurarea rampei, utilizatorul trebuie să fie atent să nu-și strivească degetele sau alte părți ale corpului.
- Rampa poate fi utilizată numai pe o suprafață stabilă.



Aveți grijă când vedeți acest simbol pe dispozitiv. La plierea, desfășurarea sau ajustarea dispozitivului, degetele sau alte părți ale corpului utilizatorului și/sau asistentului pot rămâne prinse între componentele dispozitivului. Este necesară prudență maximă atunci când reglați dispozitivul. Respectați dimensiunile spațiilor dintre componentele dispozitivului pentru a evita prinderea degetelor sau a altor părți ale corpului.

4 Rampe pentru praguri.....Livrarea și descrierea generală a produsului

Avem 3 tipuri diferite de rampe practice pentru uși care sunt foarte ușor de instalat și îndepărtat. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de moduri pentru diferite tipuri de scări și scopuri. Suprafața profilului rampei este prevăzută cu caneluri antiderapante pentru o mai bună aderență și este anodizată pentru o rezistență ridicată la abraziune. Sunt ușor de pliat, transportat și depozitat.

Inspekția inițială

Rampele sunt livrate în cutii de carton, pliate - pentru facilitarea transportului.


Conținut

- 1 rampă lungă
sau
- 2 rampe scurte în geantă de transport
sau
- 1 rampă tip placă cu trei picioare reglabile
- 1 instrucțiuni de utilizare

Scoateți dispozitivul din cutie și verificați, folosind lista și desenul de mai jos, să nu lipsească nimic. Dacă în această etapă se constată că o piesă lipsește sau este deteriorată. Contactați imediat furnizorul produsului.


5 Rampe pentru praguri.....Utilizarea produsului

Rampă pentru ușă MINI - pliată longitudinal - 1 buc. (PFD04076A)

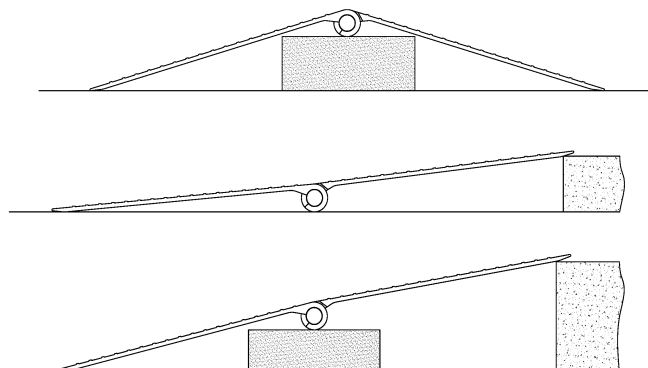

- Desfaceți rampa atunci când o utilizați, iar atunci când este pliată puteți utiliza deschiderea de pe produs pentru a o transporta în mână.

Rampă pentru ușă MICRO - pliabilă - set 2 buc. (PFD04225A)

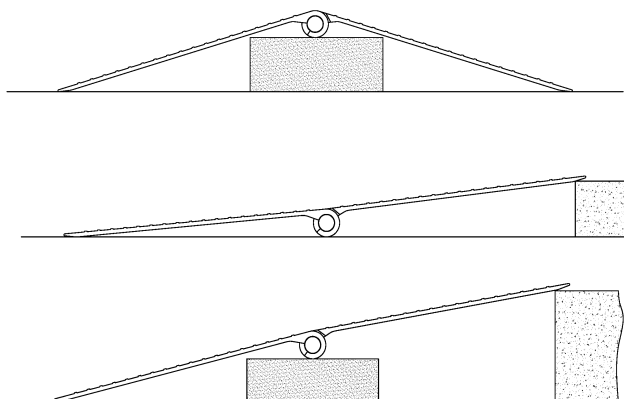


- Rampa trebuie să fie desfăcută înainte de utilizare și, odată pliată, deschiderea de pe produs poate fi utilizată pentru a o transporta în mână.



Kitul poate fi transportat cu ușurință într-o geantă specială.

Rampă reglabilă pentru ușa - 1 buc. (PAW04276)

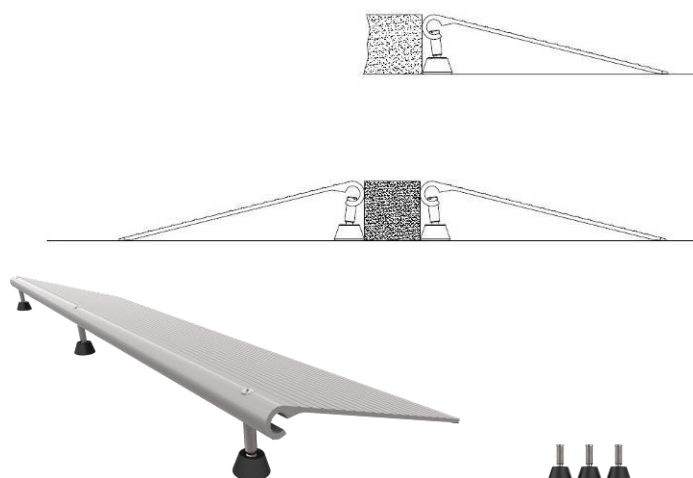

- Reglați lungimea picioarelor de reglare la înălțimea dorită a penei

Recomandări generale de utilizare

- Rampele trebuie să fie amplasate pe un teren stabil.
- În cazul rampei pentru ușa MICRO, cele două secțiuni cu balamale trebuie să fie întotdeauna aliniate paralel.
- Înainte de a utiliza rampele, verificați dacă acestea sunt instalate stabil.



6 Rampe pentru praguri

Transport

Rampele pot fi pliate cu ușurință pentru transportul manual. În timpul transportului, asigurați-vă întotdeauna că rampa este fixată în siguranță împotriva mișcărilor neintenționate.

7 Rampe pentru praguri

Date Tehnice

Index nr.	Caracteristică	Lungimea maximă (mm)	Lăţimea şinei (mm)	Înălţimea maximă pentru treaptă (mm)	Sarcina maximă per pereche (kg)	Greutate per pereche (kg)
PFD04076A	Rampă de pod din 2 părţi articulate	760	760	30-70	350	3,06
PFD04225A	Set mini rampă pentru punte 2 x 2 părţi articulate	250x2	250	30-70	2x175	2,08
PAW04276	rampă reglabilă pentru praguri de uşă	760	760	30-70	350	1,60

8 Rampe pentru praguri

Autocolant tehnic

Eticheta produsului este plasată pe una dintre laturi:

The technical label for the Mini door step ramp contains the following information:

- Numărul de serie GS1 (UDI-DI):** (01) 05907467808444
- Cod EAN - GS1 128:** (11) 220314 (21) 0001
- Produs medical:** Indicated by the CE and MD symbols.
- Cod EAN 13 în standardul GS1:** 5 907467 808444
- Denumire:** Mini door step ramp
- Data fabricaţiei:** 2022-03-14
- Numărul articolului:** PFD04076A
- Greutatea maximă a utilizatorului:** 350 Kg
- Lungime:** 76 cm
- Înălţime maximă:** 3 - 7 cm
- Citiţi instrucţiunile:** Indicated by the information icon.
- Producător:** REHA-SENSE Sp. z o.o., Sulejowska 45 G, 97-300 Piotrków Tryb., Poland

9 Rampe pentru praguri

Curăţare

- Curăţaţi rampa în mod regulat şi menţineţi-o curată
- Murdăria şi praful mai uşor pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă.
- Murdăria mai mare poate fi îndepărtată cu un detergent uşor şi apă.
- Nu utilizaţi produse abrazive dure sau produse pe bază de înălbitor.
- Uscaţi cu o cârpă moale.

10 Rampe pentru praguri.....**Mentenanță**

Rampele nu necesită, în general, întreținere. Cu toate acestea, este întotdeauna recomandat să verificați dacă materialul antiderapant de sub suportul superior nu este murdar sau rupt înainte de utilizare. Dacă aveți îndoieli cu privire la starea rampei, nu o mai utilizați și contactați vânzătorul. În ciuda construcției sale robuste și a utilizării de materiale rezistente, produsul este supus uzurii. Prin urmare, se recomandă ca produsul să fie verificat de un specialist la intervale regulate.

- Înlocuiți rampa dacă vreo componentă este ruptă sau deteriorată.
- Înlocuiți rampa dacă protecția anti-alunecare este uzată.
- Dacă piciorul de reglare de pe rampa cu pană reglabilă este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat.

11 Rampe pentru praguri.....**Modalitatea de eliminare a produsului**

Dispozitivul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul obișnuit. Duceți-le la o stație de depozitare pentru reutilizare sau reciclare.

12 Rampe pentru praguri.....**Garanție**

Producătorul oferă o garanție de 2 ani împotriva erorilor de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.



Dacă aveți întrebări tehnice, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau să contactați direct compania Rehasense

Distribuitor:

--

Producător

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45G
97-300 Piotrków Trybunalski
Polonia

www.rehasense.com
info@rehasense.com