

Bandă lată

Rampe pentru scaune cu rotile
Instrucțiuni de utilizare (RO)



REHASENSE



ROMÂNĂ

1. Informații generale

Stimate Client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru și, în același timp, dorim să vă oferim informații importante cu privire la utilizarea produsului nostru.

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin o descriere a dispozitivului medical și orientări importante pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a produsului. Înainte de a utiliza produsul nostru pentru prima dată, vă rugăm să citiți și să vă familiarizați temeinic cu conținutul acestui manual și să urmați toate recomandările noastre.

Rehasense își îmbunătățește în mod constant produsele și își rezervă dreptul de a face modificări la specificațiile produselor fără o notificare prealabilă.

Dacă aveți întrebări cu privire la produsele noastre, vă rugăm să contactați magazinele medicale cu care colaborăm sau să contactați direct Rehasense®. Datele de contact pot fi găsite pe ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare.

2. Utilizare

Rampele sunt un dispozitiv medical care ajută utilizatorii de scaune cu roțile. Acestea permit utilizatorilor de scaune cu roțile să urce dealuri, borduri, scări, precum și să intre și să iasă dintr-o mașină sau autobuz, cu sau fără ajutorul unui asistent.

Pot fi utilizate atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor. Orice altă utilizare a rampelor este interzisă.

Indicații: Rampa trebuie utilizată numai dacă pacientul nu poate depăși obstacolul în mod independent din cauza unei afecțiuni medicale sau dacă pacientul nu poate ocoli obstacolul într-un scaun cu roțile.

Contraindicații: Dacă pacientul are probleme de echilibru sau de vedere, acesta ar trebui să urce rampa doar însoțit, pentru a reduce căderile și accidentele. De asemenea, asamblarea și dezasamblarea trebuie să fie efectuate de o persoană instruită pentru a reduce la minimum pericolele și rănille.

3. Normele de siguranță

Vă rugăm, să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul pentru prima dată. Producătorul nu este responsabil pentru deteriorări sau accidente care rezultă din utilizarea necorespunzătoare.



Restricții privind utilizarea produsului

- Este interzisă utilizarea unei rampe deteriorate
- Dacă observați orice deteriorări trebuie să contactați imediat vânzătorul.
- Consultați marcajele de pe produs.
- Oricine utilizează produsul trebuie să citească aceste instrucțiuni de utilizare pentru a elimina orice inexactitate în utilizarea acestuia. Orice deteriorare a produsului care rezultă din utilizarea necorespunzătoare și neconformă nu va fi acoperită de garanția producătorului.
- Nu încărcați rampa cu o greutate mai mare decât greutatea admisă (indicată pe eticheta produsului)
- Urmați instrucțiunile privind înălțimile admise și treptele indicate la punctul 8 din datele tehnice. Valorile specificate nu trebuie să fie depășite
- Utilizați rampele numai în scopul pentru care au fost fabricate
- Nu modificați designul produsului decât dacă aveți permisiunea scrisă din partea producătorului
- Atunci când desfășurați și pliați rampele, fiți atenți și aveți grijă să nu vă încleștați degetele sau alte părți ale corpului.
- Utilizați numai pe suprafețe stabile



Fiți precaut atunci când vedeți acest simbol pe un produs. Degetele sau alte părți ale corpului utilizatorului și/sau ale unui asistent pot rămâne prinse între componentele dispozitivului în timpul plierii, desfacerii sau poziționării. Fiți foarte atenți atunci când ajustați proprietățile dispozitivului. Acordați atenție dimensiunilor spațiilor dintre componentele dispozitivului pentru a evita prinderea degetelor sau a altor părți ale corpului.

4. Descrierea generală a produsului

Rampele sunt realizate din aluminiu în formă de fagure de albine pentru un plus de rezistență și flexibilitate. Acestea sunt rezistente la coroziune. Rampele sunt formate din șine separate, pliabile. Suprafața lor de uzură este acoperită cu un material special antiderapant pentru a garanta o utilizare sigură.

Înainte de prima utilizare verificați:


Rampele sunt asamblate și livrate în ambalaje de carton. Ambalajul include:

- 1 rampă pliabilă sau două jumătăți de rampă
- 1 instrucțiuni de utilizare

Mai întâi scoateți dispozitivul din ambalaj și verificați, conform descrierii, dacă acesta conține toate componentele. În cazul în care există discrepanțe sau componente lipsă, nu continuați procesul de asamblare, ci contactați vânzătorul.

5. Utilizarea produsului

Fotografia prezintă un exemplu de rampă. În funcție de modelul selectat, aspectul rampei poate varia, dar toate caracteristicile, precum și instrucțiunile de utilizare rămân comune. Se recomandă parcurgerea următoarelor etape:

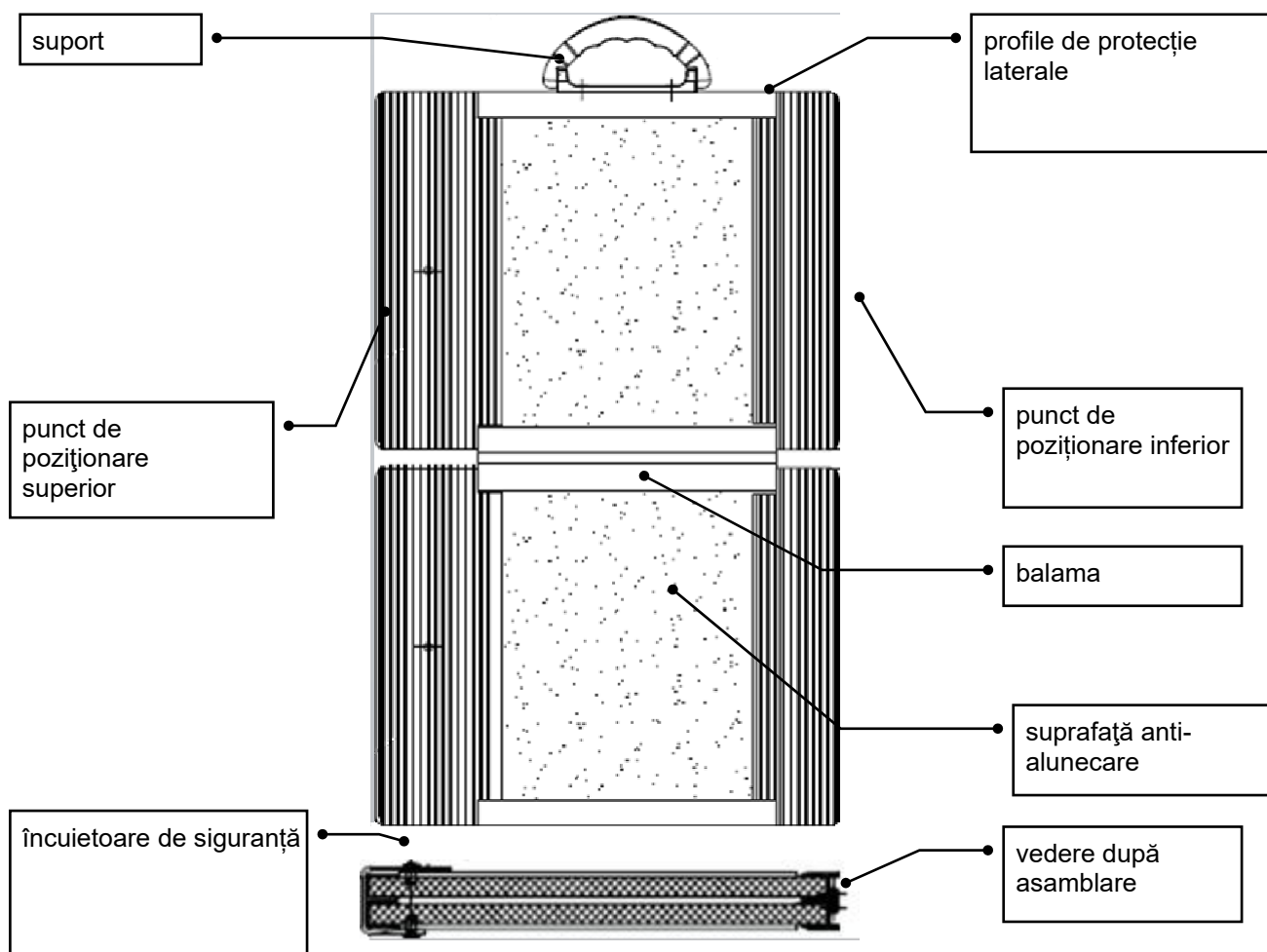

Spectru



Rampa ar trebui să fie mutată acolo unde este necesar. Deblocați încuietoarea de siguranță, care se află pe partea laterală, lângă mânerul de transport (vezi săgeata roșie - Figura 1).

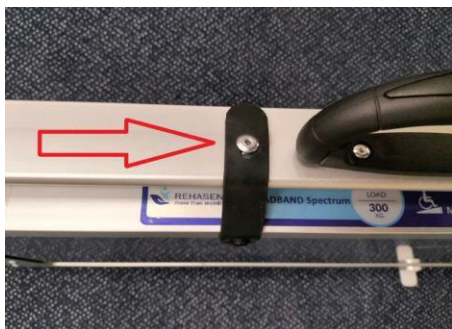


Fig.1 Încuietoare de siguranță

Pentru a deschide rampa, prindeți șinele de marginile exterioare, așa cum se arată în Figura 2, pentru a evita rănirea și desfășurarea rampei în sens invers.

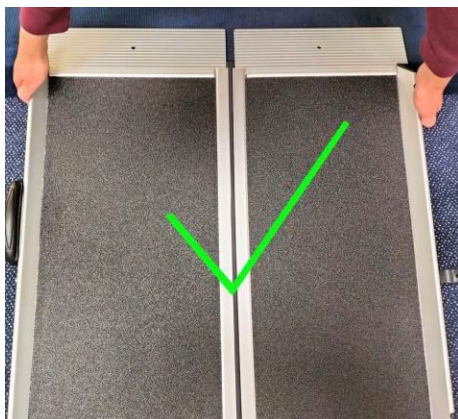


Fig. 2 Corect


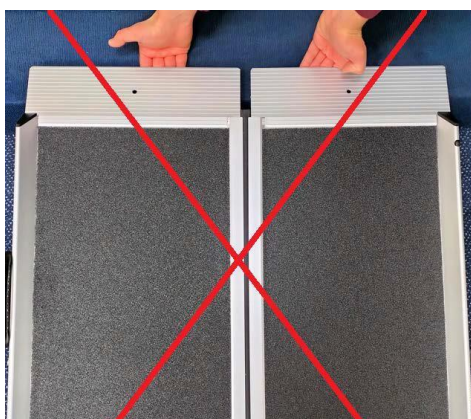


Fig. 2 Greșit

Pentru a poziționa corect rampa, trebuie să acordați atenție și autocolantului lipit pe lateral.

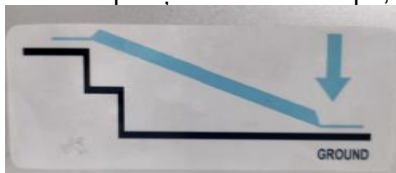

Pliati rampa după utilizare. Prindeți șinele de marginile exterioare, așa cum se arată în Figura 2, și pliați-le ca pe o carte. Apoi, fixați încuietoarea de siguranță (Figura 1) pentru a preveni desfășurarea accidentală și eventualele răniri și deteriorări.

Desfășurare



Rampa ar trebui să fie mutată acolo unde este necesar. Deblocați încuietoarea de siguranță, care se află pe partea laterală, lângă mânerul de transport (vezi săgeata roșie - Figura 1).



Fig.1 Încuietoare de siguranță

Așezați fiecare șină separat, după cum se arată în Figura 2, și puneți-le paralel între ele, după cum se arată în Figura 3. Conectați șinele prin împingerea șinelor împreună până când se aude un „clic”.

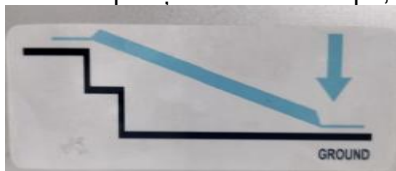


Fig. 2 Desfășurarea rampei



Fig. 3 Rampă rabatabilă

Pentru a poziționa corect rampa, trebuie să acordați atenție și autocolantului lipit pe lateral.



Pentru a detașa șinele, apăsați butonul roșu (după cum se arată mai jos în Figura 4) și apoi, depărtați șinele în direcția săgeților galbene (Figura 4).

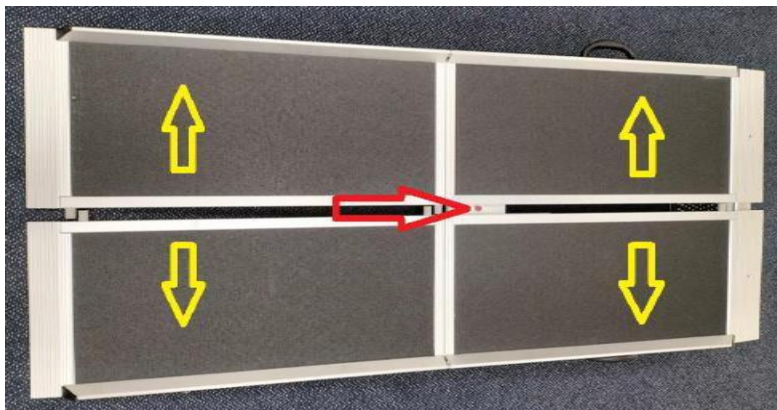


Fig. 4 Detașarea șinelor

Asamblați fiecare șină separat, după cum se arată în Figura 5. Apoi, fixați încuietoarea de siguranță (Figura 1) pentru a preveni desfășurarea accidentală și eventualele răniri și deteriorări.



Fig. 5 Asamblarea șinei

6. Transport

Ramele pot fi pliate foarte rapid, facilitând transportul de către utilizatori. Protejați și imobilizați întotdeauna ramele în timpul transportului pentru a evita orice accident.

7. Eliminarea produsului

Dispozitivul nu trebuie aruncat în coșul de gunoi pentru deșeuri municipale. Ramele uzate trebuie transmise pentru eliminare.

8. Date tehnice

Denumire	Nr. art.	Descriere	Dimensiuni: Lungimea x lățimea benzii de rulare (mm)	Dimensiuni după asamblare: Lungimea x lățimea x înălțimea (mm)	Greutate (kg)	Sarcină Max. (kg)	Înălțimea max. (diferență de niveluri) (cm) (înălțimea treptei)
Rampă lată "Broadband Beam"	BB1P04 50	Rampă dintr-o singură piesă	450 x 710	450 x 376 x 80	4,1	300	9
Rampă lată "Broadband Ray"	BR2P15 00	Rampă din 2 piese	1500 x 250 (2x)	784 x 280 x 174 (2x)	2 x 5,0	2 x 200	30
	BR2P18 00	Rampă din 2 piese	1800x 250 (2x)	919 x 280 x 174 (2x)	2 x 5,7	2 x 200	36

	BR2P2100	Rampă din 2 piese	2100 x 250 (2x)	1084 x 280 x 174 (2x)	2 x 6,8	2 x 200	42
Rampă "Broadband Spectrum"	BS1P700	Rampă dintr-o singură piesă	700 x 760	700 x 418 x 83	6,3	300	14
	BS1P900	Rampă dintr-o singură piesă	900 x 760	900 x 418 x 83	7,6	300	18
	BS1P1200	Rampă dintr-o singură piesă	1200 x 760	1200 x 418 x 83	9,5	300	24
	BS1P1500	Rampă dintr-o singură piesă	1500 x 760	1500 x 418 x 83	11,5	300	30
Rampă "Broadband Spectrum GF"	RAM656800R	Rampă dintr-o singură piesă	1520 x 850	1520 x 440 x 70	13	400	30
Rampă "Broadband Defrag"	BD2P1800	Rampă din 2 piese	1800 x 380 (2x)	919 x 428 x 174 (2x)	2 x 7,1	2 x 150	36
	BD2P2400	Rampă din 2 piese	2400 x 380 (2x)	1250 x 428 x 174 (2x)	2 x 10,6	2 x 150	48
	BD2P3000	Rampă din 2 piese	3000 x 380 (2x)	1550 x 428 x 174 (2x)	2 x 12,4	2 x 150	60

Materiale:

Rampă din aluminiu
 Protecție margini / Mânere Plastic Suprafața rampei
 Cauciuc

Toate materialele utilizate sunt protejate împotriva coroziunii și a intemperiei.



Nu lăsați rampa la soare în zilele calde și însorite, deoarece părțile întunecate se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri dacă sunt atinse

9. Etichetă

Eticheta poate fi găsită în partea de jos a produsului. Mai jos este prezentat un model de etichetă. Aspectul exact al etichetei depinde de tipul de rampă ales.

Număr de serie

Dispozitiv medical

SN

0106901912630383

0106901912630383

Broadband Ray

2015-01-01

BR 2P1500

400kg

L 150 cm

30 cm

CE

MD

REHASENSE Sp. z o.o.

Sulejowska 45 G

97-300 Piotrków Tryb.

Poland

5901912630383

Denumirea dispozitivului
Data producției
Numărul produsului
Greutatea maximă a utilizatorului
Lungime maximă
Înălțime maximă
Citiți instrucțiunile de utilizare

Producător

Numărul 02/22

8/10

Rampe cu bandă lată

10. Curățare

- Curățați dispozitivul în mod regulat și mențineți-l curat
- Murdăria ușoară sau praful trebuie șterse cu o cârpă umedă.
- Petele mai mari trebuie îndepărtate folosind detergenți de uz casnic, un burete moale sau o perie.
- După curățare, clătiți bine rampa cu apă curată pentru a elimina orice reziduu de agent de curățare.
- Sunt interziși agenții de curățare și de albire corozivi care produc rugină.
- Nu utilizați detergenți puternici sau înălbitori.
- Ștergeți cu o cârpă moale.

11. Întreținere

Ramele nu necesită, practic, întreținere. Cu toate acestea, este întotdeauna recomandabil să verificați dacă suprafața șinelor (calea de rulare) este curată înainte de utilizare. Dacă observați orice semne de deteriorări trebuie să contactați imediat vânzătorul. În ciuda designului lor robust, se recomandă, de asemenea, ca eficiența acestora să fie verificată periodic de către profesioniști.

Reutilizare

Înainte de a fi utilizată din nou pe un alt pacient, rampa trebuie întotdeauna verificată și pregătită de un specialist după cum urmează:

- Verificați toate dispozitivele de siguranță, șuruburile, clemenele și etanșeitatea rampelor
- Orice piese deteriorate, uzate trebuie înlocuite imediat.
- Piese de cauciuc antiderapante murdare trebuie curățate cu o perie dură
- Mențineți suprafețele vopsite curate ștergându-le cu o cârpă umedă.

12. Garanție

Producătorul oferă o garanție de 2 ani pentru produs. Garanția acoperă defectele cauzate de producător. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului sau defectele care rezultă din utilizarea produsului în alt mod decât cel descris în instrucțiuni.

În cazul unor probleme tehnice, vă rugăm să contactați vânzătorul. Puteți contacta, de asemenea, direct producătorul produsului, compania Rehasense®.

Vânzător:

Producător: Rehasense® Sp.z o.o.

Sulejowska 45G

97-300 Piotrków Trybunalski, Polonia

www.rehasense.com

info@rehasense.com.