

**ATENȚIE** Risc de accidentare din cauza solicitării excesive. Componentele protetice Ottobock descrise în aceste instrucțiuni de utilizare au fost dezvoltate pentru activități din viața de zi cu zi și nu trebuie utilizate pentru activități neobișnuite, cum ar fi sporturile extreme (alpinism liber, parapantă etc.). Manipularea atentă a protezei și a componentelor acesteia nu numai că crește durata lor de viață, dar, mai presus de toate, asigură siguranța pacientului. În cazul în care componentele protetice sunt supuse unor solicitări neobișnuite (cum ar fi o cădere), contactați imediat protetistul și verificați componentele pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă este necesar, protetistul responsabil va preda proteza către Centrul de Service Ottobock.

Risc de ciupire. În timpul flexiei articulației șoldului există riscul de ciupire între alveolă și articulația șoldului. Purtătorul de proteză trebuie informat în mod explicit că nu trebuie să existe părți ale corpului sau obiecte în această zonă (de exemplu, telefonul mobil în buzunarul pantalonilor). Se recomandă utilizarea unei huse cosmetice pentru

articulație la fiecare adaptare, chiar și în cazul adaptărilor de probă.

Daune cauzate de agenți de curățare neadecvați. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, deoarece aceștia ar putea deteriora rulmenții, garniturile și piesele din plastic.