

FOTOLIU RULANT DE INTERIOR, TIP TOALETĂ THUASNE cod 7T.W1960

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mod de utilizare:

1. Înainte să transferați pacientul pe fotoliul rulant tip toaletă, imobilizați dispozitivul cu ajutorul frânelor;
2. Îndepărtați suporturile pentru tălpi și pliați suportul pentru picioare pe laterale;
3. Cu o mână trageți mânerul de blocare a cotierei, în timp ce o coborâți cu cealaltă mână;
4. Acum puteți așeza pacientul în fotoliu și fixa cotierele la înălțimea dorită, verificând ca acestea să fie blocate corespunzător. Întoarceți suporturile pentru picioare spre interior, pentru a le bloca și lăsați în jos suporturile pentru tălpi. Pacientul își poate așeza picioarele pe acestea.

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

1. Acest fotoliu rulant tip toaletă trebuie utilizat doar pe suprafețe plane și dure;
2. Acest fotoliu rulant tip toaletă a fost conceput doar pentru a fi utilizat în interior, prin urmare este contraindicată folosirea acestuia ca și scaun pentru duș;
3. Atunci când un pacient este așezat, asigurați-vă că frânele sunt trase și dispozitivul este imobil;
4. Pentru a evita răsturnarea fotoliului rulant, nu vă urcați pe suportul de picioare;
5. Înainte de a vă apleca să ridicați ceva, poziționați roțile către obiectul pe care doriți să îl luați, pentru a mări stabilitatea dispozitivului;
6. A nu se ridica fotoliul rulant de cotiere cu pacientul așezat pe acesta!
7. Greutatea maximă admisă a utilizatorului: 100 kg.

SFATURI PENTRU ÎNTREȚINERE

Verificați și strângeți periodic piulițele, șuruburile și mânerele de blocare;

Umeziți o cârpă moale pentru a șterge praful și murdăria și folosiți apă cu săpun pentru a îndepărta murdăria mai dificilă;

Ștergeți apoi dispozitivul cu o cârpă uscată;

Nu folosiți detergenți sau lavete abrazive pentru a curăța părțile metalice ale dispozitivului.

Importator: SC OrtoProfil Prod România SRL
540253 Tg-Mureș, str. Podeni 44A, Tel.: 0265-264834, Fax: 0265-210576,
E-mail: ortoprofil@ortoprofil.ro, Web: www.ortoprofil.ro

Termen de garanție: 24 luni
Vă mulțumim că ați ales produsele noastre.