

Construcție și funcție

Mănușa protetică este utilizată ca mănușă de protecție pentru o mână protetică.

Materialul PVC este caracterizat de robustețe și durabilitate.

Aspectul este bazat pe o suprafață reală.

Indicații de utilizare

Produsul trebuie utilizat exclusiv pentru proteze la nivelul membrelor superioare.

Domeniu de aplicare

Produsul a fost dezvoltat pentru utilizare în activitățile zilnice. Nu trebuie utilizat pentru activități

în care ar fi expus la condiții sau solicitări de mediu nepermise (de exemplu, temperaturi extreme)

Îmbrăcarea și îndepărtarea incorectă a mănușii protetice

Deteriorarea mâinii protetice și a mănușii protetice din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare

► Respectați toate instrucțiunile de îmbrăcare și îndepărtare. Mâna protetică trebuie să fie întotdeauna montată pe instrumentul de îmbrăcare.

- Utilizați numai componentele enumerate (echipament, unelte, materiale) și țineți-le la îndemână.
- Evitați deteriorarea care poate fi cauzată mâinii protetice și mănușii protetice