

AT52332
MANUAL DE INSTRUCTIUNI, SCAUN CU ROTILE ELECTRIC



RO

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare. Nu utilizați produsul înainte de a vă familiariza cu acest manual și de a-l înțelege. Dacă nu înțelegeți avertismentele, notele și recomandările, contactați un specialist în domeniul sănătății sau vânzătorul pentru a evita deteriorarea produsului sau rănirea personală.

AVERTISMENT: Verificați toate piesele pentru eventuale daune care ar fi putut apărea în timpul transportului. Dacă observați astfel de daune, NU utilizați produsul. Pentru mai multe informații, contactați vânzătorul.

GRUP DE PACIENȚI VIZAȚI

Persoanele care se confruntă cu boli, disfuncții sau leziuni pentru care acest produs este util în procesul de tratament/reabilitare sau compensare (consultați secțiunea despre utilizarea produsului din acest manual de utilizare). Produsul poate fi achiziționat de utilizator independent sau la recomandarea unui medic, terapeut sau alt specialist. Indiferent dacă achiziționați produsul independent sau la recomandarea unui medic/terapeut/alt specialist, luați în considerare dimensiunile disponibile/funcțiile necesare și variantele produsului, indicațiile și contraindicațiile de utilizare, precum și informațiile furnizate de producător.

SCOPUL UTILIZĂRII

Produsul este destinat deplasării persoanelor cu dizabilități, cu capacitate de mers limitată sau inexistentă. Scaunul cu roțile este conceput pentru a transporta o singură persoană.

INDICAȚII

Limitări semnificative ale mobilității: Persoane cu limitări severe ale forței musculare, de exemplu, din cauza bolilor neurologice, tulburărilor musculare sau sindroamelor dureroase care previn sau îngreunează semnificativ deplasarea independentă.

Boli neurodegenerative: Persoane care suferă de afecțiuni precum scleroză multiplă, boala Parkinson, distrofii musculare sau SLA, care duc la pierderea progresivă a controlului și forței musculare.

Oboseală: Persoane pentru care mișcarea prelungită sau operarea manuală a unui scaun cu roțile este prea obositoare din cauza unei boli sau stări de sănătate, provocând oboseală rapidă și epuizare.

Limitări legate de vârstă: Persoane vârstnice care au mobilitate și forță limitate din cauza vârstei pot beneficia de un scaun cu roțile electric pentru a-și menține independența și mobilitatea.

Perioade de reabilitare și recuperare: Persoane care trec printr-un proces de reabilitare după leziuni sau intervenții chirurgicale, care temporar nu pot să se miște independent, pot utiliza un scaun cu roțile electric ca parte a tratamentului și procesului de recuperare.

CONTRAINDICAȚII

Limitări fizice sau mentale (de exemplu, deficiențe de vedere) care împiedică manipularea în condiții de siguranță a produsului.

Persoanele care au dificultăți în a aprecia distanțele sau spațiile pot întâmpina probleme în manevrarea în siguranță a unui scaun cu roțile electric. Scaunele cu roțile electrice necesită un anumit nivel de dexteritate manuală și coordonare pentru a opera joystick-ul sau alte dispozitive de control. Persoanele care nu pot opera eficient aceste dispozitive s-ar putea să nu poată utiliza în siguranță un scaun cu roțile electric.

Deși multe persoane cu deficiențe cognitive pot utiliza în siguranță scaunele cu roțile electrice, deficiențele severe pot împiedica operarea în siguranță a vehiculului.

Persoanele care nu își pot menține o poziție stabilă în șezut pot necesita sisteme de suport suplimentare pentru a utiliza în siguranță un scaun cu roțile electric.

Epilepsia sau alte condiții care pot duce la o deteriorare bruscă a conștiinței sau reacțiilor pot reprezenta o contraindicație.

Dacă o persoană are dificultăți în coordonarea motorie sau nu poate opera independent comenzile scaunului cu roțile, aceasta poate reprezenta o contraindicație.

Persoanele cu tulburări de conștiință care pot afecta capacitatea lor de a opera în siguranță scaunul cu roțile pot fi, de asemenea, contraindicate pentru utilizarea acestuia.

În unele cazuri, problemele cardiace grave sau afecțiunile legate de tensiunea arterială pot limita capacitatea de a utiliza în siguranță un scaun cu roțile electric, mai ales atunci când emoțiile sau stresul pot declanșa reacții nedorite.

Afecțiuni precum scleroza multiplă avansată sau alte boli care afectează controlul muscular pot necesita soluții adaptive specializate în ce privește utilizarea scaunelor cu roțile.

Problemele legate de percepția adâncimii, conștientizarea spațială sau orientarea generală pot limita semnificativ siguranța utilizării unui scaun cu roțile electric.

Starea generală proastă de sănătate sau intervențiile chirurgicale recente, în special cele care implică coloana vertebrală sau membrele inferioare, pot necesita întreruperea utilizării scaunului cu roțile până când starea de sănătate se îmbunătățește.

LISTA COMPONENTELOR

Scaun cu roțile, baterie, încărcător, manual de utilizare

DATE TEHNICE

Lungime: 115 cm

Lățime: 65 cm

Înălțime: 95 cm

Lungime când este pliat: 82 cm

Lățime când este pliat: 40 cm

Înălțime când este pliat: 71 cm

Lățime scaun: 44 cm

Grosime scaun: 2 cm

Lungime scaun: 44 cm

Înălțimea de la podea la scaun (măsurată în partea din față): 50 cm

Înălțimea cotierei: 20 cm

Înălțimea spătarului: 42 cm

Greutate: 45 kg

Roți față: pline 10 inchi

Roți spate: pneumatice 16 inchi

Motor: 2 unități x 250 W c.c., cu perii

Baterie: 2 unități x 12 V 12 Ah, cu plumb-acid

Încărcător: 220 V c.c., 50 Hz, 2 A

Curent maxim de ieșire al controlerului: 50 A

Distanța teoretică de deplasare: ≤20 km

Viteza maximă: 6 km/h

Performanța la frânare: ≤1,5 m

Raza minimă de viraj: ≤1,2 m

Presiune în anvelope: 2 kg f/m²

Cadru: oțel carbon

Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg



Acest simbol indică greutatea maximă a utilizatorului.

Dimensiunile oferite pot varia cu ±2 cm.

CARACTERISTICI

Scaunul cu roțile electric este alimentat de baterii și acționat de un motor cu curent continuu. Utilizatorii controlează direcția și ajustează viteza folosind un controler—joystick. Scaunele cu roțile sunt adecvate pentru utilizarea la viteze mici, pe suprafețe plane și cu înclinații ușoare.

REGULI GENERALE DE CONDUS

Țineți-vă mâinile pe cotiere pentru a controla complet scaunul cu roțile și asigurați-vă că nu există obstacole în fața scaunului cu roțile.

Înainte de a vă obișnui cu conducerea scaunului cu roțile electric, exersați în parcuri sau alte zone sigure și deschise.

Exercițiile repetate într-un loc sigur vă vor permite să exersați deplasarea înainte, oprirea și virajele.

Când conduceți pentru prima dată pe drum, asigurați-vă că sunteți însoțiți de un îngrijitor și că sunt sigure condițiile de drum.

Respectați cu strictețe regulile de circulație pentru pietoni; nu vă considerați șofer de autovehicul.

Conduceți pe trotuar și folosiți trecerile pentru pietoni. Dacă nu există trotuar, circulați pe partea dreaptă și evitați să conduceți pe banda de circulație.

Conduceți scaunul cu roțile prudent; evitați să mergeți în zig-zag sau să faceți viraje bruște.

Păstrați presiunea corectă în anvelopele pneumatice, deoarece o presiune incorectă poate cauza o conducere instabilă sau un consum excesiv de energie.

CONDUCEREA CU UN ÎNGRIJITOR SAU EVITAREA ANUMITOR CONDIȚII

Evitați să conduceți în condiții meteorologice nefavorabile (de exemplu, ploaie, ceață densă, vânt puternic, zăpadă). Dacă scaunul cu roțile se udă, ștergeți imediat apa.

Evitați să conduceți pe suprafețe neadecvate (de exemplu, noroi, nisip, pietre).

Evitați să conduceți pe drumuri aglomerate.

Evitați să conduceți în apropierea șanțurilor neprotejate, iazurilor, etc.

Când traversați căile ferate, opriți-vă înainte de trecerea la nivel cu calea ferată pentru siguranță și asigurați-vă că roțile nu se blochează pe șine. Traversați în unghi drept.

Scaunul cu roțile electric este destinat exclusiv pentru utilizare personală; nu transportați alte persoane sau bunuri și nu îl utilizați pentru remorcare.

REGULI PENTRU DEPLASAREA PE RAMPE ȘI PANTE

Evitați să conduceți în următoarele locuri: pante abrupte, terenuri înclinate, trepte mari, canale etc.

Evitați să conduceți în pante abrupte; gradul de înclinare nu trebuie să depășească 9 grade. Manevrarea controlerului trebuie să fie făcută cu mare atenție atunci când conduceți pe o pantă.

Când vă deplasați pe rampe sau pante, mențineți deplasarea spre înainte.

Reduceți viteza când conduceți la vale.

Evitați să conduceți pe margini pe o pantă abruptă.

Nu conduceți pe scări și evitați să treceți peste trepte mari.

Evitați să traversați șanțuri largi. Când traversați șanțuri, mențineți un unghi drept între roți și șanț.

Notă: Nu comutați scaunul cu roțile pe modul manual atunci când vă deplasați pe rampe sau pante.

În caz de defectare a scaunului cu roțile într-o intersecție, solicitați imediat ajutorul trecătorilor și comutați scaunul în modul manual sau deplasați-vă într-un loc sigur.

REGULI PENTRU ÎNGRIJITORI

Îngrijitorii trebuie să se asigure că picioarele utilizatorului sunt plasate corect pe suportul pentru picioare și că îmbrăcămintea nu se prinde de roți.

Îngrijitorii trebuie să împingă scaunul cu roțile înainte pentru a asigura deplasarea în siguranță pe pante abrupte sau lungi.

DURATA DE VIAȚĂ

Durata de viață este de 5 ani de la data fabricației. Nu depășiți această perioadă pentru a evita accidentele neprevăzute.

Notă: Dacă este necesară o reparație sau o modificare, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Nu efectuați modificări arbitrare, întrucât acest lucru poate duce la accidente sau defecțiuni.

Notă: Înainte de confirmarea de către compania noastră, nu înlocuiți piese sau materiale fără notificare prealabilă.

Nu adăugați sarcini aleatorii pentru a evita dezechilibrarea.

Nu folosiți un alt vehicul pentru a tracta sau împinge scaunul cu roțile atunci când cineva stă pe el sau când scaunul este în modul manual.

Dacă apare un sunet neobișnuit, vă rugăm să contactați imediat centrul de service.




PLIEREA ȘI DESFACEREA SCAUNULUI CU ROTILE

Pliere

Scoateți bateria și deconectați conectorul roșu.

Trageți spre înapoi comutatorul conectorului înapoi în timp ce retrageți mânerul.

Ridicați perna cu mâna; plierea scaunului cu roțile este completă.

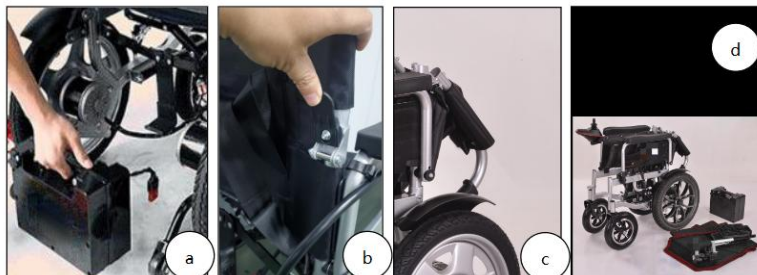

Desfacerea scaunului cu roțile

Aduceți scaunul cu roțile într-o stare semi-desfăcută, ridicați ambele părți ale mânerului până când auziți un clic și verificați dacă există componente slăbite.

INSTALAREA BATERIEI

AVERTISMENT: Când desfășurați scaunul cu roțile, asigurați-vă că cadrul bateriei este în poziția corectă. TRAGEȚI CADRUL ÎN JOS.

Introduceți bateria în cadrul aflat în spatele scaunului cu roțile. Fixați bateria folosind curea din cauciuc.



CONECTAREA FIRELOR

Conectați mufa cutiei bateriei la mufa controlerului, așa cum este indicat în imaginea de mai jos.




REGLAREA JOYSTICK-ULUI

Reglați controlerul în poziția dorită prin rotirea piuliței spre stânga. După ajustare, strângeți piulița.



MONTAREA ȘI DEMONTAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Așa cum este ilustrat în figură, instalați suportul pentru picioare în tubul cadrului, deplasându-l din exterior spre interior până ajunge în poziția corectă. Pentru demontare, apăsați elementul din plastic spre exterior, apoi ridicați suportul pentru picioare.

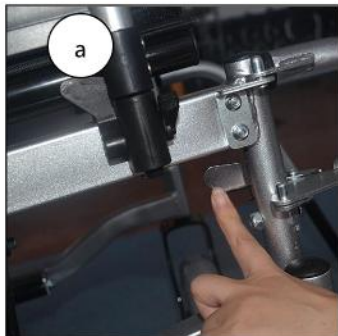

AJUSTAREA UNGHIULUI ROTII PIVOTANTE

Reglați unghiul roții pivotante slăbind piulița, așa cum este ilustrat în figură.



UTILIZAREA FRÂNEI DE MÂNĂ

Așa cum este ilustrat în figură, împingeți ferm frâna de mână spre înainte pentru a opri roata din spate; scaunul cu roțile se va opri din mișcare. Eliberarea frânei de mână va readuce scaunul cu roțile la funcționarea normală. Utilizatorii pot alege între modul manual și modul electric, în funcție de nevoile lor.



COMUTAREA ÎNTRE MODUL MANUAL ȘI MODUL ELECTRIC

Opriti alimentarea sau frânați scaunul cu roțile, apoi scoateți mecanismul de cuplare din canelură și rotiți-l; scaunul cu roțile va trece în modul manual. Rotiți mecanismul de cuplare și introduceți-l înapoi în canelură; împingeți ușor scaunul cu roțile până auziți un clic—scaunul cu roțile va reveni în modul electric.

Notă: Când treceți de la modul manual la modul electric, asigurați-vă că ambele mecanisme de cuplare sunt în locașurile lor. Dacă vreun mecanism de cuplare nu este complet în locaș, există pericol de răsturnare.



ÎNCĂRCĂTOR

Notă: Încărcătorul este utilizat pentru a încărca bateria. Nu utilizați scaunul cu roțile electric în timpul încărcării.

Tensiune de intrare: 220 V c.a.

Tensiune de ieșire: 24 V c.c.

Curent de ieșire: 2 A pentru 12 Ah, 3 A pentru 20 Ah

Mufa cutiei bateriei are trei pini, iar clasa de protecție împotriva lichidelor este IPX1.

Pentru a încărca bateria, conectați un capăt al mufei încărcătorului la sursa de alimentare și celălalt capăt la mufa cutiei bateriei, conform imaginii de mai jos. Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza procesul de încărcare:

Asigurați-vă că priza încărcătorului nu este blocată.

Asigurați-vă că scaunul cu roțile electric este oprit.

Deconectați mufele care conectează cutia bateriei la controler.

Conectați mufa de ieșire a încărcătorului la priza de alimentare a cutiei bateriei.

Conectați mufa principală a încărcătorului la sursa de alimentare; lumina roșie se va aprinde. Încărcarea completă durează între 8 și 10 ore; nu depășiți 24 de ore.

Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună atunci când scaunul cu roțile nu este folosit, pentru a preveni scurtarea duratei de viață a bateriei.

Avertismente:

Nu întrerupeți încărcarea până când procesul nu este complet. Utilizarea repetată a bateriei într-o stare incomplet încărcată va scurta durata de viață a acesteia; prin urmare, bateria ar trebui încărcată complet cât mai des posibil.

Când bateria este complet încărcată, indicatorul de putere va deveni verde. Nu întrerupeți încărcarea înainte ca bateria să fie complet încărcată.

După ce încărcarea este completă, opriți sursa de alimentare; altfel, bateria se va descărca treptat. Nu încărcați mai mult de 24 de ore; există riscul de supraîncărcare.



BATERIA


Manipularea incorectă în timpul înlocuirii bateriei poate duce la riscuri de explozie. Folosiți doar același tip de baterie sau o baterie recomandată de producător. Asigurați-vă că bornele bateriei sunt conectate corespunzător.

Sfaturi utile pentru prelungirea duratei de viață a bateriei:

Încărcați frecvent pentru a menține bateria complet încărcată. Este recomandat să încărcați complet bateria dacă scaunul cu roțile electric nu este folosit. Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este recomandat să încărcați bateria de două ori pe lună.

Avertisment: Evitați flăcările deschise în timpul încărcării bateriei. Focul poate provoca aprinderea sau explozia bateriei. În timpul încărcării, se generează hidrogen; prin urmare, nu fumați și încărcați bateria într-o cameră bine ventilată. Nu deconectați sursa de alimentare când ștecherul sau mâinile sunt ude; acest lucru poate provoca electrocutare. Nu utilizați și nu stați în scaunul cu roțile electric în timpul încărcării pentru a preveni accidentele neprevăzute și rănirea utilizatorului.

PANOU DE CONTROL

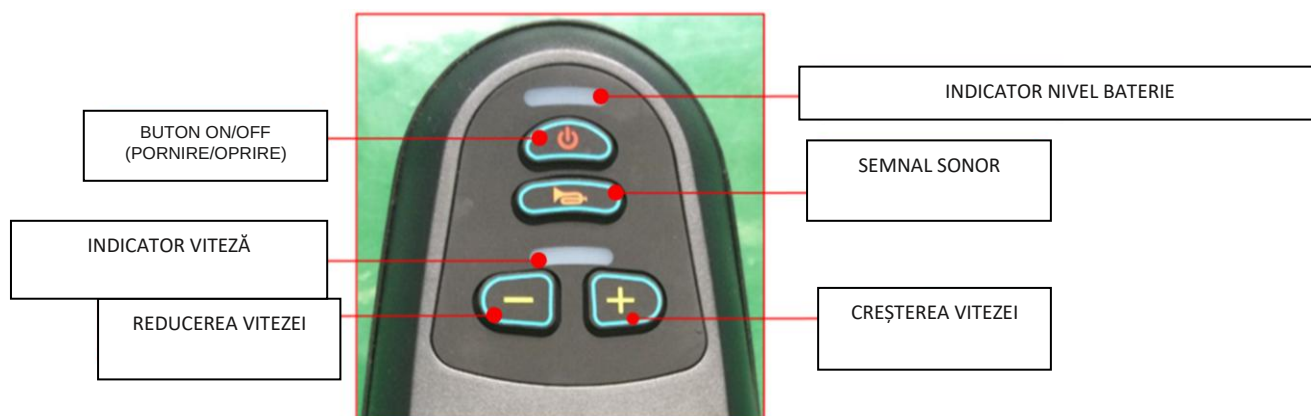

Pornirea alimentării

Apăsăți butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE), iar indicatoarele de încărcare a bateriei se vor aprinde de la stânga la dreapta.



Notă: Eroarea „joystick necentrat” poate apărea dacă joystick-ul nu este în poziția centrală la pornirea dispozitivului. Eliberați joystick-ul pentru a îl aduce în poziția centrală, iar eroarea va dispărea. Această funcție este concepută pentru a preveni pericolele atunci când joystick-ul nu este centrat.

Avertisment: Dacă, după eliberarea joystick-ului, eroarea persistă, acest lucru poate indica o defecțiune a componentei; nu utilizați dispozitivul și contactați centrul de service. În caz de urgență, puteți opri direct alimentarea prin apăsarea butonului de pornire.

Oprirea alimentării

Apăsați butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE), iar toate LED-urile se vor stinge.



Modul de repaus

Dacă joystick-ul nu este utilizat mai mult de 20 de minute, alimentarea se va opri automat și sistemul va intra în modul de repaus. Puteți activa sistemul apăsând butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE).


Ajustarea vitezei

În funcție de obiceiurile și mediul utilizatorului, viteza scaunului cu roțile electric poate fi ajustată. Indicatorul de viteză arată viteza maximă, iar ajustarea se poate face apăsând butoanele pentru reducerea sau creșterea vitezei. Viteza este împărțită în cinci nivele, marcate ca 20%, 40%, 60%, 80% și 100% din viteza maximă.



Claxon

Apăsarea butonului HORN va activa claxonul; sunetul se va menține cât butonul este apăsat.

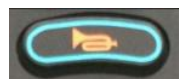

Indicator nivel baterie

După pornirea scaunului cu roțile electric, indicatorul nivelului bateriei începe să funcționeze, arătând o valoare estimată a energiei rămase. După cum se arată în figură, bateria este complet încărcată (toate LED-urile sunt aprinse).



Când doar LED-ul roșu sau galben este aprins, bateria trebuie încărcată. Înainte de o călătorie mai lungă, bateria ar trebui să fie complet încărcată. Dacă doar LED-ul roșu este aprins, nivelul de energie este foarte scăzut și este necesară încărcarea imediată.

Utilizarea joystick-ului

Direcția de deplasare a scaunului cu roțile electric este controlată de joystick. Amploarea de mișcare a joystick-ului determină, de asemenea, viteza.

Avertisment: Din motive de siguranță, atunci când scaunul cu roțile electric este pornit pentru prima dată, amploarea de mișcare a joystick-ului este ignorată. Indicatorii de viteză care luminează intermitent semnifică faptul că joystick-ul nu este în poziția centrală atunci când se pornește alimentarea. Eliberați joystick-ul și poziționați-l în centru pentru a rezolva eroarea.



NOTĂ:

În cazul unui „incident grav” legat de produs, care a avut sau ar putea avea consecințe directe ori indirecte, inclusiv posibilitatea de a conduce la oricare dintre următoarele situații:

- a) decesul pacientului, al utilizatorului sau al altei persoane sau
- b) deteriorarea temporară sau permanentă a sănătății unui pacient, utilizator sau altă persoană sau
- c) o amenințare gravă pentru sănătatea publică,

„incidentul grav” menționat anterior trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul sau pacientul. În Polonia, autoritatea competentă este Oficiul pentru înregistrarea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a produselor biocide.

NOTĂ:

Dacă aveți dureri, reacții alergice sau alte simptome deranjante care sunt legate de utilizarea dispozitivului medical, consultați un profesionist din domeniul sănătății.

NOTĂ: Este interzis să utilizați produsul în moduri care nu sunt conform scopului său destinat.

ÎNȚREȚINERE ȘI AUTO-INSPECȚIE

Întreținerea scaunului cu roțile electric include curățarea scaunului cu roțile, verificarea roților și a bateriei, precum și încărcarea bateriei. Pentru întreținerea mai avansată, vă rugăm să contactați centrul de service. Recomandările noastre de întreținere: inspecțiați scaunul cu roțile electric la fiecare șase luni și efectuați o verificare anuală.

Curățarea scaunului cu roțile electric, a anvelopelor și întreținerea bateriei

Curățarea scaunului cu roțile electric

Curățați scaunul cu roțile electric în mod regulat. Elementele care sunt frecvent atinse de utilizator (de exemplu, perna scaunului, cotierele, controlerul) trebuie șterse cu o cârpă curată și ușor umedă. Nu folosiți solvenți organici pentru curățare.

Dacă scaunul cu roțile este utilizat de un pacient, acesta trebuie curățat săptămânal. În cazul în care scaunul cu roțile este folosit de o persoană cu o boală infecțioasă, trebuie dezinfectat folosind dezinfectanți adecvați.

În caz că există murdărie pe suprafață, ștergeți cu apă curată sau un detergent ușor și uscați cu o cârpă.

Nu utilizați alcool, benzină, kerosen sau alți solvenți chimici corozivi și volatili pentru curățare, deoarece aceștia pot deteriora grav aspectul și structura internă a scaunului cu roțile.

Nu folosiți niciodată un aparat de spălat cu presiune mare pentru a evita deteriorarea componentelor electronice interne și a cablurilor.

Anvelope

Verificați regulat presiunea în pneuri și uzura acestora. Dacă adâncimea benzii de rulare scade la 1 mm, anvelopa trebuie înlocuită.

Bateria

Asigurați-vă că bateria este încărcată frecvent complet. Pentru a îi prelungi viața, recomandăm să nu o încărcați decât atunci când bateria este complet descărcată.

Defecțiuni la scaunul cu roțile electric și auto-inspecția

În cazul unei defecțiuni a scaunului cu roțile electric în timpul utilizării, opriți imediat alimentarea înainte de a efectua orice verificare. Semnul unei pierderi totale de energie este stingerea tuturor LED-urilor de pe panoul de control.

Pași pentru verificare:

Verificați dacă mufa controlerului este conectată corect și nu este slăbită.

Verificați dacă mufa controlerului conectată la cutia bateriei este corect conectată. Reconectați această mufă (ținând de conector, nu de cablu, pentru a evita deteriorarea firelor).

Dacă, după aceste verificări, scaunul nu repornește sau dacă aveți orice nelămuriri, contactați imediat centrul de service.

Notă: Controlerul dispune de un sistem de diagnosticare care monitorizează controlerul și motorul. Dacă oricare dintre aceste componente se defectează, sistemul va afișa o eroare pe controler.

LISTĂ DE VERIFICARE

Mai jos se află o listă de verificare. Verificați periodic scaunul cu roțile conform recomandărilor noastre.

Înainte de fiecare utilizare, verificați următoarele elemente pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate și sunt în poziția corectă: spătarul, cotierele, poziția controlerului, suporturile pentru picioare, mecanismul de cuplare pentru modul manual și electric și nivelul de încărcare al scaunului cu roțile electric.

Lunar, verificați următoarele elemente pentru a evita uzura și deteriorarea: mecanismul de cuplare a modului manual și electric, frânele, anvelopele, conectorii controlerului și încărcătorului și asigurați-vă că nu lipsesc șuruburi.

La fiecare șase luni, se recomandă efectuarea unei inspecții complete.

PROBLEME LEGATE DE GARANȚIE

Garanția nu acoperă următoarele situații:

Situații subiective, fără existența unor probleme funcționale.

Uzură legată de utilizare și trecerea timpului (suprafețe vopsite și galvanizate, decolorarea naturală a rășinilor etc.).

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

Neefectuarea verificărilor regulate conform indicațiilor noastre.

Întreținerea incorectă sau necorespunzătoare.

Funcționare neconformă cu manualul sau supraîncărcare.

Modificări neautorizate.

Factori externi precum funingine, substanțe chimice, excremente de păsări, ploaie acidă, pietre, praf metalic etc.

Fenomene naturale, cum ar fi taifunuri, inundații, incendii, cutremure etc.

Următoarele taxe nu sunt acoperite de garanție:

Înlocuirea consumabilelor precum anvelope, siguranțe, piese din plastic, elemente din sticlă, lubrifianți etc.

Taxe pentru inspecție, reglaje, completare cu ulei, curățare etc.

Taxe pentru inspecțiile regulate indicate de fabrica noastră.

Modificări neautorizate.

Costuri de întreținere la centrele de service neautorizate de compania noastră.

AVERTISMENT: PĂSTRAȚI CUTIA SCAUNULUI CU ROTILE! ESTE O CONDIȚIE A GARANȚIEI!

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. Nu depozitați scaunul cu roțile electric în condiții de umezeală, cum ar fi lângă o baie. Dacă scaunul cu roțile se udă, ștergeți imediat apa. Păstrați scaunul cu roțile departe de câmpuri magnetice puternice și dispozitive electrice mari, cum ar fi stațiile de radio, televiziune, stațiile de radio subterane sau emițătoarele de radio și telefonie. Dacă există surse de interferență electromagnetică în apropiere, evitați-le.

Evitați expunerea scaunului cu roțile la umezeală și la lumina directă a soarelui și păstrați-l departe de sursele de căldură. Scaunul cu roțile trebuie depozitat într-un loc ferit de ploaie, în aer liber sau în locuri cu umezeală pentru a evita deteriorarea componentelor electrice din cauza umidității.

Condiții de depozitare

Temperatura ambiantă: între -40 și +55 grade Celsius

Umiditate relativă: ≤80%

Presiunea aerului: între 86 kPa și 106 kPa

ELIMINARE

Acest produs conține componente electronice. După încheierea duratei sale de viață, nu îl aruncați la gunoiul menajer. Pentru o eliminare corespunzătoare a produsului, duceți-l la un punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice. Eliminarea corespunzătoare previne daunele potențiale aduse mediului și sănătății umane, conform reglementărilor legale aplicabile privind reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

CARD DE GARANȚIE

Model:
Număr de serie:

Ștampila punctului de vânzare

și semnătura lizibilă a vânzătorului:

1. ANTAR Sp. J., 03-068 Warsaw, ul. Zawiślańska 43, acordă prin prezenta o garanție de 12 luni pentru produs, începând cu data achiziționării de către cumpărător.
2. În perioada de garanție, ANTAR se angajează să efectueze reparațiile necesare pentru restabilirea funcționării corespunzătoare a produsului, în termen de 14 zile de la data primirii produsului de către centrul de service, împreună cu dovada de cumpărare și cardul de garanție.
3. ANTAR își rezervă dreptul de a înlocui produsul în cazul în care reparația este considerată neeconomică. Repararea sau înlocuirea produselor defecte nu prelungește perioada de garanție.
4. Dacă produsul prezintă defecțiuni, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră sau (dacă acest lucru nu este posibil) să-l trimiteți la ANTAR (așa cum se specifică la punctul 1).
5. Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și respectați-le. Dacă produsul este utilizat necorespunzător și contrar recomandărilor, garanția va fi irevocabil pierdută.
6. Garanția nu acoperă daunele cauzate de forța mecanică externă, sarcina care depășește greutatea maximă admisă a utilizatorului, așa cum este descrisă în manual, sau contactul produsului cu alcool, substanțe grase sau benzină. Garanția nu acoperă piesele supuse uzurii și ruperii normale în timpul utilizării, cum ar fi rulmentul, piesele din cauciuc și altele.
7. Produsul livrat service-ului în legătură cu reclamația nu trebuie să provoace un pericol de epidemie.
8. ACEASTĂ GARANȚIE ESTE VALABILĂ NUMAI ÎMPREUNĂ CU DOVADA DE ACHIZIȚIE (NOTĂ DE PLATĂ, CHITANȚĂ, FACTURĂ). ÎN CAZUL UNEI RECLAMAȚII, TREBUIE ANEXATĂ O DOVADĂ A ACHIZIȚIEI.
9. Reclamațiile depuse fără dovada de achiziție și fără un card de garanție cu numărul de serie al produsului nu vor fi luate în considerare.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warsaw, ul. Zawiślańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Data publicării manualului: 04.01.2025
v1-04.01.2025

Subsemnata, ALEXE ADINA-NICOLETA, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr. 23747/2008, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, ca textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și ca, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.



Aug

