

DESCRIERE TEHNICĂ EXOPULSE MOLLII SUIT

STIMULAREA ELECTRICĂ

EXOPULSE Mollii Suit este un costum multicanal pentru întregul corp, cu o stimulare electrică cu energie redusă – 20 volți și 20 Hz.

Acesta este compus dintr-o unitate de comandă, o jachetă și pantaloni, cu 58 de electrozi încorporați, în contact direct cu pielea și prepoziționați pentru a stimula 88 de grupe musculare cheie.

MĂRIMI

Costumul este disponibil în 37 de mărimi, începând de la 104 cm până la 5XL pentru femei și bărbați.

PROGRAMAREA UNITĂȚII DE COMANDĂ

Un personal medical calificat programează în prealabil ce nervi/mușchi urmează să fie stimulați pe baza unei evaluări clinice a utilizatorului, iar rezultatul este evaluat prin metode standardizate. Prin urmare, programul de stimulare este specific fiecărui utilizator.

Operatorul sau utilizatorul poate apoi să pornească/să întrerupă/să oprească sesiunea preprogramată, dar nu poate modifica ce nervi/mușchi ar trebui să fie stimulați și cu ce intensitate.

PIESE APLICATE

EXOPULSE Body Garments sunt piese aplicate de tip BF. EXOPULSE Mollii Control Unit este o piesă accesibilă.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate al EXOPULSE Body Garments este de 2 ani, iar termenul de valabilitate al EXOPULSE Mollii Control Unit este de 3 ani.

MATERIALE

Materialele din EXOPULSE Mollii Suit sunt biocompatibile și testate în conformitate cu ISO 10993-1 (*Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale — Partea 1: Evaluare și încercare în cadrul unui proces de management al riscului*) pentru citotoxicitate, sensibilitate și iritație. Prin urmare, nu există niciun risc inacceptabil în urma expunerii la EXOPULSE Body Garments.

Componentele EXOPULSE Mollii Control Unit sunt certificate pentru a îndeplini cerințele (acolo unde este cazul) ale RoHS2 2011/65/UE și ale amendamentului acestuia RoHS3 2015/863 (*RoHS: restricții privind utilizarea anumitor substanțe periculoase*).

În plus, componentele sunt conforme cerințelor Regulamentului REACH 1907/2006 (*Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice*), acolo unde este cazul. Prin urmare, nu există niciun risc inacceptabil în urma expunerii la EXOPULSE Control Unit.

CONSUM DE ENERGIE

EXOPULSE Mollii Suit Control Unit este alimentată de 4 baterii AAA. Utilizați numai baterii alcaline. Bateriile alcaline permit efectuarea mai multor tratamente înainte de a fi epuizate. Pentru eliminarea sigură ca deșeu a bateriilor epuizate, vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe ambalajul bateriei și reglementările locale (inclusiv Directiva DEEE 2012/19/UE). Nu utilizați baterii zinc-carbon sau baterii reîncărcabile.

OPERARE

EXOPULSE Mollii Suit trebuie operat în interior în următoarele condiții:

- Temperatură între 5 și 40 °C
- Umiditate: de la 15 % până la 90 % umiditate relativă
- Altitudine: de la 1.060 hPa la 700 hPa (de la 10.000 ft la -1250 ft)
- Evitați mediile cu mult praf, umede și luminoase

Dacă EXOPULSE Mollii Suit a fost expus la temperaturi mai mari sau mai mici decât temperatura de funcționare, lăsați dispozitivul să se încălzească/răcească timp de cel puțin o oră înainte de utilizare.

GARANȚIE, DURATĂ DE VIAȚĂ/DURATĂ DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE

EXOPULSE Mollii Control Unit are este garantată pentru o perioadă de 2 ani în condiții de utilizare regulată, în conformitate cu destinația prevăzută și cu informațiile descrise în prezentul document.

Îmbrăcămintea este garantată să reziste 25 de spălări la mașină cu detergent delicat sau 60 de spălări la mașină cu detergent delicat și adăugarea dezinfectantului de rufe SagrotanTM sau o perioadă de 2 ani de utilizare regulată în conformitate cu utilizarea prevăzută și cu informațiile descrise în prezentul document.

Utilizarea dincolo de această perioadă sau utilizarea neconformă cu destinația prevăzută nu este acoperită de garanția EXONEURAL NETWORK AB.

Durata de viață/durata de exploatare a EXOPULSE Mollii Suit este de 4 ani.

Intervalul de service: se recomandă să trimiteți unitatea de comandă pentru verificări preventive o dată pe an pentru a verifica dacă unitatea funcționează corespunzător. Contactați-vă furnizorul local EXOPULSE pentru instrucțiuni de expediere și condiții de service. EXOPULSE Mollii Suit nu necesită întreținere.

ELIMINAREA CA DEȘEU

Returnați EXOPULSE Mollii Suit la EXONEURAL NETWORK AB în vederea eliminării ca deșeu. Bateriile uzate trebuie să fie eliminate ca deșeu în conformitate cu Directiva DEEE 2012/19/UE.