

ICON 30FAF



REHASENSE

**Scaun cu rotile pliabil ușor din
aluminiu de înaltă performanță
Instrucțiuni de utilizare (RO)**



INDEX

- 1 Informații introductive**
- 2 Scop, indicații și contraindicații**
- 3 Reguli de utilizare și recomandări de siguranță**
- 4 Descrierea produsului**
- 5 Etichetă**
- 6 Utilizarea**
- 7 Curățare și utilizare**
- 8 Service și întreținere**
- 9 Transport și depozitare**
- 10 Reutilizare**
- 11 Condiții de garanție**
- 12 Parametri tehnici**
- 13 Configurarea și ajustările scaunului cu roțile**
 - 13.1 ICON 30FAF**
 - 13.2 Generale**
 - 13.2.1 Roți**
 - 13.2.2 Frâne**
 - 13.2.3 Suporturi pentru picioare - 70/80/90**
 - 13.2.4 grade Mânere de împingere pliabile**
- 14 Accesorii**
 - 14.1 Cotiere**
 - 14.2 Tetieră**
 - 14.3 Mânere de împingere reglabile pe înălțime**
 - 14.4 Spătar cu unghi reglabil**
 - 14.5 Bară de susținere**
 - 14.6 Suporturi pentru trunchi**
 - 14.7 Dispozitive anti-răsturnare**

1. Informații introductive

Stimate utilizator,

Îți mulțumim pentru alegerea scaunului nostru cu roțile **ICON 30FAF**. Suntem încrezători că calitatea, durabilitatea și designul scaunului nu vă va dezamăgi așteptările.

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin o descriere a echipamentului medical și instrucțiuni importante pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a produsului. Înainte de utilizare citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Este deosebit de important să vă familiarizați cu cerințele de siguranță și să le respectați.

REHASENSE® își dezvoltă constant produsele și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și caracteristicile produselor fără o notificare prealabilă.

Scaunul cu roțile **ICON 30FAF** nu poate fi utilizat ca scaun pentru un vehicul în mișcare (cum ar fi autoturisme, autobuze, trenuri, metrouri etc.). Pentru informații mai detaliate, consultați secțiunea „Recomandări privind transportul”.

Vă rugăm să adresați orice întrebări distribuitorului sau direct REHASENSE®. Datele de contact pot fi găsite pe ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare.

2. Scop, indicații și contraindicații

Scop: Scaunul cu roțile manual este un echipament medical indicat pentru utilizarea de către persoanele cu mobilitate redusă care nu pot sta în picioare, merge și/sau ședează fără ajutor. Acesta este conceput pentru a transporta și a muta astfel de persoane în poziție așezată. Utilizatorii se pot deplasa cu scaunul cu roțile independent sau cu ajutorul unui asistent. Scaunul cu roțile poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior, pe diferite suprafețe (asfalt, beton, pietre și pietriș) în condiții meteorologice bune. Orice altă utilizare este interzisă.

Indicații: dispozitivul este indicat în special pentru persoanele care (din cauza unei game largi de posibile probleme de sănătate) nu pot sta în picioare și/sau merge și, prin urmare, au nevoie de un echipament de transport pentru a-și îndeplini unele sau toate sarcinile zilnice.

Contraindicații: acest tip de scaun cu roțile nu trebuie utilizat de persoanele cu paralizie flască sau alte boli care cauzează probleme grave cu controlul corpului. Aceste persoane au nevoie de scaune cu roțile speciale, concepute pentru a oferi un suport stabil suplimentar pentru corpul utilizatorului. Necesitatea și posibilitatea de utilizare a scaunului cu roțile ICON 30 FAF trebuie întotdeauna evaluate conform indicațiilor unui medic sau fizioterapeut. Scaunul cu roțile manual este un dispozitiv medical indicat pentru utilizarea de către persoanele cu mobilitate redusă care nu pot sta în picioare și merge. Acesta este conceput pentru a transporta și a muta astfel de persoane în poziție așezată.

3. Reguli de utilizare și recomandări de siguranță

Informații suplimentare

Scaunul cu roțile **ICON 30FAF** a fost testat și îndeplinește următoarele standarde europene: PN-EN 12182:2012; PN-EN 12183:2014; PN-EN 1021-1:2014; PN-ISO 7176-1,3,5,7,8,15 și PN-ISO 7176-19:2022.

Deține marcajul CE. Dacă este utilizat corect, scaunul cu roțile, asigură o funcționare fără probleme timp de mulți ani.

- Scaunul Icon 30FAF nu poate fi încărcat cu mai mult de 125 kg.
- Scaunul nu trebuie să fie încărcat cu o sarcină mai mică de 75 kg și mai mare de 125 kg pentru utilizarea în vehicule de transport aprobate.
- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a scaunului și pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Utilizați scaunul numai în stare bună.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care este destinat.
- Nu efectuați nicio modificare neautorizată a designului scaunului, cu excepția cazului în care producătorul a acordat permisiunea scrisă.
- Atunci când reglați scaunul, aveți grijă să nu vă prindeți degetele sau alte părți ale corpului între cele două părți mobile ale scaunului.

- Asigurați-vă că toate cele 4 roți sunt ÎNTOTDEAUNA în contact cu suprafața în timpul utilizării. Acest lucru va asigura un echilibru adecvat și va preveni accidentele.
- Atunci când utilizați scaunul cu roțile într-o poziție staționară, frânele de mână trebuie blocate.
- Dacă găsiți defecte sau erori, contactați imediat vânzătorul.
- Trebuie respectate toate recomandările și avertismentele producătorului.
- Scaunul cu roțile ar trebui să fie utilizat numai pe suprafețe stabile.
- Utilizarea scaunului și expunerea acestuia la contactul direct și prelungit cu soarele pot duce la arsuri ale pielii.
- Nu se recomandă utilizarea scaunului cu roțile pe plajă, în noroi sau în condiții meteo extreme.
- Persoana care asistă persoana cu handicap în scaunul cu roțile trebuie să fie absolut sănătoasă.
- Nu demontați singur piesele și accesoriile scaunului. Acest lucru poate afecta stabilitatea scaunului cu roțile.
- Evitați să lăsați scaunul aproape de surse de căldură și flăcări deschise (focuri de tabără, aragazuri). De asemenea, nu este recomandat fumatul în timpul utilizării, deoarece scaunul nu este rezistent la foc.
- ÎN CAZUL UNUI INCIDENT GRAV ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI, SUNAȚI VÂNZĂTORUL SAU CONTACTAȚI DIRECT PRODUCĂTORUL
REHASENSE (detalii de contact la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare). Trebuie luate măsuri imediate în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale din 5 aprilie 2017

ATENȚIE! Trebuie să atrageți atenția asupra marcajelor atașate



Designul scaunului constă dintr-un număr de elemente mobile, astfel încât parametrul scaunului corespunzător să poată fi selectat și ajustat. Prin urmare, trebuie să se acorde o atenție deosebită degetelor și altor părți ale corpului la desfășurarea, pliarea, reglarea înălțimii, lățimii corecte sau schimbarea roților. Există riscul de tăiere sau încleștare a unor părți ale corpului.

4. Descrierea produsului

Scaunul cu roțile ICON 30FAF este livrat standard cu: frâne de parcare, suporturi pentru picioare reglabile pe înălțime montate permanent și este echipat cu roți de acționare, roți pivotante față, cadru cu o singură traversă. Scaunul cu roțile este construit în principal din aluminiu, acoperit cu pulbere și rezistent la coroziune. Pentru a efectua unele dintre operațiunile de reglare, sunt necesare unelte general disponibile, cum ar fi chei imbus, chei plate, chei reglabile sau chei tubulare, șurubelnițe etc.

Cotierele detașabile și reglabile pe înălțime sunt disponibile opțional.

Datorită designului său pliabil, scaunul cu roțile oferă confort în transport, precum și la depozitare. Este ușor de condus și extrem de ușor de manevrat.

Acesta este livrat cu elemente care trebuie asamblate, într-o cutie de carton. Cu

echipamentul standard pentru scaunul cu roțile, ambalajul include:

- 1 cadru transversal principal cu tapițerie, 2 frâne, 2 cotiere, 2 roți spate, 2 roți pivotante față;
- 2 suporturi pentru picioare;
- 1 instrucțiune de utilizare

Setul de accesorii furnizate depinde de specificația comandată.

Componente principale:



Fotografia de mai sus prezintă un exemplu de scaun cu roțile și componentele sale de bază cu locul lor. Scaunul dvs. cu roțile și componentele sale pot (în funcție de versiunea pe care o alegeți) să difere ca aspect de cele prezentate mai sus, dar denumirile și locațiile lor rămân aceleași.

Echipament suplimentar:


În funcție de versiune, scaunul cu roțile poate fi echipat cu mai multe tipuri diferite de roți, frâne cu tambur, bară transversală simplă sau dublă, suporturi pentru picioare înălțătoare, suporturi pentru picioare pentru amputați, suporturi pentru brațe pentru hemiplegici, roți anti-basculare, tetieră, suporturi laterale, centură de siguranță, pernă de scaun, tapițerie pentru spătar cu reglare a tensionării, spătar înclinabil, mânere de împingere reglabile pe înălțime, bară transversală de rigidizare a spătarului, masă, suport pentru umbrelă, suport pentru perfuzii și cârje

Descrierea asamblării scaunului:

Vă recomandăm, ca prima asamblare și reglare să fie efectuată la un service/magazin specializat. Nu asamblați singur.


- Primul pas este să verificați dacă toate componentele scaunului sunt conforme cu specificațiile alese și se află în ambalaj. În cazul în care lipsesc articole, acestea trebuie raportate imediat furnizorului dumneavoastră.
- Componentele detașabile ale scaunului cu roțile, cum ar fi roțile din spate, cotierele și accesoriile trebuie să fie montate pe cărucior în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile specifice componentelor din prezentul manual

Plierea și desfășurarea scaunului

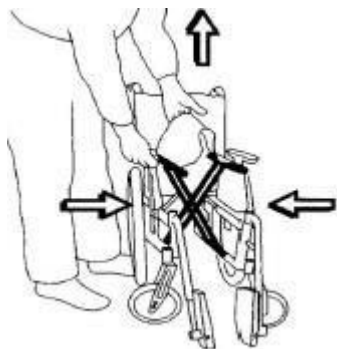

Plierea: Scoateți perna. Ridicați suportul pentru picioare. Ridicați tapițeria scaunului (foto stânga).

Desfășurarea: Așezați ambele mâini pe țevele tapițeriei scaunului și apăsați-le în jos (foto dreapta). Aveți grijă și nu puneți mâna între țevi și cadrul scaunului atunci când îl desfășurați.

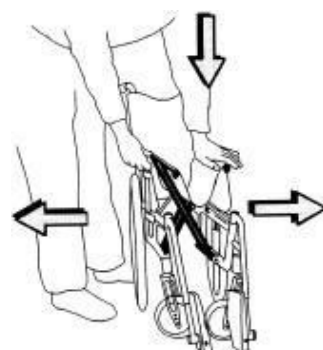

5. Etichetă

Marcaje pentru scaune cu roțile - situate pe bara transversală.

Număr de serie în standardul GS1 (UDI-DI)	SN	ICON 30FAF	Denumirea produsului
Cod EAN - GS1 128	(0105907467803753112007151210001)	2020-07-15	Data fabricației
Produs medical		RW30F40WI7	Numărul produsului
Cod EAN 13 în conformitate cu standardul GS1	5 907467 803753	40 cm	Lățimea scaunului
		125 kg	Sarcina maximă
		Max 10°	Unghiul maxim de înclinare
		40 cm	Adâncimea scaunului
		CE MD i	Citiți instrucțiunile
		REHASENSE Sp. z o.o. Sulejowska 45 G 97-300 Piotrków Tryb. Poland	Poate fi folosit în aer liber
			Producător

6. Utilizarea

Ridicarea scaunului

Scaunul cu roțile trebuie ridicat numai de mânerile de împingere ale scaunului și de cadrele laterale marcate în figura alăturată.


ATENȚIE! Este interzisă ridicarea scaunului cu roțile de suporturile pentru picioare sau pentru brațe! Vă recomandăm să scoateți suporturile pentru picioare pentru a ridica scaunul cu roțile

Tehnici de deplasare a utilizatorului către și din scaunul cu roțile

Predarea tehnicilor de deplasare a pasagerului trebuie să aibă loc sub supravegherea atentă a personalului calificat. Mai jos sunt prezentate recomandările noastre.

Mutarea utilizatorului din scaunul cu roțile în pat

Utilizatorul trebuie să fie orientat lateral față de pat, indiferent dacă o persoană suplimentară îl asistă sau nu. Aproiați-vă

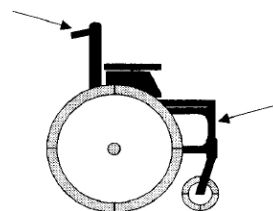



cu scaunul cu roțile cât mai aproape posibil de pat și asigurați-vă că roțile pivotante din față sunt orientate înainte. Aplicați frâna, ridicați cotiera / suportul lateral de pe partea scaunului cu roțile de pe care va avea loc transferul către pat

Mutarea utilizatorului de la pat în scaunul cu roțile

Utilizatorul trebuie să fie orientat lateral față de pat, indiferent dacă o persoană suplimentară îl asistă sau nu. Apropiați-vă cu scaunul cu roțile cât mai aproape posibil de pat și asigurați-vă că roțile pivotante din față sunt orientate în față. Acționați frâna, ridicați suportul pentru picioare. Nu vă urcați pe suportul pentru picioare, deoarece acest lucru poate duce la răsturnarea scaunului. Îngrijitorii trebuie să folosească în principal forța musculară a brațelor și picioarelor pentru a muta pasagerul, fără a se apleca excesiv sau a forța spatele.




Conducerea unui scaun cu roțile

Distribuția corectă a greutatei este un element esențial în utilizarea corectă a scaunului. Funcționarea corectă a scaunului cu roțile este influențată nu numai de greutate, ci și de structura corpului, de poziția persoanei așezate în scaunul cu roțile și de poziția roților din spate ale scaunului cu roțile. Cu cât proporția greutatei persoanei transportate se sprijină mai mult pe roțile din spate ale scaunului cu roțile, cu atât acesta este mai ușor de condus. Cu cât proporția greutatei persoanei transportate se sprijină mai mult pe roțile din față, cu atât este mai dificilă conducerea scaunului cu roțile.

ATENȚIONARE! Îngrijitorul trebuie să se asigure că frâna este întotdeauna trasă înainte de a se îndepărta de scaunul cu roțile în care este așezat utilizatorul.

ATENȚIONARE! Asigurați-vă că roțile pivotante din față sunt întotdeauna orientate înainte atunci când scaunul cu roțile nu este în mișcare, pentru a spori contactul cu solul.

Rampă pentru bordură/obstacol

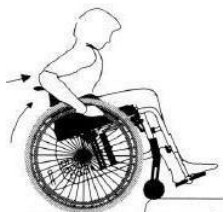

Utilizatorul se apropie de o bordură/obstacol

(Vă sfătuim, ca următoarele tehnici să fie utilizate numai de utilizatorii experimentați de scaune cu roțile)

Conduceți scaunul cu roțile cât mai aproape posibil de prag înclinați scaunul cu roțile pe roțile din spate și ridicați roțile din față până la prag. Împingeți roțile din spate înainte și, în același timp, aplecați-vă pentru a transfera greutatea în partea din față a scaunului cu roțile



Îngrijitorul și utilizatorul se apropie de bordură/obstacol

Îngrijitorul înclină scaunul cu roțile în spate apăsând cu piciorul pe țeava orizontală inferioară a cadrului și folosind mânerul de împingere pentru a manevra scaunul cu roțile astfel încât roțile din față să se sprijine de bordură. Apoi înclină ușor scaunul în față până este în întregime pe bordură.



Utilizatorul se apropie de un obstacol cu spatele

(Tehnica menționată va funcționa numai cu un prag scăzut și dacă suporturile pentru picioare nu ating solul)

Mergeți cu spatele spre obstacol până când roțile ating obstacolul împingeți roțile înapoi în timp ce vă înclinați în spate.



Îngrijitorul și utilizatorul se apropie de obstacol cu spatele

Apropiați-vă de obstacol cu spatele până când roțile ating obstacolul.

prin ridicarea roții din față la înălțimea obstacolului cu ajutorul pedalei. Trageți scaunul cu roțile înapoi până când roțile din față sunt deasupra pragului. Intrați roțile din față pe bază.

Înclinați scaunul înapoi

apoi, coborâți-le cu atenție

Cum să cobori pragul

(Vă sfătuim ca următoarele tehnici să fie utilizate numai de utilizatori experimentați de scaune cu roțile)

Conduceți scaunul cu roțile până la margine cât mai aproape posibil pentru a echilibra scaunul cu roțile pe roțile din spate, permițând roților din față să se ridice de la sol cât de mult este necesar. Coborâți încet de pe obstacol coborând roțile din față pe sol.



Îngrijitorul și utilizatorul coboară de pe bordură/obstacol

Înclinați scaunul cu roțile înapoi folosind pedala, permițând roților din față să se ridice de la sol atât cât este necesar.




Coborâți încet de pe obstacol coborând roțile din față pe sol.

Utilizatorul conduce cu spatele pe o bordură/obstacol

(Vă sfătuim să nu utilizați această metodă dacă înălțimea obstacolului este mai mare de 10 cm)

Apropiați scaunul până la margine, cât mai aproape posibil.
Coborâți din prag foarte încet, aplecându-vă în același timp în față

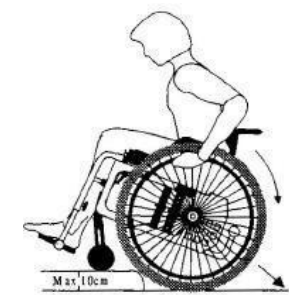

Atenționare! Această operațiune poate fi periculoasă; ea poate duce la răsturnarea scaunului cu roțile.

Îngrijitorul și utilizatorul coboară de pe bordură/obstacol în marșarier.

Conduceți scaunul înapoi spre obstacol, cât mai aproape posibil de margine. Coborâți foarte încet în timp ce înclinați scaunul pe roțile în spate, până când roțile din față sunt în afara drumului. Coborâți încet scaunul pe roțile din față.



Urcarea pe pante

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos atunci când conduceți pe pante:

- Evitați schimbările de direcție
- Încercați să mergeți în linie dreaptă. Nu vă întoarceți în lateral.
- Nu ezitați să cereți ajutor pentru a evita riscurile inutile.
- Când urcați o pantă, aplecați-vă înainte pentru a muta centrul de greutate în față, ceea ce va face scaunul mai stabil.
- Când conduceți la vale, aplecați-vă pe spate pentru a muta centrul de greutate în spate, ceea ce va face scaunul cu roțile mai stabil.
- Controlați-vă viteza folosind tracțiunea roților din spate, nu folosiți frânele scaunului cu roțile.

Urcarea, coborârea scărilor

Atenționare! Cereți întotdeauna ajutorul altor persoane. Scaunul cu roțile trebuie să fie transportat de cel puțin 2 persoane care sunt apte și capabile să îndeplinească această sarcină.

Atenționare! Nu folosiți niciodată scările rulante într-un scaun cu roțile, nici singur, nici cu ajutorul altei persoane.



Urcarea scărilor:

Apropiati scaunul de scări astfel încât roțile din spate să atingă prima treaptă. Utilizați mâinile pentru a înclina scaunul înapoi. O a doua persoană ajută în același timp la prinderea părții superioare din față a cadrului scaunului cu roțile

ATENȚIONARE! Nu ridicați niciodată scaunul cu roțile apucându-l de suporturile pentru picioare.

Ridicați scaunul încet în sus, pas cu pas. După ultimul pas, trageți scaunul înapoi până când roțile din față sunt coborâte la podea. Participanții trebuie să utilizeze în principal forța musculară a picioarelor pentru a transporta scaunul cu roțile, evitând îndoirea excesivă și slăbirea mușchilor spatelui.

Coborârea scărilor:

Transportul scaunului cu roțile pe scări trebuie să se facă în același mod descris mai sus.

Transportul într-un autovehicul

Scaunul cu roțile ICON 30 FAF a trecut cu succes testele de impact în conformitate cu standardul internațional ISO 7176- 19.

Un scaun cu roțile poate fi utilizat ca opțiune de ședere într-un vehicul (de exemplu, autoturisme private, taxiuri sau vehicule de închiriat, concepute pentru a transporta pasageri cu handicap, autobuze, trenuri, metrouri etc.) odată ce a fost imobilizat corect și în siguranță.

Înainte de a utiliza scaunul ca scaun în vehicul, scoateți și fixați într-un loc adecvat (de ex. portbagaj) toate accesoriile care se pot desprinde în caz de accident.

Ar trebui respectate următoarele sfaturi.

Pasagerul trebuie să stea pe scaunul vehiculului și să utilizeze sistemul de siguranță al vehiculului ori de câte ori este posibil! Un scaun cu roțile poate fi utilizat ca scaun pentru vehicul numai dacă este montat cu fața spre direcția de mers în interiorul vehiculului. Atât utilizatorul, cât și echipamentul trebuie să fie corect imobilizați în conformitate cu standardele europene relevante atunci când scaunul cu roțile este utilizat ca opțiune de ședere în vehicule în mișcare. Funcția poate fi utilizată în siguranță numai în vehicule special dedicate și pregătite.

ATENȚIE! Scaunul cu roțile este conceput pentru a fi utilizat ca scaun într-un autovehicul cu fața spre direcția de mers. Scaunul cu roțile nu poate fi montat invers. Nerespectarea regulilor de mai sus implică un risc ridicat de accidente grave, răni și daune materiale.

ATENȚIE! Numai utilizatorii care cântăresc între 75 și 125 kg trebuie să utilizeze un scaun cu roțile ca scaun într-un autovehicul.

Punctele de pe cadrul scaunului cu roțile în care trebuie ghidate chingile de ancorare sunt marcate cu simboluri speciale (după cum se arată în figură).



Utilizatorul trebuie să fie bine așezat și imobilizat pe scaunul cu roțile folosind centurile de siguranță speciale ale vehiculului.

Scaunul cu roțile în sine trebuie să fie imobilizat cu ajutorul unor curele speciale concepute în acest scop, așa-numitele WTORS (sistem de imobilizare a scaunului cu roțile și a pasagerului). Pentru fixarea scaunului cu roțile pe podeaua vehiculului trebuie utilizate numai sisteme de curele conforme cu ISO 10542-1:2012

Cele 4 opritori trebuie să fie fixate în colțurile inferioare din față și din spate ale cadrului principal, așa cum se arată în imaginile de mai jos, fixate pe podeaua vehiculului și strânse complet.

ATENȚIE: Centurile de siguranță tipice pentru scaunele cu roțile nu sunt centuri de siguranță pentru autovehicule și nu pot fi utilizate ca sistem de reținere în siguranță pentru utilizator în vehiculele în mișcare. Producătorul nu este responsabil pentru imobilizarea incorectă a scaunului cu roțile sau a utilizatorului în timpul transportului vehiculului.


Pregătirea scaunului pentru transport și fixarea acestuia în vehicul:

- 1) Așezați scaunul cu roțile în vehicul cu partea din față orientată spre fața vehiculului (în direcția de deplasare).
- 2) Îndepărtați cotierele (protejați-le în autovehicul în timpul călătoriei, astfel încât să nu se desprindă și să rănească pasagerii în caz de coliziune), roțile din față orientate înainte spre direcția de deplasare, îndepărtați perna scaunului, ridicați spătarul cât mai mult posibil în sus.
- 3) Scaunul cu roțile trebuie să fie fixat în vehicul cu ajutorul unui sistem de fixare în 4 puncte care respectă ISO 10542 partea 2, SAE 2249 sau DIN 75078/2.
- 4) Șoferii și/sau asistenții vehiculelor trebuie să fie pe deplin instruiți în ceea ce privește utilizarea sistemelor de fixare a scaunelor cu roțile și a pasagerilor.
- 5) Cele două suporturi frontale trebuie fixate în colțurile inferioare stânga și dreapta ale cadrului, situate deasupra fiecărui suport pentru furca roții din față.
- 6) Cele două elemente de fixare din spate trebuie atașate la colțurile inferioare stânga și dreapta ale cadrului, situate sub axul roții din spate.
- 7) După montarea și reglarea sistemului de fixare a scaunului cu roțile, trebuie aplicate frânele de parcare ale scaunului cu roțile.




Montarea sistemului de reținere/fixare a pasagerilor:

- 1) Utilizatorul scaunului cu roțile trebuie să fie protejat cu o centură de siguranță omologată a vehiculului.
- 2) Pentru ca centura pasagerului să poată fi fixată corect, scoateți mai întâi ambele suporturi pentru brațe.
- 3) Centura subabdominală a pasagerului trebuie să fie direcționată în jos peste pelvis, evitând contactul cu abdomenul pasagerului. Ghidajul centurii subabdominale trebuie să treacă spre dreapta peste punctul de joncțiune al cadrului scaunului și al spătarului de pe părțile stângă și dreaptă ale scaunului cu roțile.

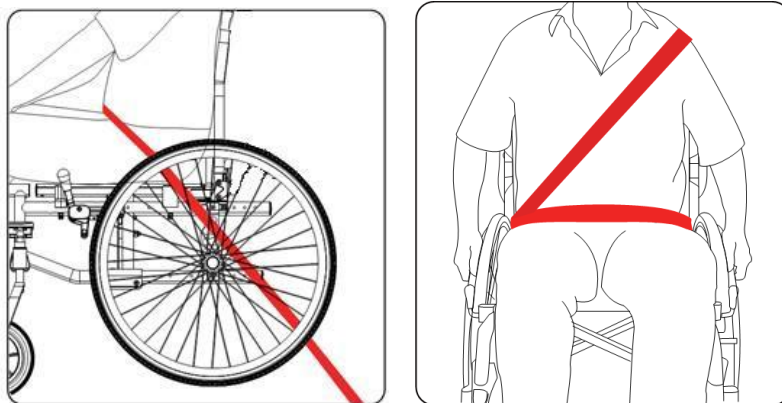

ATENȚIE: Centura transversală nu trebuie să fie ținută departe de corp de componente sau părți ale scaunului cu roțile, cum ar fi roțile. Exemple de fixare necorespunzătoare a centurilor sunt prezentate în figurile de mai jos.

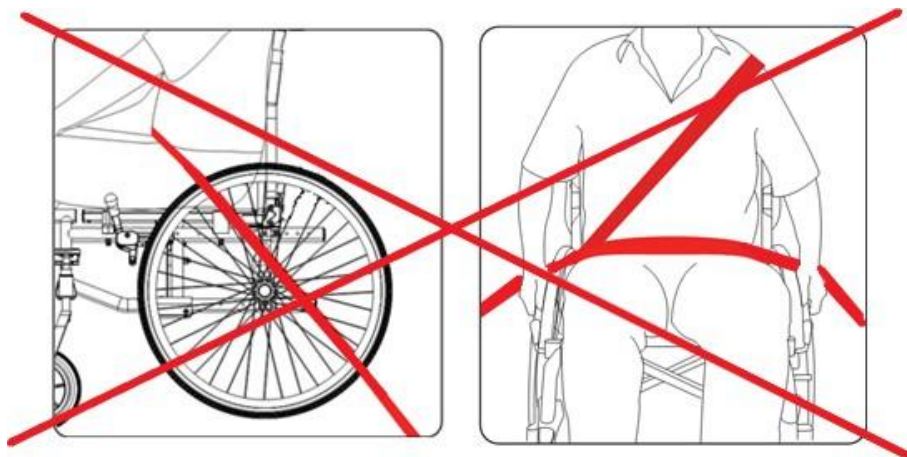

ATENȚIE: Centura nu trebuie să fie răsucită în timpul utilizării.

- 4) Unghiul centurii subabdominale ar trebui să fie în zona optimă de 30° până la 75° față de podea.
- 5) Centura transversală a pasagerului trebuie strânsă astfel încât să se potrivească perfect fără a provoca disconfort pasagerului.
- 6) Centura de umăr a sistemului de reținere a pasagerilor trebuie fixată pe o parte de peretele lateral al vehiculului la o înălțime care să asigure că cureaua centurii de siguranță se află în mijlocul umărului pasagerului și apoi în mijlocul pieptului pasagerului.
- 7) Pe cealaltă parte a scaunului cu roțile, centura de umăr trebuie să fie dirijată direct peste centura transversală și fixată de podeaua vehiculului.

ATENȚIE: Atunci când atașați sistemul de siguranță pentru pasageri, trebuie să aveți grijă să poziționați catarama centurii de siguranță astfel încât butonul de eliberare să nu fie atins de componentele scaunului cu roțile în timpul unui accident.

ATENȚIE: Pentru a respecta reglementările în vigoare, trebuie utilizată numai o curea de umăr atașată la partea laterală a vehiculului pentru a fixa pasagerul în mod corespunzător.

ATENȚIE: Nu utilizați niciodată un scaun cu roțile ca scaun într-un vehicul dacă acesta a fost implicat într-un accident.

7. Curățarea și dezinfectia

Cadru

Cadru trebuie curățat cu o cârpă umedă sau, alternativ, cu un detergent moale. Apoi, ștergeți cu o cârpă uscată. Cadru trebuie inspectat în mod regulat pentru a depista eventualele deteriorări ale vopselei care pot prezenta semne de fisurare a cadrului. Dacă există deteriorări vizibile ale cadrului (fisuri, defecte de vopsea etc.), adresați-vă dealerului local pentru diagnosticare și service.

Tapițerie

Scaunul și spătarul sunt realizate din nailon ranforsat foarte rezistent. Tapițeria scaunului poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor din tuburile cadrului. Tapițeria spătarului poate fi îndepărtată prin deșurubarea șuruburilor din tuburile spătarului. Tapițeria scaunului și a spătarului poate fi spălată cu un burete și săpun ușor. Murdăria obișnuită de pe piesele din metal și plastic poate fi îndepărtată cu produse de curățare standard și un burete sau o cârpă moale. Verificați informațiile detaliate despre produs și utilizați numai detergenți disponibili în comerț care sunt adecvați pentru curățare și dezinfecție (fără solvenți sau abrazivi).

Dezinfecție

Pentru dezinfecție, contactați vânzătorul, pentru a vă asigura că aceasta este efectuată de un personal calificat. Cu toate acestea, pentru uz individual, recomandăm utilizarea dezinfectanților disponibili în general fără clor sau fenol. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dezinfectanților.

8. Service și întreținere

În ciuda construcției sale robuste și a utilizării de materiale rezistente, produsul este supus uzurii. Prin urmare, este recomandabil ca un profesionist să verifice produsul la intervale regulate.

Pentru întreținerea de bază, este suficient un set de chei tubulare, o cheie reglabilă, o șurubelniță plată și o șurubelniță în cruce.

Următoarele elemente trebuie verificate în mod regulat

<i>Elementul</i>	<i>Tipul de control</i>	<i>Frecvență</i>
Anvelope	Verificați presiunea în anvelope (2,0-2,2 bar), banda de rulare și starea anvelopelor. Presiunea în ambele anvelope trebuie să fie la același nivel. Anvelopele mai umflate asigură o manevrabilitate și o deplasare mai bune, dar reduc confortul pe suprafețe accidentate	Cel puțin o dată pe săptămână
Verificați roțile din față	Verificați dacă șuruburile sunt strânse corect. Slăbirea furcii din față poate cauza deteriorări, ruperea șuruburilor care pot provoca un accident, verificați și îndepărtați murdăria, părul de pe axele roților din față.	Cel puțin o dată pe săptămână
Spîțe	Verificați dacă nu există spîțe slăbite care pot cauza deformarea roții. Dacă observați o defecțiune, contactați centrul de service.	Dacă apare o problemă
Verificați axele roților	Verificați să nu fie murdare. Îndepărtați toate impuritățile	Dacă este necesar
Janta roții	Verificați dacă există deformări și uzură. Acestea pot duce la mutilarea mâinilor.	Dacă este necesar
Frâne	Puterea de frânare depinde de presiunea din anvelope. Performanța frânelor poate fi afectată și de murdăria acumulată pe anvelope. Frânele trebuie să fie lipsite de murdărie, care poate fi îndepărtată cu o cârpă umedă. Lubrifiați componentele interne ale frânei. Verificați poziția orizontală a frânei.	Cel puțin o dată pe săptămână
Cadru	Este recomandabil să păstrați cadrul curat pentru a controla mai bine uzura și ruperea	Cel puțin o dată pe lună sau în funcție de necesități.
Roți pivotante	Spațiul dintre furci și roți trebuie să fie întotdeauna curat. Nerespectarea acestei reguli poate duce la o uzură mai rapidă a roților. Pentru a le curăța, roțile trebuie să fie desprinse de pe furci, curățate și fixate la loc.	Cel puțin o dată pe lună sau în funcție de necesități.
Piese libere	Verificați dacă există piese libere ale scaunului. Dacă observați șuruburi slăbite - strângeți-le.	O dată pe lună

Probleme frecvente și soluții

Dacă observați anomalii în funcționarea scaunului cu roțile, nu îl utilizați - trebuie să contactați punctul de vânzare local sau departamentul de service al furnizorului de scaune cu roțile. Producătorul nu garantează funcționarea corectă a scaunului cu roțile dacă sunt utilizate piese neoriginale.

<i><u>Problemă</u></i>	<i><u>Motivul posibil</u></i>	<i><u>Ce trebuie să faceți?</u></i>
Scaun înclinat pe o parte	• Una dintre roți poate fi deformată	• Umflați anvelopa (2,0-2,2 bar). • Verificați dacă scaunul este încărcat uniform
Scaunul este greu de împins	• Măsurați presiunea în anvelope • Axele roților din față sunt murdare • Prea multă greutate pe roțile din față	• Umflați anvelopele (2,0-2,2 bar). • Îndepărtați murdăria. • Echilibrați greutatea.
Scaunul cu roțile și-a pierdut capacitatea de manevră	• Măsurarea presiunii în anvelope. • Roțile din față sunt prea strânse • Axele roților din față sunt murdare	• Umflați anvelopele (2,0-2,2 bar). • Verificați și, dacă este necesar, slăbiți roțile prea strânse. • Îndepărtați murdăria și curățați roțile din față
Frânele nu funcționează bine	• Măsurați presiunea în anvelope	• Umflați anvelopele (2,0-2,2 bar).
Dificultate în plierea și desfășurarea scaunului	• Tapițeria este prea comprimată • Mecanismul de pliere a spătarului este murdar.	• Corectați tensiunea curelelor care susțin tapițeria. Scoateți perna scaunului. • Curățați cadrul și ungeți piesele mobile.
Scaunul și-a pierdut stabilitatea	• Măsurați presiunea în anvelope • Componentele scaunului nu sunt asamblate corect.	• Umflați anvelopele (2,0-2,2 bar). • Verificați dacă toate șuruburile de fixare sunt suficient de strânse.
Anvelopă perforată	• Posibilă perforare a unei camere de anvelopă • Camere de aer și anvelope uzate.	• Contactați cel mai apropiat dealer de scaune cu roțile sau centru de service pentru biciclete pentru a repara sau înlocui camerele și anvelopele deteriorate

Pentru a rezolva orice defecțiuni, contactați un centru de service. Producătorul nu garantează utilizarea corectă a scaunului cu roțile în cazul în care reparațiile sunt efectuate folosind piese neoriginale sau de către un centru de service neautorizat.

ATENȚIE! Reparațiile efectuate de centre de service nespecializate pot duce la pierderea garanției.

Centre de service autorizate

Pentru a afla care este cel mai apropiat centru de service autorizat, contactați vânzătorul sau producătorul echipamentului.

ATENȚIE! Vă recomandăm să încredințați întreținerea scaunului dvs. cu roțile numai centrelor de service autorizate.

Trimiterea scaunului cu roțile sau a componentelor acestuia la service

Dacă aveți nevoie de repararea scaunului, vă rugăm să contactați centrul de service sau magazinul de unde ați achiziționat scaunul.

Dacă reparația necesită trimiterea pieselor înapoi la centrul de service, acestea trebuie protejate corespunzător. În acest scop, se recomandă ca ambalajul original să fie păstrat și trimis la service de către compania de transport a producătorului scaunului.


ATENȚIE! Producătorul nu este responsabil pentru daunele de transport rezultate din ambalarea necorespunzătoare a scaunului sau a pieselor sale.

Eliminarea și reciclarea produsului

Scaunul cu roțile trebuie eliminat în conformitate cu reglementările legale locale și naționale aplicabile. Pentru eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a pieselor metalice ale cadrului, a plasticului și a componentelor materiale, contactați companiile locale de reciclare sau eliminare sau vânzătorul autorizat.

Transport și depozitare

Recomandări pentru transport

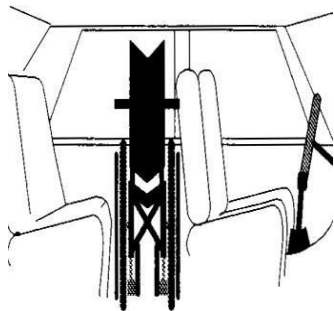

ICON 30FAF este ușor de transportat. Acesta poate fi pliat și demontat pentru a reduce dimensiunea și greutatea. Este posibilă îndepărtarea roților, plierea scaunului conform descrierii anterioare.

Atenționare! Un scaun cu roțile nu este un scaun auto. Este interzis să stați într-un scaun cu roțile atunci când călătoriți în vehicule. Scaunul trebuie să fie pliat și fixat pentru transport.

Depozitare

Depozitați echipamentul într-un loc uscat la temperaturi de peste 0°C. Scaunul poate fi pliat pentru a reduce spațiul necesar pentru depozitare. Roțile din spate pot fi, de asemenea, detașate pentru a economisi și mai mult spațiu. Temperaturile scăzute sau umiditatea pot deteriora anvelopele, țesăturile, axele, rulmenții și alte componente ale produsului. Pentru a proteja anvelopele de deformare pe o perioadă îndelungată de depozitare, este recomandabil să așezați scaunul pe cadru folosind suporturi. De asemenea, este recomandabil să acoperiți scaunul pentru a-l proteja de praf și murdărie.

10. Reutilizare

Acest dispozitiv medical poate fi reutilizat de un alt utilizator dacă utilizatorul anterior al produsului nu mai are nevoie de el. Înainte de a fi utilizat din nou, dispozitivul trebuie să fie verificat și dezinfectat cu atenție de către personalul tehnic autorizat al distribuitorului.

Pașii care trebuie urmați înainte de pregătirea scaunului cu roțile pentru un nou utilizator:

- Verificați stabilitatea echipamentului,
- Verificați strângerea șuruburilor și a piulițelor,
- Verificați gradul de uzură al tapițeriei și înlocuiți-o dacă este necesar.
- Verificați starea roților și rulmenților și în caz de necesitate înlocuiți-le.
- Verificați eficiența și starea frânelor.

Dacă oricare dintre componentele de mai sus sunt deteriorate sau rupte, acestea trebuie înlocuite cu unele noi. Se recomandă în special instalarea de roți noi pentru fiecare utilizator nou al echipamentului. Toate șuruburile și piulițele slăbite trebuie strânse. Produsul trebuie curățat și dezinfectat temeinic.

ATENȚIONARE! Este interzisă utilizarea din nou a scaunului cu roțile dacă cadrul este îndoit sau rupt

Fiecare utilizator nou trebuie să primească un dispozitiv cu instrucțiuni de utilizare.

11. Condiții de garanție

Informații despre garanție

- Producătorul oferă o garanție de 24 luni de la data achiziției.
- În timpul perioadei de garanție, producătorul va înlocui gratuit toate componentele defecte cauzate de un defect de fabricație.
- Defectele rezultate din utilizarea normală a echipamentului nu fac obiectul reparațiilor de garanție. Acestea includ uzura anvelopelor, tapițeriei, spițelor, vopselei etc.
- De asemenea, toate defectiunile mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare a scaunului cu roțile nu fac obiectul reparațiilor de garanție.
- Orice modificare structurală a scaunului va anula garanția.
- Dacă observați orice deteriorări trebuie să contactați imediat vânzătorul.

Responsabilitățile producătorului

- Garanția nu acoperă costurile de transport.
- Garanția nu acoperă daunele mecanice sau daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a scaunului.
- Garanția nu acoperă daunele cauzate de imposibilitatea de a utiliza produsul.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din nerespectarea recomandărilor și neînțelegerea instrucțiunilor de utilizare.

Modificări structurale și instalarea de elemente suplimentare

- Această definiție se referă la orice scaun cu roțile care a fost modificat și care diferă de detaliile prezentate în acest manual sau dacă la produs sunt atașate componente suplimentare care nu sunt furnizate de producător. Dacă echipamentul a fost modificat în modul de mai sus de către utilizator fără o autorizație scrisă din partea producătorului, acesta nu este conform cu cerințele de bază CE și nu va fi acoperit de garanție.
- În caz de îndoieli, vă rugăm să contactați producătorul

12. Parametri tehnici

Datele tehnice vor varia în funcție de dimensiunea cadrului ales și de modul în care este poziționat scaunul cu roțile (roțile din față și din spate). Cifrele din tabel se referă la o lățime a scaunului de 40 cm și o adâncime a scaunului de 40 cm. Toate măsurătorile sunt în centimetri (cm) pentru distanță și kilograme (kg) pentru greutate, dacă nu se specifică altfel.

	ICON 30FAF
Bară în cruce pliabilă	1X1
Lățimea scaunului [cm]	40 (45)
Adâncimea scaunului [cm]	40 (45)
Sarcina maximă [kg]	125
Lungimea scaunului cu roțile [cm]	91/89/87 (96/94/92)
Înălțimea scaunului cu roțile [cm]	83, 86
Lățimea scaunului cu roțile [cm]	63 (68)
Înălțimea scaunului cu roțile după asamblare - 60,5 cm.	83
Lățimea scaunului cu roțile după asamblare [cm]	35
Greutatea totală [kg]	13,6
Înălțimea scaunului - față [cm]	48,5
Înălțime spătar [cm]	31
Unghi suport pentru picioare [°]	70°/80°/90°
Intervalul de înălțime a cotierelor [mm]	22,5; 25; 25,5; 27; 28,5
Roți spate “	24”
Roți față “	5”(6”, 7”)

* Dimensiune standard = 40 cm lățime scaun

13. Configurarea și ajustările scaunului cu roțile

13.1 ICON 30FAF Introducere

ICON 30FAF are mai multe setări ale axului din spate pentru configurații de tracțiune autopropulsate și pentru îngrijitori, cu dimensiuni diferite ale roților.

În funcție de nivelul de activitate al utilizatorului, pot fi selectate diferite grade de stabilitate în plan sagital (sau „rostogolire”).

Unghiul roților din față este reglabil, permițând o combinație largă de înălțimi și unghiuri ale scaunului pentru a se potrivi tuturor utilizatorilor de scaune cu roțile.

NOTĂ - Schimbarea poziției axelor din față și spate sau a diametrului roților trebuie efectuată numai de către un personal calificat sau service. Pentru instrucțiuni detaliate, contactați Rehasense sau vânzătorul pentru întrebări legate de service

SETĂRILE INCORECTE POT FACE SCAUNUL CU ROTILE INSTABIL ȘI POT PUNE ÎN PERICOL UTILIZATORUL. CONTACTAȚI ÎNTOTDEAUNA DEALERUL DACĂ SUNT NECESARE MODIFICĂRI.

Setări cadru


Designul cadrului permite reglarea unghiului și înălțimii scaunului, precum și diferite grade de stabilitate prin ajustarea centrului de greutate al scaunului cu roțile în raport cu poziția axului roții din spate.

- Mutarea axului mai aproape de centrul de greutate face scaunul mai ușor de răsturnat și mai „receptiv” pentru utilizatorii activi de scaune cu roțile.
- Deplasarea axului mai departe de centrul de greutate al scaunului cu roțile reduce probabilitatea de răsturnare și este potrivită pentru utilizatorii care au nevoie de stabilitate și siguranță mai mare.

Designul cadrului permite reglarea unghiului și înălțimii scaunului. Setările includ:-


- unghiul și/sau înălțimea scaunului prin trecerea la o roată față și/sau o roată spate cu un diametru diferit
- unghiul scaunului prin modificarea poziției roților din spate.
- Unghiul axului frontal al furcii pentru a-l aduce perpendicular pe podea.

Reglarea roții din spate

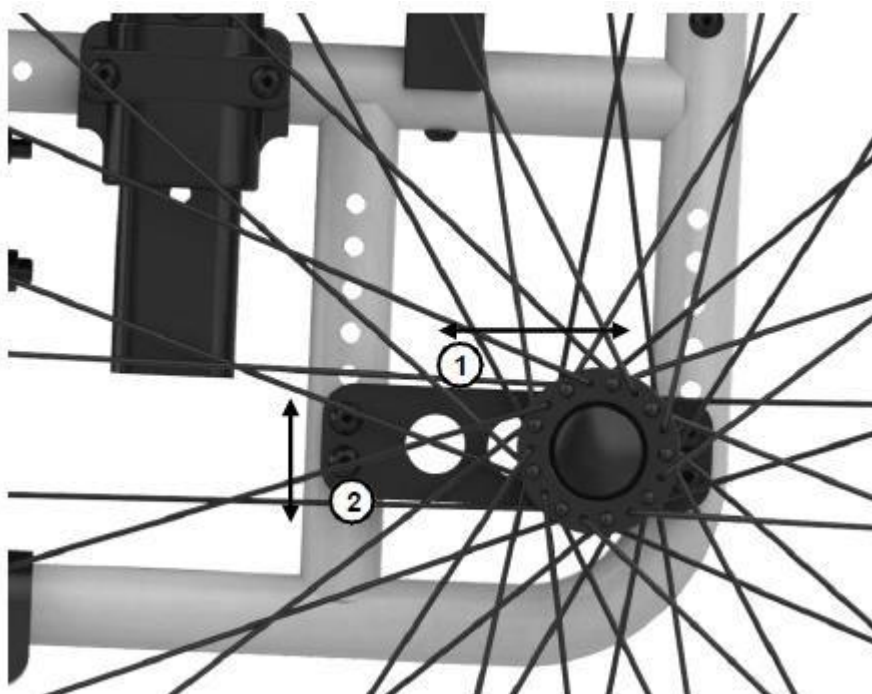

- Pentru a re poziționa roata din spate, deconectați bucșa de roată **(1)** de la orificiul din placa neagră de montaj și introduceți bucșa în alt orificiu disponibil din placă, păstrând șaibele și piulițele în ordinea corectă.
- Dacă este necesar un interval mai mare de reglaje, scoateți cele 4 șuruburi **(2)** care fixează placa neagră de montaj pe tubul cadrului, deplasați placa în sus sau în jos până la poziția necesară, apoi reintroduceți și înșurubați cele 4 șuruburi în noua poziție.

Reglare roata pivotantă față

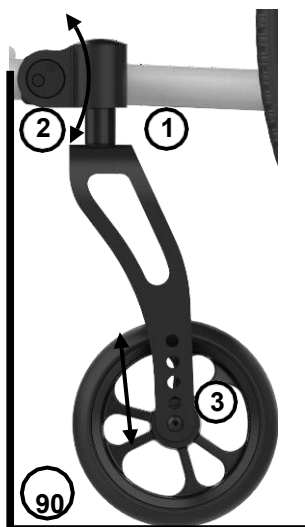

În cazul modificării poziției sau dimensiunii roților din spate sau din față, poate fi necesară ajustarea unghiului roților pivotante pentru a evita „fluturarea roților” și a asigura conducerea lină și dreaptă.

Capul ansamblului furcii față **(1)** trebuie să fie întotdeauna așezat la un unghi de 90° față de podea. După modificarea poziției roților este necesar să se ajusteze acest unghi.

Pentru a regla unghiul furcii din față:

- Desfaceți șuruburile **(2)**. Reglați ansamblul frontal al furcii astfel încât axa verticală a carcsei rulmentului **(1)** să fie la un unghi de 90° față de podea
- Strângeți din nou șuruburile.

Pentru a modifica înălțimea scaunului, puteți monta roțile din față în diferite poziții **(3)**. (Această fotografie utilizează o furcă față cu 5 poziții diferite). Orificiile diferite permit, de asemenea, montarea roților din față cu diametre diferite.

ATENȚIONARE! Toate reglajele de mai sus trebuie efectuate numai de către un personal calificat sau urmând sfatul unui fizioterapeut. Instrucțiunile detaliate se găsesc în manualul de service.

13.2 Informații generale

13.2.1 Roți

Roți din spate

În funcție de comandă, scaunul cu roțile poate fi echipat cu roți spate cu diametrul de 12", 16" sau 24". Roțile pot avea anvelope pneumatice sau anvelope PU rezistente la perforații. Alte dimensiuni și tipuri de roți sunt disponibile la cerere. Roțile de 24" vin standard cu jante dedicate. Roțile echipate cu roți mai mici (12" sau 16") pot fi utilizate numai cu ajutorul unui îngrijitor/asistent.

Ax cu atașare rapidă

În funcție de specificațiile comenzii, roțile din spate pot fi echipate cu axe cu atașare rapidă pentru instalarea sau demontarea rapidă a roților din spate.



Pentru a scoate roata din cadru:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare (1) și scoateți roata din bușă

Pentru a atașa din nou roata,

- Puneți capătul axului în bușă (2), apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare (1), împingeți axul până la capăt în bușă și eliberați butonul.
- Încercați să scoateți roata din bușă pentru a verifica dacă este bine blocată.

ATENȚIE!

Aveți grijă la degete atunci când atașați sau îndepărtați roțile. Nu introduceți degetele între spițe sau între anvelope și nu împingeți jantele.

ATENȚIE!

Aveți grijă la degete atunci când propulsați scaunul. Nu introduceți degetele între spițe sau între anvelope și nu împingeți jantele. Pentru a vă proteja degetele, puteți utiliza protecții pentru spițe disponibile ca accesoriu.

13.2.2 Frâne

Frâna de parcare



Frâna acționată (scaunul cu roțile nu rulează)



Frână eliberată (scaunul cu roțile poate rula).

- Pentru a acționa frâna, trageți maneta de frână înapoi **(1)**. Acum roțile sunt blocate.
- Pentru a elibera frâna, împingeți maneta de frână înainte **(2)**. Acum roțile pot rula.
- Acționați întotdeauna frânele dacă scaunul cu roțile rămâne pe loc.
- Opiți întotdeauna frânele înainte de a vă deplasa într-un scaun cu roțile.

ATENȚIONARE! Acționați întotdeauna ambele frâne atunci când urcați sau coborâți din scaunul cu roțile

ATENȚIONARE! Frânele de parcare nu sunt destinate să încetinească un scaun cu roțile în mișcare. Acestea sunt dedicate exclusiv funcției de parcare.

ATENȚIONARE! Nu vă sprijiniți niciodată pe frână. Aceasta este concepută doar pentru funcția de parcare.

13.2.3 Suport picioare – 80 Grade

Suporturi standard pentru picioare

Fixarea cu șurub din aluminiu permite reglarea lungimii

- Suporturile pentru picioare sunt fixate pe cadru cu șuruburi.
- Suporturile pentru picioare sunt reglabile în lungime. Dacă scaunul cu roțile este utilizat în exterior, distanța minimă dintre suportul pentru picioare și sol trebuie să fie de aproximativ 4-5 cm.
- Pentru a facilita transferul către sau dintr-un scaun cu roțile, suporturile pentru picioare pot fi ușor ridicate **(A)**

ATENȚIE!!! Este interzis să stați pe suporturile pentru picioare. Risc de răsturnare





Pentru a îndepărta suportul pentru picioare:

- Scoateți șuruburile (1) și (2).
- Scoateți suportul din cadrul scaunului (3).

Pentru a seta diferite unghiuri ale suportului pentru picioare:

- Strângeți șurubul (1) și (2) pe cadru (3).
- Reglați carcasa rulmentului frontal (4) astfel încât să fie verticală față de podea.
- Asigurați-vă că suporturile pentru picioare dreapta și stânga sunt montate pe partea corectă a cadrului.

(6)

Pentru a regla lungimea suportului pentru picioare:

- Deșurubați șurubul și scoateți-l din țeavă (5).
- Reglați lungimea suportului pentru picioare prin deplasarea țevii inferioare în sus sau în jos și prin împerecherea găurilor din țeava interioară.
- Reintroduceți șurubul și strângeți-l.

x

Pentru a regla unghiul și adâncimea suporturilor pentru picioare:

- Slăbiți șurubul (7) și reglați unghiul suportului pentru picioare, apoi strângeți-l.
- Desfaceți șuruburile (8) de sub suportul pentru picioare și utilizați adâncimea prin deplasarea plăcii înainte sau înapoi.
- Strângeți șuruburile când sunt fixate.

13.2.4. Mânere pliabile



Mânerele sunt pliabile pentru împachetarea compactă a scaunului cu roțile.

Pentru a plia mânerul :

- Apăsăți butoanele (1), apoi pliați țeava mânerului orizontal astfel încât să fie paralel cu țeava spătarului (2).


Pentru a desfășura mânerul:

- Trageți-le în sus și se blochează automat în poziție. Butonul de blocare (1) va reveni în poziția sa inițială.

14. Accesorii

14.1. Cotiere

Cotiere tapițate (glisate)

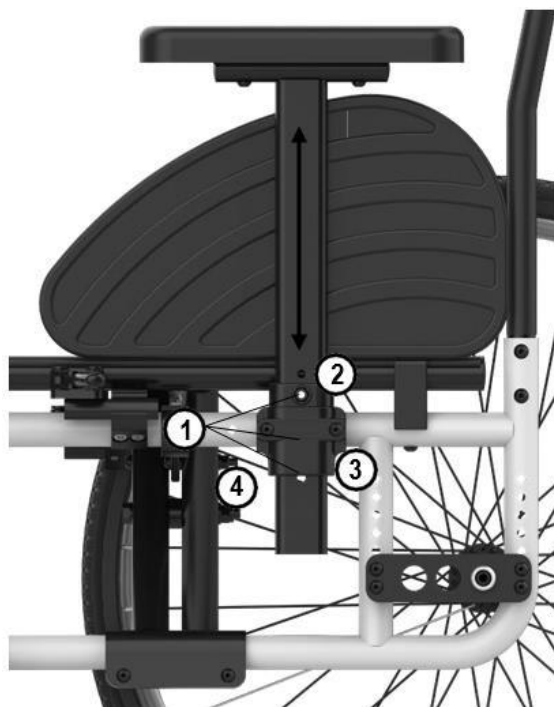

Cotierele sunt reglabile pe înălțime și pot fi îndepărtate pentru a facilita urcarea și coborârea din scaunul cu roțile.

Pentru a modifica înălțimea cotierei: Selectați una dintre găurile (1) situate în cotieră, introduceți șurubul (2) și strângeți-l.

Pentru a scoate cotiera din scaunul cu roțile:

Trageți-l în afară. Butonul de blocare (3) fixează cotiera împotriva îndepărtării accidentale. Apăsați acest buton astfel încât țeava cotierei să alunece din suport (4).

Pentru a asambla cotierele pe cadru: Introduceți capătul cotierei în suport, apăsați

butonul de blocare (3) și introduceți țeava. Cotiera se va opri în poziția șurubului setat

pentru a regla înălțimea cotierei.

ATENȚIE! Nu utilizați niciodată cotierele ca puncte de apucare în timpul ridicării și mutării unui scaun cu roțile.

14.2. Tetieră




Tetiera asigură o stabilizare suplimentară pentru capul și gâtul utilizatorului așezat în scaunul cu roțile.

Tetiera este fixată pe scaun folosind suporturi speciale (1) montate pe țevile spătarului și o bară transversală cu lățime reglabilă (3) pentru a se adapta la lățimea scaunului

ATENȚIE! Instalarea tetierei trebuie efectuată numai de către un service sau terapeut calificat.

Bară tetieră pentru mânere (1) fixată pe țevile spătarului se fixează folosind 2 cleme (2).

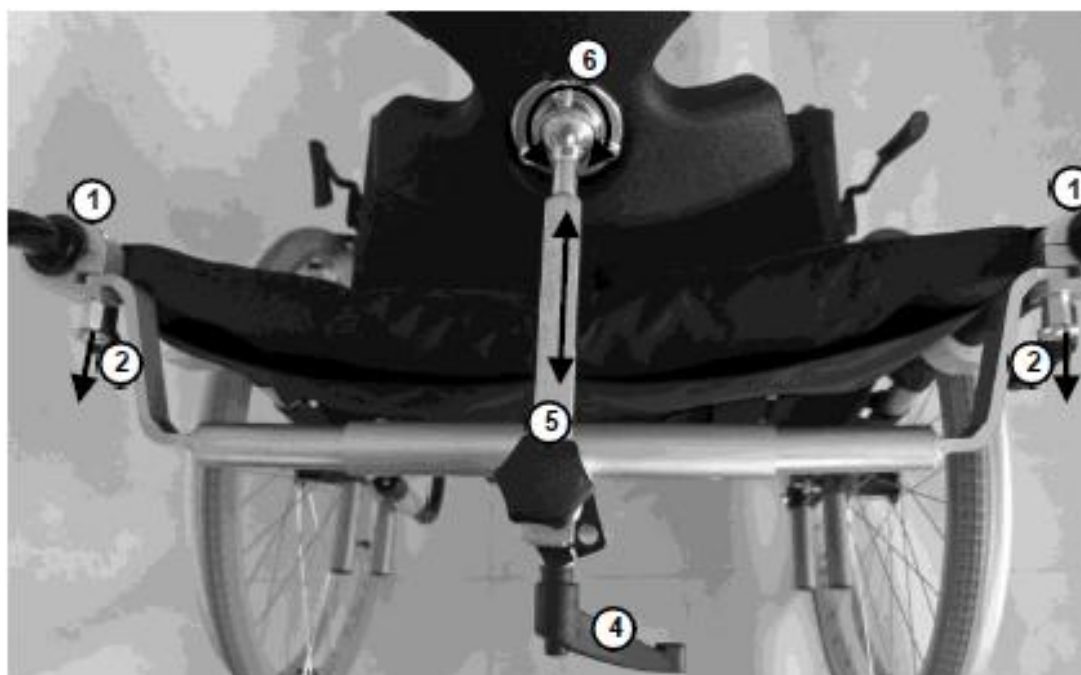

Pentru a scoate tetiera (de ex. pentru a asambla scaunul): trageți clema de fixare (2) și scoateți bara transversală a tetierei în sus. Repetați acțiunea pe cealaltă parte,

Pentru a monta tetiera procedați în ordinea inversă.

Este posibilă reglarea în adâncime, rotația și înălțimea tetierei, pentru a se adapta cât mai bine poziției și necesității.


Pentru a regla înălțimea tetierei:

- Slăbiți butonul **(4)** și reglați suportul vertical al tetierei la înălțimea necesară, apoi strângeți butonul. Pentru a regla adâncimea tetierei:
- Slăbiți butonul **(5)** și reglați suportul orizontal pentru tetieră la adâncimea necesară, apoi strângeți butonul.

Pentru a regla rotația tetierei, rotiți-o în jurul articulației **(6)** până când găsiți setarea optimă

ATENȚIE! Reglați întotdeauna tetiera atunci când utilizatorul stă pe scaunul cu roțile și se sprijină cu spatele pe spătar.

14.3. Mânere de împingere reglabile pe înălțime (accesoriu)

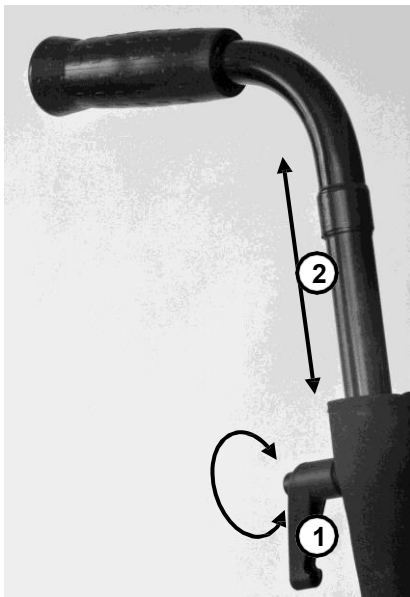

Mânerele de împingere pot fi ajustate pentru a se potrivi înălțimii persoanei care împinge scaunul.


ATENȚIE! Ambele mânere trebuie să fie setate la aceeași înălțime.

Pentru a modifica înălțimea mânerelor:

- Slăbiți maneta de fixare **(1)**.
- Ajustați mânerul **(2)** la înălțimea necesară.
- Apoi strângeți maneta de fixare **(1)**.
- Repetați pașii de mai sus pentru al doilea mâner.

14.4. Spătar cu unghi reglabil

Reglarea înclinării spătarului (arcuri cu gaz)

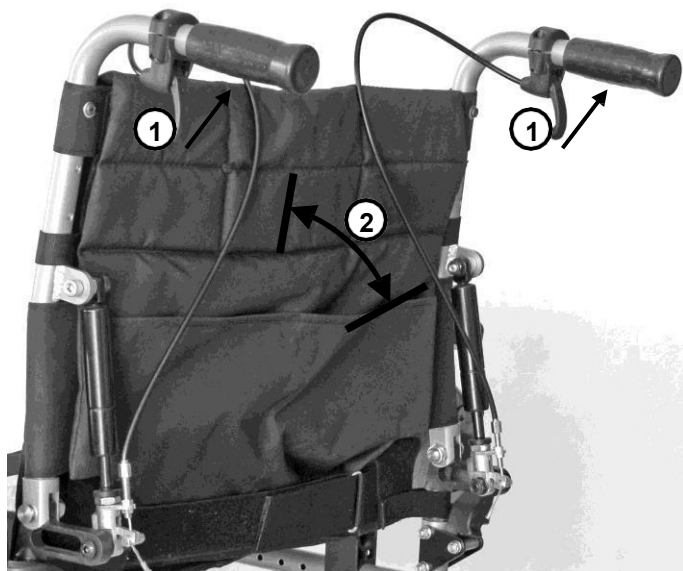

Este posibilă reglarea unghiului spătarului pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor utilizatorului.

Pentru a modifica înclinarea spătarului:


- Sprijinindu-vă mâinile pe mânerele de împingere, trageți manetele de reglare (1) cu degetele arătătoare în sus spre mânere.
- Țineți manetele în această poziție și deplasați spătarul în sus sau în jos (2) la poziția dorită.
- Eliberați ambele manete de control (1).

ATENȚIE! Apăsați și eliberați întotdeauna ambele manete în același timp și reglați unghiul ambelor țevi ale spătarului în același timp, astfel încât acestea să aibă aceeași înclinare după reglare.

ATENȚIE! Efectuați întotdeauna reglarea atunci când utilizatorul este așezat pe scaunul cu roțile și se sprijină cu spatele pe spătar.

ATENȚIE! Acționați întotdeauna frâna de parcare înainte de reglare

14.4 Bară de susținere

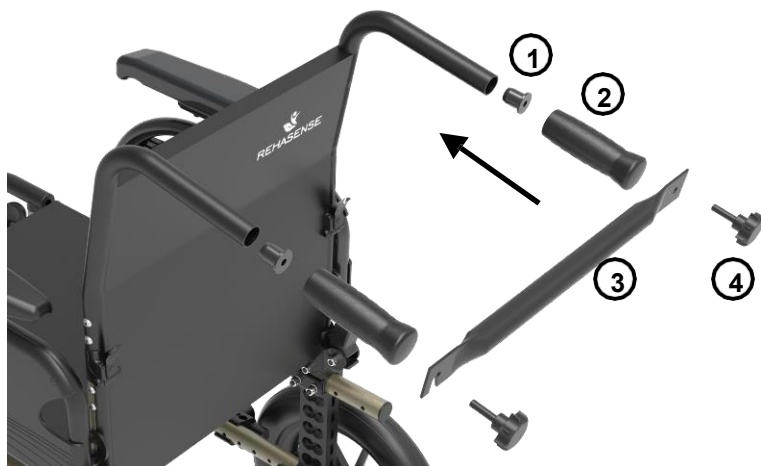

Bara de susținere/rigidizare este concepută pentru a consolida și stabiliza construcția spătarului.

Bara transversală este atașată la țevile spătarului cu ajutorul a 2 șuruburi.

ATENȚIE! Instalarea barei transversale trebuie efectuată numai de către un service sau un terapeut calificat.

Bara transversală este formată din două părți, care trebuie deconectate pentru a putea asambla scaunul. După desfășurarea din nou a scaunului, cele două jumătăți ale barei transversale trebuie să fie întotdeauna conectate înapoi între ele.



Instalarea barei de susținere

- Introduceți manșonul **(1)** în centrul țevii mânerului.
- Montați mânerul de cauciuc **(2)** și suportul **(3)**.
- Strângeți butonul

rotativ **(4)**. **Atenție:**



La instalarea barei transversale va exista o anumită rezistență, acest lucru este normal



Dezmembrarea barei transversale:

- Urmăriți instrucțiunile de mai sus numai în ordine inversă

14.5 Suporturi pentru trunchi

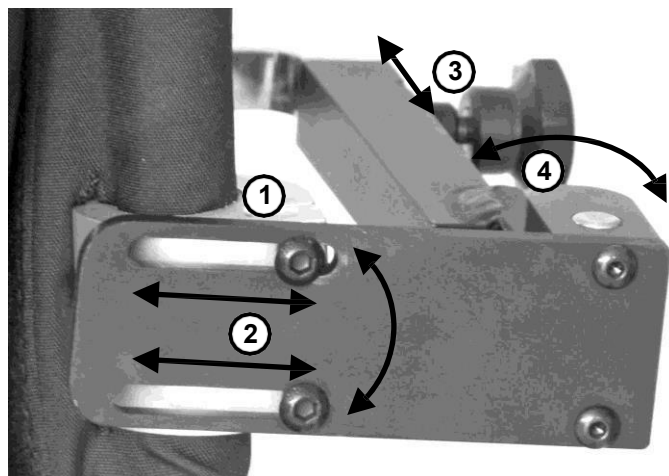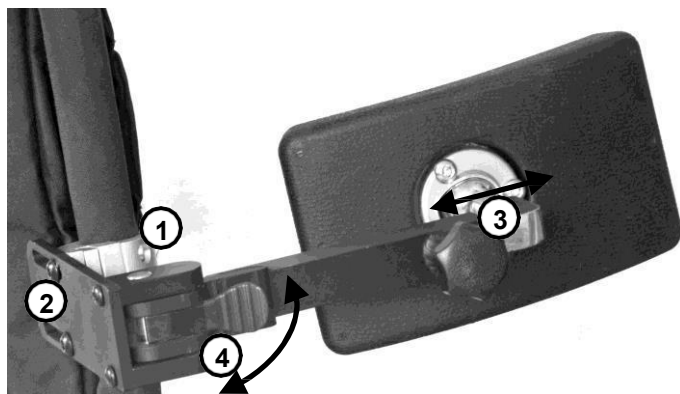

Suporturile pentru trunchi permit stabilizarea suplimentară a corpului utilizatorului așezat pe scaunul cu roțile.

Suporturile sunt fixate cu ajutorul unui suport special (1) montat pe țeava spătarului.

ATENȚIE! Instalarea suporturilor pentru trunchi trebuie efectuată numai de către un service sau terapeut calificat.

Suporturile sunt fixate pe mâner (1) cu ajutorul a 2 șuruburi (2).

Este posibilă ajustarea lungimii (extensiei), unghiului și distanței (lățimii) suporturilor pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor utilizatorului.

Pentru a modifica unghiul și/sau distanța suportului:

- Slăbiți șuruburile (2), mutați suportul în poziția dorită și strângeți șuruburile.

Pentru a seta extensia suportului:

- Slăbiți butonul de fixare (3), extindeți sau retrageți suportul în poziția necesară și strângeți butonul de fixare.

Pentru a facilita transferul utilizatorului în și din scaunul cu roțile, suporturile pentru trunchi pot fi ușor înclinate lateral. În acest scop:


- Apăsați butonul roșu de blocare (4) cu degetul și înclinați suportul lateral.
- Atunci când suportul este mutat înapoi în poziția sa inițială, acesta ar trebui să se fixeze singur în poziție.

ATENȚIE! Reglați suporturile ori de câte ori utilizatorul stă pe scaunul cu roțile și se sprijină cu spatele pe spătar.

14.6 Dispozitive anti-răsturnare

Acesta este un dispozitiv anti-înclinare suplimentar care crește stabilitatea scaunului și, astfel, siguranța utilizatorului. Acesta este recomandat în special pentru utilizatorii cu amputații ale membrelor inferioare, dar sugerăm cu tărie utilizarea lor de către toți utilizatorii.

AVERTISMENT! Asamblarea Dispozitivului de protecție împotriva răsturnării trebuie să fie fabricat numai de un service specializat sau un fizioterapeut cu experiență.

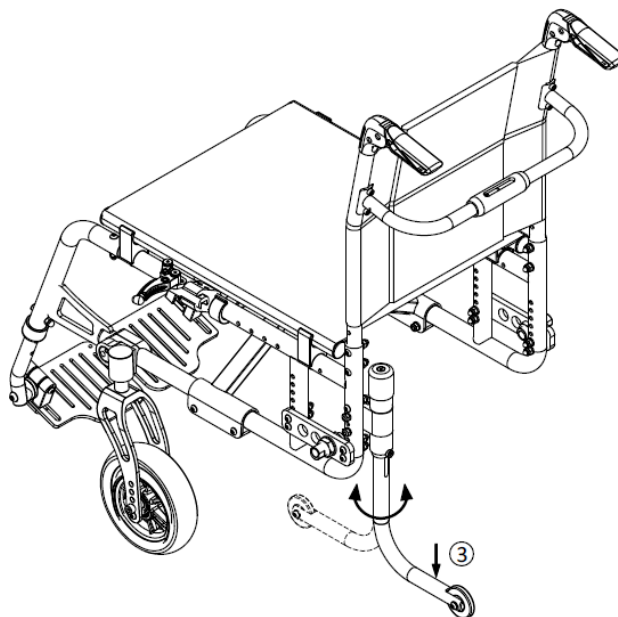

Dispozitivul anti-răsturnare este activ, când roata mică este orientată spre spate. Dacă este rotită sub cadrul scaunului, dispozitivul este inactiv.

Pentru a activa sau dezactiva dispozitivul anti-răsturnare, apucați tubul orizontal și trageți-l în jos.

Apoi răsuciți în jurul axei verticale către partea interioară a cadrului.

Apoi, trebuie eliberat tubul, care se blochează automat în poziție.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați producătorul sau distribuitorul local al produsului.

Fachhändler, Distributor:

--

Rehasense® Sp. z o.o.
Sulejowska 45G
97-300 Piotrków Trybunalski
Polonia

www.rehasense.com
info@rehasense.com