

**Instrucțiuni de utilizare pentru
fotoliu rulant special**

Recliner

**cu stabilizarea capului și a gâtului
VCWK703**

Ediția EJ 01.2022

**VITEA[®]
CARE**

CE



Cuprins

1. Introducere.....	3
2. Descrierea produsului.....	3
3. Recomandări de utilizare.....	6
4. Contraindicații	6
5. Utilizare.....	6
6. Siguranța în utilizare - ATENȚIONARE!	10
7. Utilizare zilnică și întreținere.....	11
8. Parametri tehnici.....	19
9. Simboluri.....	19
10. Date de contact.....	20

VĂ RUGĂM CA ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRODUSULUI SĂ CITIȚI ÎN
ÎNTREGIME MANUALUL DE UTILIZARE

1. Introducere

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Suntem convinși că vă va satisface așteptările. Vă rugăm să citiți acest document înainte de prima utilizare. Acest manual a fost realizat pentru a oferi informațiile necesare privind utilizarea în siguranță a dispozitivului. Respectarea întocmai a recomandărilor va contribui în mod semnificativ la prelungirea duratei de viață și păstrarea aspectului estetic al produsului. Dorim să subliniem că îmbunătățim constant calitatea produselor noastre, prin urmare pot exista modificări minore, care nu sunt incluse în acest manual.

2. Descrierea produsului



Ilustrația nr. 1.

1. Spătar înălțat (opțional)
2. Suport pentru cap
3. Mâner pentru însoțitor
4. Manetă pentru ajustarea unghiului de înclinare al spătarului
5. Cadru spătar
6. Roți spate
7. Inel metalic de antrenare
8. Clemă ax spate
9. Manetă de conectare rapidă
10. Frâne

11. Roți anti răsturnare
12. Furcă roată față
13. Roată față
14. Scaun impermeabil (nylon)
15. Cotiere detașabile
16. Măsuță
17. Protectorul lateral al cotierei
18. Tija de stabilizare a mesei
19. Pernă șezut
20. Cadru scaun
21. Manetă pentru coborârea/
ajustarea suportului pentru
picioare
22. Manetă frână
23. Cadru încrucișat
24. Sprijin pentru gambe
25. Platformă pentru tălpi

Componentele fotoliului, aflate în pachetul livrat:



Foto 2. Extensie spătar




Foto 3. Suport
pentru cap



Foto 4. Pernă șezut



Foto 5. Cotiere detașabile

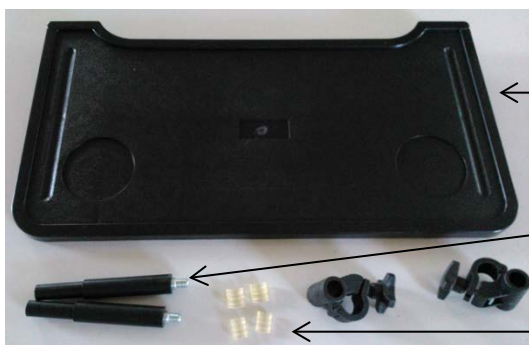

← Tavă
(măsuță)

← Două picioare

← Două cleme

← șaibe

Foto 6. Tavă cu elementele pentru
montare



Foto 7. Două suporturi pentru
picioare



Foto 8. Fotoliu rulant



Foto 9. Role anti-răsturnare

3. Recomandări de utilizare

Fotoliul rulant a fost conceput pentru transportul persoanelor cu dizabilități, de ex. persoanelor care au suferit leziuni la nivelul coloanei vertebrale; paralizii cerebrale, afecțiuni neuromusculare, diverse leziuni ale membrelor inferioare, traumatisme cranio-cerebrale, sau pentru vârstnici. Totodată, este destinat și persoanelor care doresc să aibă o viață activă și confortabilă.

4. Contraindicații

Nu se recomandă persoanelor cărora este contraindicată poziția în șezut, celor cu afecțiuni care ar necesita stabilizarea părții superioare a coloanei și a capului. A nu se lăsa pacienții cu tulburări mentale nesupravegheați în fotoliul rulant!

5. Utilizare

- După deschiderea pachetului, verificați dacă acesta conține toate componentele, în conformitate cu cele enumerate mai sus.
- Asigurați-vă că niciun element nu prezintă deteriorări vizibile. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să contactați producătorul.
- Nu folosiți fotoliul rulant până nu l-ați asamblat complet și corespunzător.



DEPLIEREA FOTOLIULUI RULANT

- Poziționați fotoliul rulant cu roțile din spate înspre Dvs.
- Depărtați mânerul unul față de celălalt, trăgându-le în direcții opuse, către exterior (Foto nr. 10.).
- Apoi poziționați fotoliul rulant cu roțile din față către Dvs..
- Apăsăți plăcile laterale până la depliere completă a fotoliului rulant (Foto 12., 13.)



Foto 10.



Foto 11.



Foto 12.



Foto 13.

- Apoi aliniați/îndreptați șina de stabilizare până ce veți auzi un click caracteristic.

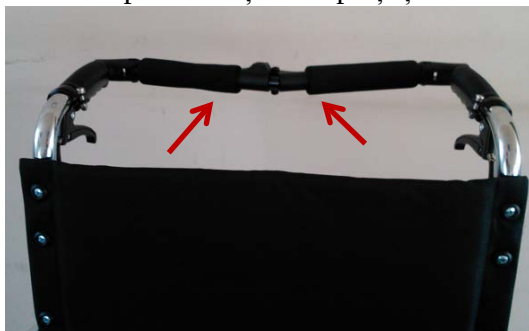


Foto 14.

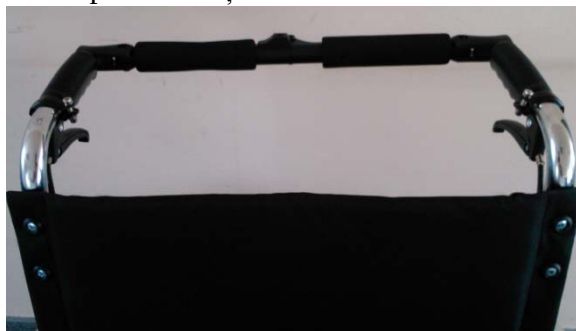


Foto 15.

- Introduceți tije cotierelor în orificiile din lateralele fotoliului rulant, astfel încât dispozitivul de blocare a cotierei să fie poziționat către exterior. (Foto 16.,17.)



Foto 16.



Foto 17.

- Apoi atașați extensia spătarului în orificiile, aflate în partea inferioară a spătarului. (Foto 18., 19.)
- Cu ajutorul sistemului de fixare velcro (închizător cu arici) montați suportul pentru cap pe spătarul înălțat la înălțimea potrivită. (Foto 20.)



Foto 18.



Foto 19.



Foto 20.

- Cu ajutorul sistemului de fixare velcro fixați perna de șezut pe scaun.



Foto 21.

- Instalați rolele anti-răsturnare, introducând tijele rotelor în orificiile cadrului inferior până la nivelul în care veți auzi click-ul caracteristic de fixare. (Foto 22., 23.)



Foto 22.

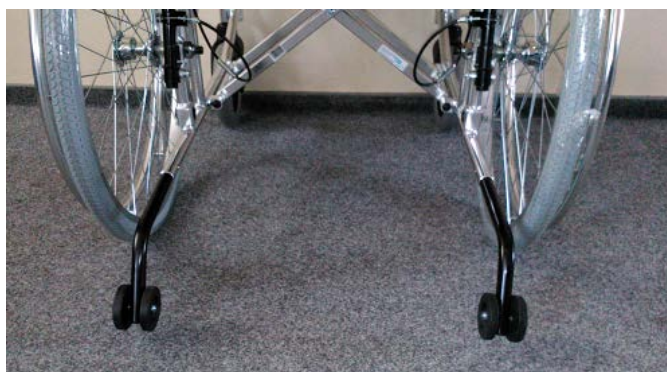


Foto 23.

- Pentru a monta suporturile pentru picioare, agățați capătul tijelor (suportului pentru picioare) pe agățătorul proeminent, aflat pe cadrul fotoliului rulan (Foto 24 .; 25). Apoi rotiți suportul pentru picioare către partea din față a fotoliului rulant până la blocarea acestuia (veți auzi un "click" caracteristic). (Foto 26.)



Foto 24.

Dispozitiv
de blocare
suport pi-
cioare

agățător
proeminent
de pe cadru



Foto 25.

dispozitiv metalic
pentru montarea
suportului de
picioare



Foto 26.

manetă pentru
coborârea suportului
pentru picioare



6. Siguranța în utilizare - ATENȚIONARE!

- a) Înainte de utilizarea căruciorului, consultați acest manual și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- b) La urcarea și coborârea în / din fotoliul rulant, frânele trebuie să fie întotdeauna activate!
- c) Nu vă urcați pe pedalele (platforma) suportului pentru picioare înainte de a vă așeza în fotoliul rulant, întâi trebuie să le pliați sau să le dați complet la o parte ca să vă puteți urca în el.
- d) Pacienții, care au nevoie de stabilizare suplimentară pentru cap, trebuie să fie asistați în timpul deplasării cu fotoliul rulant de un însoțitor.
- e) Ridicarea fotoliului rulant cu tot cu pacient este interzisă cu desăvârșire!
- f) Atunci când treceți de praguri de uși sau prin pasaje strâmte, asigurați-vă că există spațiu suficient pe ambele părți laterale, pentru a evita rănirea mâinilor pacientului sau deteriorarea fotoliului rulant.
- g) Pe drumuri publice respectați întocmai regulile de circulație.
- h) Ca și în cazul altor vehicule, nu conduceți fotoliul rulant sub influența băuturilor alcoolice sau a medicamentelor. Acest lucru este valabil și pentru utilizarea acestuia în interior.
- i) Fotoliul rulant nu a fost conceput pentru transportul pacientului pe scări, sau pentru tractarea acestuia. Construcția fotoliului rulant, îmbinările elementelor sale nu au fost create pentru o suprasolicitare atât de mare. Suprasolicitarea ar putea cauza slăbirea sau deteriorarea întregii structuri a fotoliului rulant și ar putea crește riscul unor posibile accidente!
- j) Fotoliul rulant poate fi folosit în interior și în exterior doar pe suprafețe solide și nivelate (uniforme).
- k) Nu este permisă utilizarea fotoliului rulant pe suprafețe instabile (acoperite cu gheață, umede, unsuroase, nisipoase) din cauza riscului de cădere, răsturnare.
- l) Folosiți fotoliul rulant doar pe suprafețe, care permit rularea tuturor celor patru roți pe sol.
- m) În cazul obstacolelor arhitecturale complicate (rampe lungi și abrupte, trepte înalte, scări) este necesar ajutorul unui însoțitor.
- n) Dacă utilizatorul nu are experiență suficientă în conducerea fotoliului rulant, este necesară asistența însoțitorului, care-l va ajuta să treacă peste denivelări/obstacole.
- o) Nu lăsați utilizatorul așezat în fotoliul rulant în preajma unor surse de foc deschis.
- p) Aveți grijă pentru că după expunerea la soare sau la alte surse de căldură a fotoliului rulant, temperatura suprafeței tapițeriei și a elementelor cadrului poate crește. Totodată cu scăderea temperaturii există riscul răcirii exagerate a elementelor metalice. Acest lucru poate cauza arsuri sau degerături la nivelul corpului.
- q) Pentru a muta fotoliul rulant dintr-un loc în altul, apucați cadrul acestuia. Niciodată să nu-l mutați apucându-l de suporturile pentru brațe sau pentru picioare.
- r) Niciodată nu folosiți fotoliul rulant pe post de scaun pentru transportul unei persoane într-un autovehicul (automobil, autobuz, etc.).
- s) Fotoliul rulant a fost conceput pentru o persoană cu o greutate corporală de până la 100 kg.
- t) Plierea și deplicarea fotoliului rulant este simplă. Dacă acest lucru vă creează dificultăți, vă rugăm să recitiți manualul de utilizare sau adresați-vă producătorului.
- u) Fiți prudenți atunci când rulați cu căruciorul pe pante/rampe. Unghiul maxim de înclinare a terenului poate fi de max. 5%.
- v) Frânele nu pot reduce viteza fotoliului rulant în timpul rulării roților. Folosiți-le doar pentru a împiedica deplasări nedorite.
- w) Este obligatorie ajustarea corespunzătoare a ambelor frâne. Ajustarea incorectă a frânelor va avea ca rezultat oprirea doar a unei singure roți din spate. Pe pante mai abrupte va fi dificilă stăpânirea învârtirii fotoliului în jurul roții oprite.

- z) Pentru a evita deplasarea involuntară a roților, activați întotdeauna frânele atunci când fotoliul rulant staționează, atunci când coborâți sau urcați pacientul din/în fotoliul rulant sau îi schimbați poziția.
- aa) Nu lăsați pacientul în fotoliul rulant (nici măcar cu frânele activate) pe pante, rampe, etc.
- bb) De fiecare dată, după asamblarea unei roți, trebuie să verificați dacă ați introdus axul corect în închizătoare - trebuie să auziți acel "click" caracteristic al încuietorii. Trageți cu forță de roată pentru a vă asigura că ați montat-o corect.
- cc) Activarea frânelor de staționare în timpul rulării roților poate cauza accidente cu toate consecințele sale.
- dd) După fiecare ajustare efectuată la fotoliul rulant, este necesară verificarea funcționării corecte a frânelor.
- ee) Roțile murdare (acoperite cu substanțe uleioase, grăsimi sau alte chimicale) sau umede pot reduce eficiența frânelor.
- ff) Exploatarea îndelungată a fotoliului poate diminua eficacitatea sistemului de frânare. Puteți efectua reglaje la sistemul de frânare. Pentru acest lucru trebuie să slăbiți șuruburile care fixează poziția frânelor, poziționați mecanismul către roată, astfel încât roțile să nu se învârtă atunci când activați din nou frâna (faceți o probă cu utilizatorul în fotoliul rulant). După reglările finale fixați mecanismul cu șuruburile.
- gg) Păstrarea tuturor părților fotoliului rulant curate este extrem de importantă pentru a menține parametrii optimi de funcționare ai fotoliului rulant.
- hh) Păstrarea fotoliului rulant într-un loc foarte umed (băi, spălătorii, etc.) sau sub cerul liber, asociată cu o lipsă de igienă, poate cauza pierderea rapidă a parametrilor funcționali și estetici ai fotoliului.
- ii) Utilizarea fotoliului rulant după descoperirea oricăror deteriorări vizibile sau detectabile, sau atunci când uzura unor părți componente ar putea cauza accidente, este inadmisibilă. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal calificat, pe durata perioadei de garanție doar de către service-ul producătorului.
- jj) În cazul fotoliilor dotate cu roți gonflabile nu depășiți presiunea maximă admisă de umflare a roților, valoarea este indicată pe anvelopele roților.
- kk) Pe durata transportului (ex., în portbagaj), nu așezați greutăți pe fotoliul rulant pentru a evita slăbirea sau deteriorarea structurii acestuia.
- ll) A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub cinci ani.
- mm) Fiți deosebit de precauți atunci când depiați sau pliați fotoliul rulant. În caz contrar, riscați să vă prindeți degetele între părțile pliabile:
 - între elementele de îmbinare ale suportului pentru picioare
 - elementele sistemului de frânare
 - atunci când procedați la plierea fotoliului, (în jurul părților mobile).

7. Utilizare zilnică și întreținere



Picioar tavă
(măsuță)

Foto 27.

- Înainte de a instala tava (măsuța), piciorușele tăvii trebuie înșurubate.
- Apoi slăbiți dispozitivul de fixare. Pentru a evita deșurubarea accidentală folosiți două șaibe (una mai mică, a doua mai mare), însă este important ca șaibele să fie strânse bine în dispozitivului de fixare.



Dispozitiv de
fixare cu șurub

Poza 28.

- Dispozitivul de fixare trebuie montat în așa fel încât șurubul, după ce a fost strâns, să se poziționeze către partea frontală a fotoliului rulant, iar orificiile, în care vor fi introduse piciorușele tăvii, în spatele cadrului cotierei. (Foto 28.)



Foto 29.

- Platforma pentru picioare (tălpi) trebuie instalată în orificiile tijei suportului pentru ridicarea picioarelor. (Foto 29.)
- Este important ca golul dintre cele două platforme să se poziționeze către interiorul scaunului.
- Pentru a îndepărta platforma, scoateți tijele suportului pentru ridicarea picioarelor din orificiile platformei pentru tălpi.
- Pentru a ușura instalarea măsuței, puteți lăsa dispozitivul de fixare montat pe cadru.

AȘEZAREA PACIENTULUI ÎN FOTOLIUL RULANT:

- Poziționați fotoliul rulant într-o poziție care vă va ușura transportul pacientului (lângă pat, scaun, aproape de locul de unde îl ridicați).
- Blocați roțile (activați ambele frâne), ridicați în poziție verticală sau îndepărtați suporturile pentru picioare.
- În funcție de modul în care veți deplasa pacientul, îndepărtați suportul pentru braț/cotiera în partea potrivită (se recomandă păstrarea celeilalte cotiere, aceasta putând crea o balustradă protectoare care să prevină alunecarea pacientului din fotoliul rulant).
- Așezați pacientul în fotoliul rulant.

- Montați suportul de braț (cotiera).
- Instalați și depiați platforma pentru tălpi și așezați picioarele pacientului pe acesta.
- Așezați pacientul în poziție de șezut cu spatele drept (genunchii să fie îndoiți la un unghi 90 de grade).

ÎMPINGEREA FOTOLIULUI RULANT DE CĂTRE ÎNSOȚITOR

- Înainte de utilizarea fotoliului rulant, asigurați-vă că nicio parte a corpului pacientului sau a îmbrăcăminteii acestuia nu intră în contact cu părțile mobile ale fotoliului rulant.
- Dacă pacientul nu poate sta de unul singur în poziție de șezut, fotoliul rulant trebuie echipat cu centuri adiționale de susținere (centuri de siguranță care previn alunecarea de pe scaun a pacientului).
- Fotoliul rulant trebuie împins cu ambele mâini de către însoțitor.

URCAREA PE UN DRUM ÎNCLINAT (RAMPĂ)



- Fiți prudenți și reduceți viteza atunci când vă urcați cu fotoliul rulant pe un drum înclinat (pe o rampă).
- Evitați rampele foarte abrupte. Unghiul maxim de înclinare a rampei nu poate depăși 5%.
- Acceptați ajutorul unei persoane. Dacă pacientul din fotoliul rulant nu are destulă putere să controleze fotoliul rulant, frânele trebuie să fie activate.
- Pentru a preveni răsturnarea pe un teren în rampă, aplecați-vă în față pentru a muta centrul de greutate în direcția de mers.

COBORÂREA UNEI TREPTE SAU TRECEREA PESTE UN PRAG DE UȘĂ



- Cu fața către obstacol, fără ajutorul unei persoane
- Un utilizator de fotoliu rulant experimentat poate trece singur peste un prag sau o bordură joasă.
- Puteți trece peste o bordură joasă avansând către față. Asigurați-vă că platforma suporturilor pentru picioare nu ating solul.
- Mențineți scaunul rulant în echilibru pe roțile din spate pentru a diminua presiunea asupra roților din față.
- Apoi treceți peste bordură.



- Coborârea unei trepte, cu fața către direcția de mers, cu ajutorul unui însoțitor
- Cu ajutorul unei persoane (un însoțitor) puteți trece peste borduri mai înalte.
- Însoțitorul trebuie să încline ușor fotoliul rulant către spate.
- Treceți peste bordură deplasându-vă pe roțile din spate.
- Apoi fotoliul rulant trebuie așezat pe sol, pe toate cele patru roți.



- Avansarea cu spatele către direcția de mers fără ajutorul unui însoțitor
- Un utilizator de fotoliu rulant experimentat poate trece singur peste un prag sau borduri joase.
- Poziționați-vă astfel încât ambele roți din spate să fie orientate către bordură.
- Aplecați-vă în față pentru a schimba centrul de greutate în sens contrar direcției de mers.
- Aproțiați-vă de bordură până la marginea acestuia.
- Apoi, folosindu-vă de inelele de antrenare, manevrându-le într-o manieră controlată, glisați ușor fotoliul rulant de pe bordură.

TRECEREA (URCAREA) PESTE UN PRAG SAU O BORDURĂ

➤ Către direcția de mers cu ajutorul unui însoțitor

- Un utilizator experimentat poate trece de unul singur peste un prag sau o bordură joasă.
- Însoțitorul va înclina ușor fotoliul rulant către spate.
- Utilizatorul de fotoliu rulant va menține fotoliul rulant în echilibru pe roțile din spate



pentru a diminua presiunea de pe roțile frontale.

- Poziționați-vă cu roțile din față pe bordură, apoi treceți cu roțile din spate peste ea.

➤ Bordurile mai înalte pot fi trecute avansând cu spatele către direcția de mers, cu ajutorul unui însoțitor

- Poziționați fotoliul rulant astfel încât ambele roți din spate să fie orientate către bordură.
- Utilizatorul de fotoliu rulant va menține fotoliul rulant în echilibru doar pe roțile din spate pentru a diminua greutatea asupra roților frontale.

- Însoțitorul va manevra fotoliul rulant peste bordură.

- Utilizatorul de fotoliu rulant va reveni la poziția normală în fotoliul rulant.



➤ Avansare cu fața către direcția de mers fără însoțitor

- Un utilizator de fotoliu rulant experimentat poate trece de unul singur peste un prag sau o bordură joasă.

- Poziționați roțile din față aproape de marginea bordurii sau a pargului.

- Asigurați-vă că suporturile pentru picioare nu ating solul.

- Acum puteți rula cu roțile din față pe bordură.

- Apoi, puteți urca cu roțile din spate pe bordură.



TRANSPORTUL FOTOLIULUI RULANT ÎNTR-UN AUTOVEHICUL

- Pentru a transporta cu ușurință fotoliul rulant îndepărtați platforma pentru picioare și înălțătorul de spătar, trăgându-l în sus până la maxim.
- Apoi pliați platforma suporturilor de picioare și îndepărtați suporturile de picioare.
- În acest sens, slăbiți dispozitivul de blocare a suporturilor pentru picioare, și rotiți către exterior suporturile de picioare și îndepărtați-le de pe dispozitivul de susținere al acestora.
- Apoi îndepărtați perna de scaun.

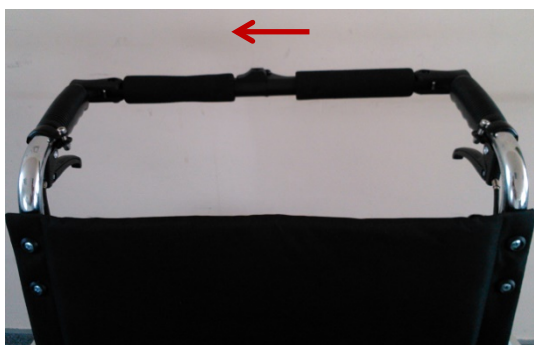


Foto 30.

- Pentru a putea strânge fotoliul rulant, deplasați închizătoarea (Foto 30) situată pe șina de stabilizare, și permiteți șinei să se deplaseze către scaunul fotoliului rulant.
- Apoi trageți în sus cadrul încrucișat, ceea ce va cauza strângerea fotoliului rulant.



Sistemul de eliberare rapidă a roților din spate

Foto 31.

- Pentru a monta sau a demonta roțile din spate, apăsați butonul sistemului de eliberare rapidă al roților din spate (Foto 31) și trageți sau împingeți pe ax roata.
- Pentru a îndepărta roțile anti-răsturnare, apăsați butonul de blocare, apoi trageți de roțile anti-răsturnare.
- Pentru a muta fotoliul rulant dintr-un loc într-altul, acesta trebuie ridicat obligatoriu de elementele cadrului. Niciodată să nu apucați fotoliul rulant de suporturile pentru brațe sau de picioare.

REGLAREA SPĂTARULUI




Manetă de reglare a unghiului de
înclinare a spătarului

Foto 32.

- Înainte de a regla spătarul, frânele ambelor roți din spate trebuie să fie activate.
- Pentru a ajusta unghiul de înclinare al spătarului, însoțitorul va apăsa maneta de reglare (Foto 32), și va trage sau împinge spătarul, în funcție de poziția dorită.
- Pentru a restabili poziția originală a spătarului, apăsați maneta de reglare și pliați sau depiați spătarul.
- Ajustarea spătarului se va efectua doar cu frânele activate (atunci când roțile sunt blocate).

MECANISMUL DE FRÂNARE

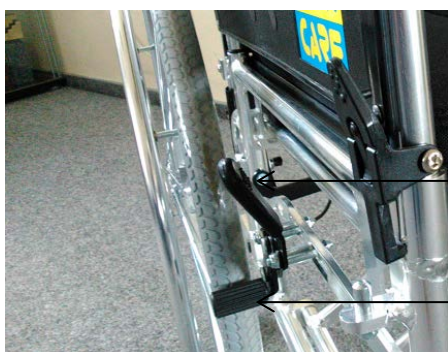

Manetă de frână

Frână

Foto 33.

- Foto 33 prezintă mecanismul de frânare.
- Pentru a activa frâna, mutați maneta de frână către direcția roții din față, până când frâna se freacă puternic de roata din spate, blocându-i rotația.
- Asigurați-vă că maneta de frână nu se deblochează automat atunci când încercați să mișcați fotoliul rulant.
- Pentru a dezactiva frâna, mutați maneta către roata din spate.

SUPORTUL PENTRU PICIOARE

- Pentru a regla înălțimea suportului pentru picioare, ridicați-l. Pentru a coborâ, trageți de maneta de coborâre a suportului pentru picioare (foto 34) în direcția roții din spate.
- Sprijinul pentru gambe are trei trepte de reglare a înălțimii.
- Pentru a ajusta înălțimea sprijinului de gambe (Foto 35) întoarceți-le către exterior, și în funcție de nevoie, ridicați-le sau coborâți-le, apoi întoarceți-le către interior.



Foto 34.



Foto 35.

UMFLAREA ANVELOPELOR (Valabil fotoliilor rulante cu roți gonflabile)

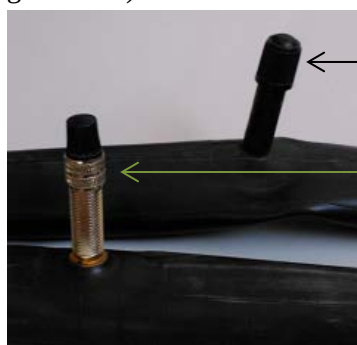


Foto 36.

Valvă Schrader

Valvă Presta

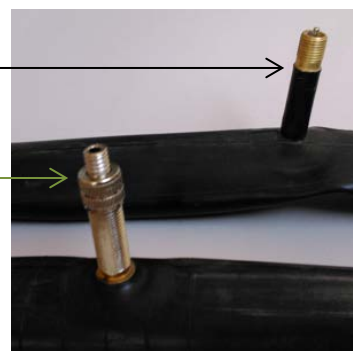


Foto 37.

- Înainte de umflarea anvelopelor, identificați tipul de valvă situată pe anvelopă. Aceasta trebuie să fie una dintre cele două prezentate pe fotografia 36 și 37.
 - Valva Presta are un capac suplimentar, micuț, care trebuie deșurubat înainte de a pompa aer în anvelopă.
 - După identificarea valvei, pregătiți pompa potrivită tipului de valvă.
 - Majoritatea pompelor din comerț sunt echipate astfel încât să se potrivească la ambele tipuri de valve (Presta și Schrader). Multe dintre acestea permit schimbarea vârfului. Valva Presta are orificiul mai mic, iar valva Schrader are orificiul mai mare.
- Dacă pompa nu funcționează cu valva Presta, va trebuie să cumpărați Dvs. un "adaptor valvă Presta", disponibil în orice magazin de biciclete.

- Dacă roata este dotată cu o valvă Presta, va fi nevoie să deșurubați capacul de pe vârful orificiului. Este un capac micuț, pe care puteți deșuruba cu ușurință doar cu degetele. Atunci când efectuați acest lucru vârful trebuie să fie orientat în sus. Valva este în acest moment deschisă.
- Apoi îndepărtați capacul de plastic al valvei și puneți-l la o parte, într-un loc sigur. Este important să nu îl pierdeți deoarece valvele se murdăresc, ceea ce vă va produce neplăceri și scăpări rapide de aer.
- Potrivii în orificiul pompei valva și verificați să se potrivească perfect. Dacă este necesar, presați pompa la valvă ca să fiți siguri că aerul nu scapă pe laterale.
- Dacă pompa este dotată cu o manetă cu clemă, eliberați cleva. În cazul în care orificiul pompei și valva au vârful filetate, filetați-le. Ca rezultat, aerul va ajunge direct în tubul interior și pompa nu se va desprinde de pe valvă.
- Când începeți să pompați, verificați presiunea în cauciucuri în diferite puncte. Verificați presiunea cu degetele la capătul pneului. Suprafața roții trebuie să cedeze puțin, dar nu mai mult de 1 mm. Acest lucru înseamnă că anvelopele au aer suficient. Dacă este necesar, continuați pomparea.
- După finalizarea procesului de umflare, îndepărtați din orificiul pompei valva, defiletați-o dacă este nevoie, presând în tot acest timp cu degetul mare orificiul valvei pentru a preveni scăparea de aer.
- În cazul valvei Presta, înșurubați la loc capacul.

PRESIUNEA ÎN ROȚI ȘI PUTEREA DE FRÂNARE

- Presiunea din roți va fi condiționată de greutatea utilizatorului, apoi verificați eficiența frânelor de parcare/de staționare în prezența însoțitorului (utilizatorul în fotoliul rulant, cu față către pantă, nu poate rula pe o pantă cu o înclinare de 15%)
- După finalizarea tuturor ajustărilor verificați toate îmbinările.

OBSERVAȚII

- Pompați aer în cameră până la obținerea presiunii recomandate, respectând un nivel de presiune corespunzător, conform valorilor indicate de furnizor pe lateralele cauciucurilor.
- Folosiți o pompă cu manometru sau pompă manuală din trusa de accesorii inclusă.

FOLOSIREA ZILNICĂ ȘI ÎNTREȚINEREA

- Curățați tapițeria și cadrul cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți și alte chimicale!
- Curățați părțile mobile ale fotoliului în mod regulat (la nivelul șuruburilor, mecanismului de rezistență).
- Păstrați curate părțile componente ale fotoliului rulant pentru a menține parametrii de funcționare.
- Păstrarea fotoliului rulant într-o încăpăre cu umiditate crescută (băi, spălătorii etc.) sau sub cerul liber, asociată cu lipsa de igienă, poate avea drept consecință pierderea rapidă a parametrilor funcționali și estetici.
- Nu expuneți fotoliul rulant la condiții meteorologice extreme (zăpadă, ploaie, soare puternic) pentru că unele părți ale fotoliului pot să își schimbe culoarea (se pot decolora).

Este interzisă folosirea de:

- solvenți,
- detergenți de toaletă,
- obiecte ascuțite sau perii aspre,
- detergenți care conțin clor,
- produse corozive de curățare,

Nu utilizați aparate de curățat cu abur, sau aparate de curățare sub presiune!

REVIZIE TEHNICĂ

Revizia tehnică trebuie efectuată periodic, după o curățare riguroasă a fotoliului rulant, pentru a putea depista orice deteriorare greu de observat:

Frecvența verificării	Elementul verificat	Observații
Înainte de prima utilizare	Verificarea stării tehnice și ale pieselor din pachetul livrat	Asigurați-vă că nu există deteriorări mecanice vizibile.
Înainte de fiecare utilizare	Verificarea roților, ale frânelor	Frânele se pot uza, verificați starea lor înainte de fiecare utilizare. Verificați de asemenea starea roților, curățați-le de nisip, praf, murdărie.
Din două în două săptămâni	Verificarea stării șuruburilor, ale piulițelor pentru a vă asigura că acestea strâng.	Asigurați-vă că toate șuruburile, capacele valvelor sunt strânse corespunzător.
Din două în două luni	Starea generală și aspectul curat.	În cazul depistării unor deteriorări mecanice, contactați imediat producătorul.
Odată pe lună	Axele roților	În cazul depistării unor deteriorări mecanice, contactați imediat producătorul. Ridicați fotoliul rulant de pe sol astfel încât roata pe care o testați să se rotească liber în jurul axului, dar fără joc, și roata din fața tot în direcția axului.
Odată pe lună	Verificarea stării îmbinărilor fixe, ale celor mobile, ale celor sudate, ale sistemului de eliberare rapidă.	Căutați eventualele crăpături pe cadru, la nivelul îmbinărilor fixe, mobile, la nivelul sistemului de eliberare rapidă.
Odată pe lună	Verificarea stării anvelopelor	Asigurați-vă că banda de rulare a anvelopelor nu este uzată și că anvelopele nu prezintă semne vizibile de deteriorare.


Reparații

- Pentru reparații, vă rugăm să contactați producătorul.

Serviciu clienți

- Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să contactați producătorul.

8. Parametri tehnici

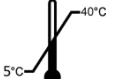Greutatea maximă admisă a utilizatorului	100 kg 
Perioadă de utilizare	5 ani de la data producției
Înălțimea fotoliului rulant cu spătar înălțat	1220 mm
Înălțimea mânerului	930 mm
Lățimea fotoliului rulant	700 mm
Lungimea totală cu spătarul și suportii de picioare depiați	1750 mm
Lungimea minimă a fotoliului rulant	1300 mm
Lățime șezut (scaun)	460 mm
Adâncime șezut (scaun)	460 mm
Lățime spătar	480 mm
Lungime spătar	400 mm
Lungime spătar cu spătar înălțat la max.	765 mm
Dimensiunile fotoliului rulant după pliere	900x940x330 mm
Greutatea fotoliului rulant	23 kg +/- 5%
Greutatea fotoliului rulant fără componente	16 kg +/- 5%
Raza minimă de virare	137°
Material	Cadru: oțel; Tapițerie: poliuretan, polietilenă, cauciuc.
Diametru roți spate cu sistemul de eliberare rapidă	24", (diametru 610 mm)
Diametru roți față	8", (diametru 200x45 mm)
Înclinația maximă sigură	
Descrierea mediului de utilizare al fotoliului rulant	
Temperatura ideală a mediului de utilizare și de depozitare	
Umiditatea admisă a mediului de utilizare și	de la 30% la 70%
	Printat pe produs

9. Simboluri



Confirmarea conformității cu standardele UE



Producător



Data fabricării



Dispozitiv medical



Citiți manualul de utilizare



Avertizare



Număr din catalog



Număr de serie



Feriți de umiditate



Feriți de soare



Greutatea maximă
admisă a utilizatorului



Pentru utilizare interioară și exterioară



Înclinația maximă sigură



Risc de accidentare (de prindere, de
înțepare) a degetelor.



Nu vă urcați pe platforma
pentru picioare (tălpi)




Produsul poate fi transportat într-un
autoturism.



Produsul nu a fost conceput pentru a fi utilizat pe post de scaun pentru
transportul unei persoane într-un autovehicul.



Produsul poate fi transportat în avion.

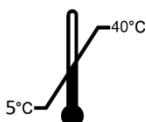

Temperatura recomandată de
utilizare și de păstrare

10. Date de contact



mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104, 94-007, Łódź, Polska

tel. +48 42 674 83 84

fax. +48 42 636 52 21

www.mdh.pl www.viteacare.com