




Ref. 221800

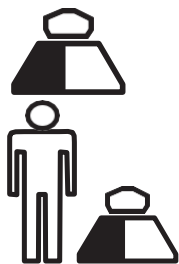

1,9 kg

130 kg

- a** 751-852 mm
- b** 540 mm
- c** 350 mm
- d** 353 mm

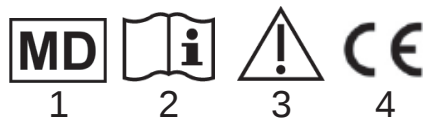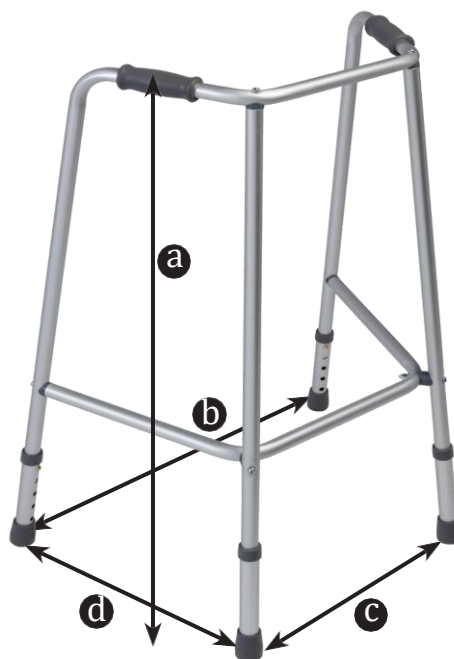

		RO		
		Explicația simbolurilor		
1		Dispozitiv medical		
2		Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare		
3		Respectați instrucțiunile de siguranță!		
4		Conformitate CE		

RO Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare viitoare.

1. Indicații de siguranță

- ♥ Consultați ÎNTOTDEAUNA medicul sau furnizorul pentru a determina reglarea și utilizarea corespunzătoare a dispozitivului.
- ♥ Nu depozitați în exterior și nu lăsați produsul la soare (Atenție: nu lăsați produsul în mașină în caz de temperatură exterioară ridicată!!).
- ♥ Nu utilizați la temperaturi extreme (peste 38 °C sau 100 °F ori sub 0 °C sau 32 °F).
- ♥ Verificați cu atenție toate componentele acestui articol (șuruburi, tuburi, vârfuri, mâner...).
- ♥ Verificați periodic dacă toate șuruburile sunt strânse.
- ♥ Țineți ferm și complet mânerul în timpul utilizării.
- ♥ În caz de cădere: lăsați produsul să cadă pe o parte, astfel încât să nu cădeți pe el.
- ♥ Înaintați întotdeauna încet și cu pași mărunți pentru a asigura un bun echilibru al greutății dvs. și pentru a evita pierderea echilibrului.
- ♥ Nu utilizați pe suprafețe umede sau înghețate (zăpadă, gheață, apă...) !!
- ♥ Nu utilizați pe scări, deoarece există riscul de vătămare gravă!!
- ♥ Utilizați numai ca ajutor pentru mers și în mod corespunzător: nu utilizați ca pârghie sau pentru a muta mobilă.
- ♥ Respectați ÎNTOTDEAUNA limita de greutate de pe eticheta cadrului de mers.
- ♥ Acest dispozitiv nu trebuie modificat. Utilizați numai piese originale pentru a le înlocui pe cele defecte sau rupte, iar înlocuirea trebuie să fie efectuată exclusiv de personalul tehnic.
- ♥ După desfășurarea sau asamblarea ajutorului pentru mers, înainte de utilizare, asigurați-vă că acesta este blocat bine în poziție deschisă (OPEN) și este drept pe sol.
- ♥ NU agățați nimic de ajutorul pentru mers.
- ♥ Testați ÎNTOTDEAUNA blocarea corectă și sigură în poziție a ajutorului pentru mers și a accesoriilor înainte de utilizare.
- ♥ În cazul în care nu ați folosit ajutorul pentru mers pentru o perioadă îndelungată, solicitați verificarea de către personalul tehnic înainte de utilizare.
- ♥ Aveți grijă la utilizare: atenție la găuri și denivelări în podea.
- ♥ Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie să fie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.
- ♥ Garanția exclude daunele care rezultă din modificările structurale ale produselor noastre, din întreținerea inadecvată, din manevrarea sau depozitarea eronată sau necorespunzătoare ori din utilizarea de piese neoriginale. De asemenea, garanția exclude componentele sau piesele care fac obiectul uzurii naturale.

2. Utilizare prevăzută, indicații și contraindicații

Utilizare prevăzută:

Ajutoarele pentru mers sunt utilizate în două scopuri: ca parte a unui program de reabilitare atunci când utilizatorul se recuperează după o accidentare sau o intervenție chirurgicală și ca ajutor pentru mobilitate pe termen lung atunci când utilizatorul are o dificultate de mers permanentă. Aceste dispozitive ajută la menținerea echilibrului, la prevenirea vătămărilor (în special a căderilor) și permit persoanei să se ocupe de treburile sale în mod independent. Cadrele de mers pot fi utilizate în interior sau în exterior, în funcție de model. Cadrele de mers sunt utilizate pentru a modifica redistribuirea greutății: o parte din greutatea transportată pe picioare în timpul mersului este transferată prin brațele cadrului sau pe baston, în timpul sprijinirii. Produsele dotat cu un scaun permit odihna de scurtă durată a utilizatorului.

Indicații

- Pierderea autonomiei din cauza tulburărilor de mers
- Tulburări de echilibru și/sau de postură
- Probleme de mers
- Program de reabilitare după o accidentare sau o intervenție chirurgicală

Contraindicații A nu

se utiliza în caz de:

- Tulburare cognitivă severă - Pierdere severă a echilibrului - Tulburări motorii sau de percepție severe - Slăbiciune la nivelul membrelor superioare
- Doar specialiștii pot regla produsul și vă pot învăța cum să îl utilizați. Utilizarea sau reglarea greșită ar putea duce la suprasolicitarea dispozitivului sau a pacientului. Dispozitivul trebuie reglat individual de către personalul tehnic pentru a se potrivi nevoilor dvs. Întrebați personalul tehnic cum să utilizați produsul și asigurați-vă că ați înțeles clar explicațiile. În caz de îndoială, nu ezitați să întrebați din nou.

Mersul:

Produsul este deja asamblat la livrare.

Pentru a merge, trebuie să ridicați ajutorul pentru mers și să îl mișcați înainte. Atunci când toate cele 4 picioare sunt pe sol, sprijiniți-vă pe cadru și înaintați. Atunci când produsul este echipat cu 2 roți în față, ridicați ușor picioarele din spate și rulați cadrul înainte.

Reglarea înălțimii:

Picioarele sunt reglabile pe înălțime cu ajutorul butoanelor: apăsați butonul din cadru și reglați extensia piciorului la orificiul de reglare pe înălțime dorit; toate picioarele trebuie să aibă aceeași înălțime. Asigurați-vă că butonul este complet apăsat prin orificiul extensiei piciorului. Verificați stabilitatea înainte de utilizare.

Închiriere: acest produs poate fi închiriat cu condiția să fi fost curățat corect. Manualul de utilizare de față aparține produsului la care se referă și trebuie să fie livrat fiecărui utilizator nou.

3. Curățarea

Cadrul de mers trebuie curățat în mod regulat cu un agent de curățare neagresiv și cu o cârpă moale.

Nu utilizați NICIODATĂ substanțe ULEIOASE!! Pericol de alunecare!!

Solicitați vânzătorului cu amănuntul sau personalului tehnic să verifice regulat ajutorul pentru mers.

Dacă produsul este echipat cu vârfuri din cauciuc, acestea trebuie verificate și schimbate în mod regulat.

4. Materiale

Produsul este realizat din tuburi de aluminiu anodizat. Unele modele sunt echipate cu un cadru din oțel tratat cu rășini epoxidice și cu diverse componente din plastic, în principal mâner, precum și cu vârfuri din cauciuc.

5. Eliminare

Eliminați acest produs în conformitate cu reglementările regionale privind eliminarea deșeurilor.

6. Specificații tehnice

Produsul are o garanție împotriva oricărui defect de fabricație de 2 ani de la data achiziției. Produsul este biocompatibil. Durata de utilizare: 2 ani.

Subsemnata, BROWN ROXANA-VALENTINA, traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 31054/2011, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

