


Denumire	A	B	C	D	E	F	G	H		Greutate
540 300	88 cm	46 cm	58 cm	na	54 cm	na	38 cm	95 cm	100 kg	7,1 kg

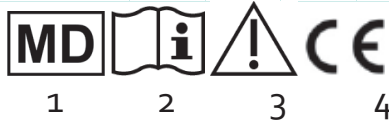

		RO		
		Explicația simbolurilor		
1		Dispozitiv medical		
2		Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare		
3		Respectați instrucțiunile de siguranță!		
4		Conformitate CE		

RO Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare viitoare.

1. Indicații de siguranță

- ♥ Consultați ÎNTOTDEAUNA medicul sau furnizorul pentru a determina reglarea și utilizarea corespunzătoare a dispozitivului.
- ♥ Nu depozitați în exterior și nu lăsați produsul la soare (atenție: nu lăsați produsul în mașină în caz de temperatură exterioară ridicată!!).
- ♥ Nu utilizați la temperaturi extreme (peste 38 °C sau 100 °F ori sub 0 °C sau 32 °F).
- ♥ Verificați cu atenție toate componentele acestui articol (șuruburi, tuburi, vârfuri, mânere).
- ♥ Verificați periodic dacă toate șuruburile sunt strânse.
- ♥ Utilizați numai ca scaun pentru duș și în mod corespunzător: nu stați în picioare pe scaun.
- ♥ Respectați ÎNTOTDEAUNA limita de greutate de pe eticheta produsului.
- ♥ Acest dispozitiv nu trebuie modificat. Utilizați numai piese originale pentru a le înlocui pe cele defecte sau rupte, iar înlocuirea trebuie să fie efectuată exclusiv de personalul tehnic.
- ♥ NU agățați nimic de scaun.
- ♥ Testați ÎNTOTDEAUNA blocarea corectă și sigură în poziție a scaunului și a accesoriilor înainte de utilizare.
- ♥ În cazul în care nu ați folosit scaunul pentru o perioadă îndelungată, solicitați verificarea de către personalul tehnic înainte de utilizare.
- ♥ Nu depozitați în exterior; scaunul trebuie utilizat acasă.
- ♥ Verificați scaunul înainte de utilizare; în caz de îndoială adresați-vă medicului sau furnizorului.
- ♥ Utilizați scaunul numai pe o suprafață plată și solidă.
- ♥ Este interzis să stați pe cotiere.
- ♥ Nu vă aplecați pe scaun pentru a evita pierderea echilibrului.
- ♥ Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie să fie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

2. Utilizare prevăzută, indicații și contraindicații

Scaunul pentru duș poate fi utilizat la domiciliu sau în căminele de bătrâni pentru a ajuta o persoană care are dificultăți de mers la baie, permițând persoanei să stea așezată în timp ce face duș. Scaunul nostru pentru duș este conceput pentru a fi utilizat de persoanele care nu pot sta în picioare pentru a face duș și trebuie să stea așezate. Cu ajutorul scaunelor pentru duș, persoanele în vârstă și cele cu probleme de mobilitate pot avea o oarecare independență, făcând baie singure sau ajutate.

Indicație

Utilizare la domiciliu atunci când pacientul este prea debilitat pentru a ajunge la baie. **Contraindicație**

Nu utilizați scaunul de tip toaletă în caz de:

- Tulburare cognitivă - Pierdere echilibrului - Tulburări de ședere

3. Instalare

Doar specialiștii pot regla produsul și vă pot învăța cum să îl utilizați. Întrebați personalul tehnic cum se utilizează acest produs și asigurați-vă că ați înțeles clar explicațiile. În caz de îndoială, nu ezitați să întrebați din nou. Scaunul poate fi utilizat și pe toaletă, dar scoateți mai întâi vasul. Scaunul poate fi utilizat peste vasul de toaletă: asigurați-vă că ați îndepărtat vasul scaunului înainte de utilizare.

Atenție! Șezutul cu carcasă din plastic are găuri pentru scurgerea apei de pe scaun. În unele situații, în acele găuri se pot prinde organele genitale sau prolapsul rectal, ducând la durere și leziuni grave, cum ar fi tăieturi, lacerări și vânătăi testiculare. În caz de îndoială, vă rugăm să consultați medicul sau comerciantul cu amănuntul pentru a determina utilizarea sigură a dispozitivului. De asemenea, puteți amplasa un material, cum ar fi un prosop, peste scaunele pentru baie pentru a preveni trecerea cârnii sau a părților anatomice prin ele.

Scaunul poate fi utilizat la duș și sub apă. Scaunul este livrat gata de utilizare. Roțile sunt echipate cu frâne.

Închiriere: acest scaun poate fi închiriat cu condiția să fi fost curățat corect. Manualul de utilizare de față aparține produsului la care se referă și trebuie să fie livrat fiecărui utilizator nou.

3. Curățarea

Scaunul trebuie curățat în mod regulat și după fiecare utilizare cu un agent de curățare neagresiv și cu o cârpă uscată.

5. Materiale

Produsul este compus din tuburi din aluminiu și un șezut din plastic rigid.

6. Eliminare

Eliminați acest produs în conformitate cu reglementările regionale privind eliminarea deșeurilor.

7. Specificații tehnice

Produsul are o garanție împotriva oricărui defect de fabricație de 2 ani de la data achiziției. Produsul este biocompatibil.

Test: EN-ISO 9999: 091203, EN 12182, EN 1041, ISO 10993-ff. Durata de utilizare: 2 ani.

Subsemnata, BROWN ROXANA-VALENTINA, traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 31054/2011, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

