

FOTOLIU RULANT mdh (7mdh.VCWK42L/VCWK43L)

DESCRIERE PRODUS:

- cadru de oțel pliabil (construcție dublă, în cruce)
- versiuni posibile de scaun: 16", 18", 20"
- tapiserie neagră din nailon
- pernă moale (VCWK42)
- cotieră înaltă
- suporturi pentru picioare detașabile și ajustabile în lungime,
- centură de siguranță,
- suport pentru gambă,
- roți spate pneumatice de 24" demontabile rapid,
- inel de antrenare din aluminiu;
- buzunar spate,
- culori cadru: platină, albastru, verde

UTILIZARE

Fotoliu rulant pentru uz general, la domiciliu și pentru plimbări.

CONTRAINDICAȚII:

Contraindicații la o poziție șezândă, lipsa stabilizării trunchiului și a capului.

PIESE:

1. Cadru în cruce
2. Cadru pentru spătar
3. Mâner din cauciuc
4. Mâner inferior
5. Scaun din nailon
6. Spătar din nailon
7. Cotieră
8. Cadru cotieră
9. Placă laterală cotieră
10. Blocare cotieră
11. Suport pentru picioare
12. Platformă suport pentru picioare
13. Roată față
14. Furcă roată din față
15. Conector roată din spate
16. Roată
17. Jante din aluminiu
18. Anvelopă
19. Frână

ASAMBLAREA FOTOLIULUI RULANT

- Scoateți fotoliul rulant din cutie;
- Atașați cotierele (elementul nr. 7) - se tașează la cadrul fotoliului rulant până la blocare

(elementul nr. 10). În scopul de a elimina cotierele, trageți sistemul de blocare a cotierei în jos (elementul nr. 10) și scoateți cotiera.

- Asamblați cadrul - țineți cotiera, ridicați-o ușor și desfaceți cadrul fotoliului rulant;
- Atașați suportul pentru picioare (elementul nr. 11) și sprijiniți-l la maximum în afară până se blochează.
- Desfaceți platforma pentru picioare (elementul nr. 12). Suportul pentru picioare poate fi deblocat prin împingerea zăvorului și sprijinirea platformei în interiorul fotoliului rulant.
- Înălțimea suportului pentru picioare poate fi reglată prin desfacerea șurubului de blocare plasat sub platforma suportului. După ce ați ales o înălțime corespunzătoare, strângeți șurubul de blocare.
- Sistemul de demontare rapidă a roții din spate – împingeți mecanismul de blocare și introduceți / îndepărtați roata.

ATENȚIE !!!!

De fiecare dată după asamblarea roților, ar trebui să verificați blocarea axului - ar trebui să auziți sunetul caracteristic "clic " al dispozitivului de blocare în timpul asamblării roții. După asamblare, de asemenea, trebuie să trageți roata fără să împingeți mecanismul de blocare, pentru a verifica blocarea.

- Presiunea din roțile spate ar trebui să fie ajustată la greutatea utilizatorului. Frânele de parcare trebuie verificate atunci când un pacient este așezat în fotoliul rulant (plasat pe pantă de 15 de grade fotoliul rulant nu mai poate coborî). În timp ce verificați frânele de parcare, este necesară asistența unui supraveghetor.

ATENȚIE !!!

Vă rugăm să fiți atenți în timpul asamblării fotoliului rulant. Lipsa de concentrare ar putea duce la prinderea degetelor în părțile de pliere.

SIGURANȚA UTILIZĂRII

ATENȚIE !!!

În cele mai multe cazuri, veți fi capabil să rulați pe promontorii mici fără ajutor - aceasta depinde de forța dumneavoastră și de unghiul promontoriului. Cu toate acestea, în scopul de a învinge barierele off-road trebuie să aveți abilități de bază pentru a manevra fotoliul rulant. De aceea aveți nevoie de ajutor pentru prima manevrare.

- **PROTUBERANȚĂ PLATĂ**- în scopul de a merge pe o protuberanță plată trebuie să vă aplecați în față și să vă mutați centrul de greutate pe direcția de deplasare (imaginea 1).
- **TREPTE** – este nevoie să împingeți jentile înainte, odată cu balansarea în față a trunchiului pentru a trece roțile din față peste o treaptă. Pentru a trece cu roțile din spate peste treaptă, trebuie să vă aplecați în față și să împingeți jentile (imaginea 2a).
- **TRECEREA PESTE O TREAPTĂ / PROTUBEANȚĂ** - cel mai sigur este să faceți manevra de a merge înapoi - ar trebui să vă aplecați în față pentru a muta centrul de greutate și de a controla viteza printr-un dispozitiv de prindere al jantelor (imaginile 3 și 4)

ATENȚIE !!!

Fotoliul rulant nu este conceput pentru a transporta un pacient în jos / în sus pe scări ca o targă sau de a ridica pacientul la etaje.

Elementele de construcție și de legătură nu sunt concepute pentru o astfel de suprasarcină mare în cazul în care fotoliul rulant este utilizat în acest fel. Acest lucru poate determina slăbirea sau deteriorarea întregii structuri de sprijin a fotoliului rulant și poate provoca accidente!

Siguranța utilizatorului

- Fotoliul rulant este conceput pentru a fi utilizat în interior și exterior, numai pe suprafețe dure și plane.
- În cazul barierelor arhitecturale complicate (rampe abrupte sau lungi, trepte înalte, scări) este necesar ajutorul altei persoane.
- Utilizarea fotoliului rulant pe o bază instabilă (acoperită cu gheață, umedă, grasă, cu nisip) este inacceptabilă- există riscul căderii!
- Când vă urcați și coborâți din fotoliul rulant, frânele trebuie să fie întotdeauna acționate!
- Atenție! Temperatura tapițeriei și a componentelor cadrului poate crește după expunerea la soare sau alte surse de căldură. Poate cauza arsuri.
- Fotoliul rulant trebuie ridicat prinzând numai cadrul. Niciodată nu-l ridicați strângând suportul pentru picioare sau cotiera.
- Ridicarea scaunul cu roțile, împreună cu utilizatorul este strict interzisă!

TRANSPORTUL ÎN VEHICULE

În timpul transportului în vehicule, este necesar să i se asigure utilizatorului așezat în fotoliul rulant un sistem de fixare adecvat. Un astfel de vehicul ar trebui să fie echipat cu centuri de fixare adecvate fotoliului rulant, respectând normele de protecție suplimentară a pacientului, prin intermediul centurilor de siguranță.

O atenție deosebită ar trebui acordată o pentru a se asigura că:

- curelele de fixare sunt fixate în punctele ferme și forte ale vehiculului;
- fotoliul rulant în sine este fixat folosind doar cadrul;
- când centurile sunt fixate, fotoliul rulant nu se mișcă în nici o direcție;
- în timpul transportului frânele fotoliului rulant sunt blocate;

Transportul în vehicule special destinate pentru transportul persoanelor cu handicap se realizează o dată ce transportatorul obține autorizația de la organizațiile competente, care permit utilizarea sistemelor de transport și de securitate.

În cazul în care se folosesc alte mijloace de transport (avioane, autobuze, vapoare, tramvaie, trenuri, etc.), este necesar să se obțină informații cu privire la posibilitatea de transport în condiții de siguranță pentru fotolii rulante, în conformitate cu normele de siguranță necesare. Producătorul nu este în nici un fel responsabil pentru accidente și avarierile ce au avut loc în timpul transportului prin alte mijloace de transport.

INSPECȚIA TEHNICĂ

Verificarea tehnică trebuie să fie efectuată în mod regulat, cel puțin o dată la trei luni. Inspecția trebuie să fie precedată de o curățare atentă a fotoliului rulant (pentru a descoperi

eventualele deteriorări). În timpul verificării tehnice este nevoie să:

- verificați starea frânelor,
- verificați siguranța îmbinărilor șuruburilor,
- verificați starea roților, direcției/poziției roților (ridicați fotoliul rulant, astfel încât roata să fie deasupra solului, rulați roțile),
- verificați starea conexiunilor tip baionetă și de îmbinare.

UTILIZAREA ZILNICĂ ȘI PĂSTRAREA

- Curățați tapițeria și cadrul cu o cârpă umedă,
- Folosiți detergenți cu acțiune blândă, diferiți pentru tapițerie și diferiți pentru stratul lăcuit (vă rugăm, verificați întotdeauna indicațiile producătorului de detergent),
- Îndepărtați depunerile, cum ar fi scame, păr, de pe părțile mobile ale scaunului rulant (roți, suporturi pentru picioare).
- Utilizarea frânelor în timpul rulării poate cauza apariția accidentelor grave.
- Verificați întotdeauna eficiența frânelor după orice reglare.
- Eficiența frânelor poate fi redusă după orice deteriorare a anvelopelor.

ATENȚIE !!!

Forța intensității de frânare poate fi redusă după folosirea îndelungată a fotoliului rulant. Vi se permite reglarea frânelor, chiar de către dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, trebuie să slăbiți șuruburile de blocare, mutați mecanismul de frânare spre roată, astfel încât roata să nu se mai învârtă atunci când porniți din nou (încercați reglarea cu utilizatorul așezat în fotoliul rulant) . După reglarea finală asigurați spatele mecanismului cu șuruburi.

Păstrarea curată a tuturor părților fotoliului rulant, precum și modul de depozitare al acestuia, este esențială pentru păstrarea parametrilor originali de funcționare ai fotoliului. Păstrarea fotoliului rulant într-un loc umed (aburi de baie) sau afară, împreună cu lipsa igienei poate provoca o rapidă pierdere a parametrilor originali ai fotoliului rulant.

ATENȚIE !!!

Este inacceptabilă utilizarea fotoliului rulant după ce ați descoperit unele deteriorări vizibile sau în cazul în care uzura unor părți componente poate provoca un accident. Toate reparațiile trebuie să fie efectuate de către un personal calificat.

SCHIMBAREA PNEURILOR

Înainte de a începe schimbarea pneurilor, este necesar să va familiarizați cu următoarele:

În primul rând, este necesară eliberarea aerului din tubul interior și apoi prin apăsarea unui pneu în direcția centrului unei jenți, pentru a slăbi contactul anvelopă-jantă. Folosind o lingură specială, este necesar să se tragă o margine a pneului din jantă, ceea ce va da posibilitatea de a schimba întregul perete al pneului. După această operațiune, tragerea tubului interior este foarte ușoară.

Înainte de instalarea unui nou tub interior, ar trebui acordată o atenție deosebită pentru a vă asigura că:

- o bandă de bază nu este deteriorată și nu conține corpuri străine,
- pereții exteriori ai jantei sunt netezi, fără inserții străine și alte deteriorări.

Banda de jos și janta ar trebui să fie curățate cu precizie, dacă este cazul.

Pentru a instala pneurile este necesar să se pună o gaură a benzii de bază pe o supapă, iar apoi a așezați-le împreună într-un locaș în jantă. Pentru a păstra o astfel de poziție, puneți banda de bază pe întreg perimetru al jantei, asigurându-vă că banda nu este răsucită sau deteriorată și că acoperă în întregime spițele.

Trăgând flancul anvelopei departe de jantă, introduceți supapa în locașul din jantă și pompați ușor tubul interior, care formează o formă rotundă și apoi puneți tubul interior în jantă. Pentru siguranță, este necesar să verificați dacă tubul interior nu este răsucit (în caz de deviere sau deformare, pompați aer suplimentar). Introduceți manual peretele pneului pe jantă, pornind de la o latură opusă a supapei și terminând cu ea.

Este necesar să verificați ambele părți ale roții dacă tubul interior nu este presat de pneu și dacă pneul aderă în mod regulat la jantă. Supapa ar trebui să fie ușor presată în interior și apoi represată în exterior, astfel încât să se așeze bine în locaș.

Pentru a verifica dacă instalarea pneurilor este corectă, este necesar să se pompeze suficient aer, astfel încât să fie posibilă apăsarea unui deget pe partea de jos a jentii. Apoi, verificați dacă pneul aderă uniform la jantă pe ambele părți și dacă este dispusă central. Dacă apar astfel de defecte, este necesară eliberarea aerului din roată și corectarea montării pneurilor. Atunci când instalarea este corectă, este necesară pomparea roții la valoarea maximă de presiune și aplicarea unui capac pe capătul supapei.

NOTE:

- utilizarea instrumentelor nepotrivite sau instalarea incorectă poate provoca daune în serie ale jentii sau pneurilor;
- în cazul jentii din plastic, banda de bază nu este utilizată;
- asigurați-vă că în timpul instalării nu intră nici un fel de corpuri străine în spațiul dintre jantă și banda de bază ceea ce poate cauza defecțiuni sau rănirea unei mâini;
- urmăriți un grad corespunzător de pompare al roții în conformitate cu valorile indicate de producător pe laturile pneurilor;
- folosiți pompa cu manometru sau pompa manuală incluse în echipamentul standard.

UTILIZARE

ÎN SCOPUL DE A PLASA UN PACIENT ÎN FOTOLIUL RULANT TREBUIE:

- să așezați fotoliul rulant într-o poziție care facilitează transportul unui pacient (lângă pat / fotoliu)
- Blocati frânele, pliați sau scoateți suportul pentru picioare
- În funcție de metoda de transport, ridicați sau îndepărtați cotiera
- Atașați cotiera
- Atașați și desfaceți suporturile pentru picioare, așezați picioarele pacientului pe suporturi
- Așezați pacientul în poziția șezut (genunchii ar trebui să fie îndoiți la 90 de grade), reglați înclinația spătarului.

ACTIONAREA FOTOLIULUI RULANT

- Înainte de a utiliza fotoliul rulant, un însoțitor trebuie să se asigure că orice parte a corpului pacientului sau hainele acestuia nu sunt aproape de părțile mobile ale fotoliului rulant.
- În cazul în care un pacient nu poate sta singur în poziția șezând pe cont propriu, fotoliul

rulant trebuie să fie echipat cu benzi de stabilizare suplimentare.

- Fotoliul rulant trebuie împins cu două mâini, dacă trebuie ridicate roțile din față, însoțitorul trebuie să împingă partea posterioară a cadrului cu un picior și să tragă mânerul.
- Toate activitățile, cum ar fi așezarea/scoaterea din fotoliul rulant, schimbarea poziției pacientului trebuie efectuate întotdeauna după blocarea frânelor.
- Un pacient într-un fotoliu rulant (chiar și cu frânele acționate) nu trebuie lăsat nesupravegheat pe rampe, pante etc.

SPECIFICAȚII

Lățime șezut – 43, 45, 51.5 cm (în funcție de model)

Lățime fotoliu rulant - 62 cm, 64.5 cm, 71.5 cm (în funcție de model)

Greutate ~ 18 kg

ACCESORII:

- cheie imbus

Greutate maximă utilizator: 120 kg.

Nr. lot /data producției: imprimate pe produs

Perioada de utilizare: 5 ani de la data fabricației.

Materiale: oțel, poliuretan, polietilenă, cauciuc.