

MANUAL DE UTILIZARE

Cârjă de antebraț

Cod produs: JMC-C 2040-2046



1. Caracteristici

Cârja de antebraț este fabricată dintr-un tub de aluminiu anodizat, prevăzută cu un mâner ergonomic și durabil, precum și cu un vârf din cauciuc de înaltă calitate. Forma sa ergonomică este concepută pentru a se potrivi corect unghiului cotului, permițând o distribuie uniformă a presiunii pe mâner.



Elemente ale cârjei:

- A. mâner
- B. manșetă
- C. reglare pe înălțime – știft de blocare
- D. vârf din cauciuc

2. Utilizare

Cârja de antebraț este un dispozitiv auxiliar utilizat pentru a mări suprafața de sprijin în cazul pacienților cu mobilitate redusă. Este recomandată persoanelor care au nevoie de ajutor și sprijin la mers și poate fi utilizată pentru reeducarea mersului, ca ajutor în menținerea echilibrului după traumatisme ale membrelor inferioare sau ale trunchiului.

Contraindicații: tulburări de coordonare și echilibru, modificări reumatice avansate, leziuni sau disfuncții ale membrelor superioare care pot împiedica utilizatorul să se sprijine pe cârjă.

3. Reglare

Pentru a regla cârja, apăsați știftul metalic și selectați poziția corespunzătoare a tubului interior.

Blocați tuburile în poziție folosind știftul metalic. **Cârja este reglabilă în trepte de 2,5 cm.**

- Pentru a seta lungimea corectă a cârjei, stați drept și îndoiți membrul superior în articulația cotului la un unghi de aproximativ 20°.

- Cârja trebuie reglată individual pentru fiecare utilizator, astfel încât mânerul să fie la nivelul articulației șoldului, iar manșeta la înălțimea părții superioare a antebrațului.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că cârja este stabilă și că știftul de blocare iese complet prin orificiul de reglare.
- Se recomandă utilizarea a două cârje simultan.

NOTĂ! În caz de neclarități privind tehnica de deplasare cu ajutorul cârjelor, consultați o persoană cu cunoștințe sau calificări adecvate.

4. Date tehnice

Tub	aluminiu anodizat
Reglaj pe înălțime	94-116 cm
Height from the ground to mâner	67-89 cm
Sarcină maximă admisă	115 kg
Greutate	0,55 kg
Culori	JMC-C 2040 – alb-argintiu JMC-C 2041 – roz-argintiu JMC-C 2042 – albastru-argintiu JMC-C 2043 – roz JMC-C 2044 – verde JMC-C 2045 – albastru JMC-C 2046 – roz deschis

5. Note

Timago International Group nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, nerespectarea normelor de siguranță sau folosirea incorectă.

6. Curățare și întreținere

- Curățați cârja folosind doar apă și detergenți blânzi, apoi uscați-o complet.
- **Nu utilizați:** detergenți puternici, agenți abrazivi, înălbitor, benzină sau solvenți (pot deteriora cadrul, pot produce defecte vizibile și, în consecință, pierderea drepturilor de garanție).

- Se recomandă verificarea periodică a vârfului din cauciuc. Înlocuiți imediat vârful uzat.

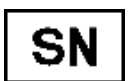
7. Condiții de depozitare și transport

Produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui, apă sau umezeală.

8. Informații despre garanție

Toate produsele distribuite de compania noastră sunt acoperite de garanție. Condițiile de garanție sunt descrise în certificatul de garanție disponibil pe site-ul nostru. Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. Notă: Pentru a beneficia de garanție, păstrați dovada achiziției (bon sau factură).

9. Etichete

	Număr de referință		Producător
	Număr LOT		Cod UDI
	Număr de serie		Dispozitiv medical
	Notă		Vă rugăm să citiți instrucțiunile
	Producătorul a verificat conformitatea cu cerințele esențiale pentru dispozitive medicale.		

Gama completă de produse este disponibilă la distribuitorii noștri. Aflați mai multe la: www.timago.com. Vă mulțumim că ați ales Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2025(I)