

ICON 60

Vario S

**Scaun cu roțile manual
pentru reabilitare activă**



REHASENSE



Fotografia de mai sus prezintă un exemplu de scaun cu roțile și componentele sale de bază cu amplasarea lor. Scaunul și componentele sale pot, în funcție de versiunea aleasă, să difere de cele prezentate mai sus, dar denumirile și amplasarea acestora rămân neschimbate.

CUPRINS

1. Informații introductive
2. Scop, indicații și contraindicații
3. Reguli de utilizare și recomandări de siguranță
4. Descrierea produsului
5. Funcționarea scaunului cu roțile
6. Curățarea și dezinfecția
7. Service și întreținere
8. Transport și depozitare
9. Reutilizare
10. Reciclare și depozitare
11. Condiții de garanție
12. Etichetă
13. Instalarea și ajustările scaunului cu roțile
14. Datele de contact ale distribuitorului/ producătorului

1. Informații introductive

Stimate utilizator,

Vă mulțumim că ați ales scaunul nostru cu roțile **ICON 60**. Suntem încrezători că calitatea, durabilitatea și designul scaunului nu vă va dezamăgi așteptările. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin o descriere a echipamentului medical și instrucțiuni importante pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a produsului. Înainte de utilizare citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Este deosebit de important să vă familiarizați cu cerințele de siguranță și să le respectați.

REHASENSE® își îmbunătățește constant produsele și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și caracteristicile produselor fără o notificare prealabilă.

Scaunul cu roțile **ICON 60** nu poate fi utilizat ca scaun pentru un vehicul în mișcare (cum ar fi autoturisme, autobuze, trenuri, metrouri, etc.). Pentru informații mai detaliate, consultați secțiunea „Recomandări privind transportul”.

Vă rugăm să adresați orice întrebări distribuitorului sau direct **REHASENSE®**. Datele de contact pot fi găsite pe ultima pagină a manualului de utilizare.

2. Scop, indicații și contraindicații

Scop: Scaunul cu roțile manual este un echipament medical indicat pentru utilizarea de către persoanele cu mobilitate redusă care nu pot sta în picioare, merge și/sau ședează fără ajutor. Acesta este conceput pentru a transporta și a muta persoane cu dizabilități în poziție așezată. Utilizatorii se pot deplasa cu scaunul cu roțile independent sau cu ajutorul unui asistent. Scaunul cu roțile poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior, pe diferite suprafețe (asfalt, beton, pietre și pietriș) în condiții meteorologice bune. Orice altă utilizare este interzisă.

Indicații: dispozitivul este indicat pentru persoanele care (din cauza unei game largi de posibile probleme de sănătate) nu pot sta în picioare și/sau merge și, prin urmare, au nevoie de un echipament de transport pentru a-și îndeplini unele sau toate sarcinile zilnice.

Contraindicații: scaunul cu roțile nu trebuie utilizat de persoanele cu paralizie care împiedică stabilizarea trunchiului. Aceste persoane au nevoie de scaune cu roțile speciale, concepute pentru a oferi un suport stabil suplimentar pentru corpul utilizatorului. Necesitatea și posibilitatea de a utiliza scaunul cu roțile ICON trebuie întotdeauna luate în considerare în conformitate cu recomandările medicului sau fizioterapeutului. Scaunul cu roțile manual este un dispozitiv medical indicat pentru utilizarea de către persoanele cu mobilitate redusă care nu pot sta în picioare și merge.

Informații suplimentare

Scaunul cu roțile **ICON 60** a fost testat și îndeplinește următoarele standarde europene: PN-EN 12182; PN-EN 12183; PN-EN 1021-1; PN-ISO 7176-1,3,5,7,8,15 și PN-ISO 7176-19 (pentru un scaun cu roțile echipat cu echipament opțional pentru montarea cârligelor).

Acesta poartă marcajul CE și îndeplinește obiectivele Regulamentului 2017/745. Dacă este utilizat corect, scaunul cu roțile, asigură o funcționare fără probleme timp de mulți ani.

3. Reguli de utilizare și recomandări de siguranță

- Sarcina maximă a scaunului cu roțile Icon 60 nu trebuie să depășească 120 kg.
- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a scaunului cu roțile sau de utilizarea care nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută.
- Utilizați scaunul cu roțile numai în stare bună de funcționare.
- Nu efectuați nicio modificare neautorizată a construcției scaunului fără acordul scris al producătorului.
- Atunci când reglați scaunul cu roțile, aveți grijă să nu vă prindeți degetele sau alte părți ale corpului între cele două părți mobile ale scaunului.
- Asigurați-vă că toate cele 4 roți intră ÎNTOTDEAUNA în contact cu solul în timpul utilizării. Acest lucru va asigura un echilibru adecvat și va preveni accidentele. Excepția este atunci când utilizatorii avansați (de exemplu, cei care practică echilibristica) folosesc scaunul cu roțile.
- Frânele de mână trebuie să fie trase atunci când scaunul cu roțile este staționar
- Dacă găsiți defecte sau erori, contactați imediat vânzătorul.

- Trebuie respectate toate recomandările și avertismentele producătorului.
- Scaunul cu roțile ar trebui să fie utilizat numai pe suprafețe stabile.
- - Utilizarea unui scaun cu roțile și expunerea acestuia la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp pot duce la arsuri ale pielii
- Nu se recomandă utilizarea scaunului cu roțile pe plajă, în noroi sau în condiții meteo extreme.
- Persoana care asistă o persoană cu dizabilități care utilizează un scaun cu roțile trebuie să fie pe deplin aptă și sănătoasă.
- Nu demontați singur piesele și accesoriile scaunului. Acest lucru poate afecta stabilitatea scaunului cu roțile
- Evitați să lăsați scaunul aproape de surse de căldură și flăcări deschise (focuri de tabără, aragazuri). De asemenea, nu este recomandat fumatul în timpul utilizării, deoarece scaunul nu este rezistent la foc.

Trebuie să atrageți atenția asupra marcajelor atașate:



Designul scaunului constă dintr-un număr de elemente mobile, astfel încât parametrul scaunului corespunzător să poată fi selectat și ajustat. Prin urmare, trebuie să se acorde o atenție deosebită degetelor și altor părți ale corpului la desfășurarea, plierea, reglarea înălțimii, lățimii corecte sau schimbarea roților. Există riscul de tăiere sau încleștare a unor părți ale corpului.

ÎN CAZUL UNUI INCIDENT GRAV ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI, SUNAȚI VÂNZĂTORUL SAU CONTACTAȚI DIRECT PRODUCĂTORUL REHASENSE (detalii de contact la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare). Trebuie luate măsuri imediate în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale din 5 aprilie 2017

4. Descrierea produsului

Scaunul cu roțile este construit în principal din componente din aluminiu, acoperite cu pulbere și rezistente la coroziune. Pentru a efectua unele dintre operațiunile de reglare, sunt necesare unelte general disponibile, cum ar fi chei imbus, chei plate, chei reglabile sau chei tubulare, șurubelniță etc.

Datorită designului său pliabil, scaunul cu roțile oferă confort în timpul transportului și depozitării. Este ușor de condus și extrem de ușor de manevrat.

Acesta este livrat cu elemente care trebuie asamblate, într-o cutie de carton.

Cu echipamentul standard pentru scaunul cu roțile activ, ambalajul include:

- cadru principal cu spătar și scaun tapițat pliabil, două protecții laterale, frâne de parcare, două furci de torsiune reglabile cu roți frontale autopropulsate și un suport pentru picioare.
- două roți motrice cu două axe cu eliberare rapidă,
- perna scaunului,
- instrucțiuni de utilizare.

Setul de accesorii furnizate depinde de specificația comandată.

Scaunul ICON 60 este format din:



Fotografia de mai sus prezintă un exemplu de scaun cu roțile și componentele sale de bază cu locul lor. Scaunul și componentele sale pot, în funcție de versiunea aleasă, să difere de cele prezentate mai sus, dar denumirile și amplasarea acestora rămân neschimbate.


Echipament suplimentar:

În funcție de versiune, scaunul cu roțile poate fi echipat cu mai multe tipuri diferite de roți față autopropulsate și roți spate motrice, furci față cu suspensie (Jazz Fork), suport pentru picioare întărit pentru atașamentul Trackwheel, roți anti-răsturnare, mânere de împingere pliabile.

Descrierea asamblării scaunului după despachetare:

- Primul pas este să verificați dacă toate componentele scaunului sunt conforme cu specificațiile alese și se află în ambalaj. În cazul în care lipsesc articole, acestea trebuie raportate imediat furnizorului dumneavoastră.
- Elementele demontate ale scaunului, cum ar fi roțile din spate, cotierele și echipamentele suplimentare, trebuie montate pe scaun conform instrucțiunilor din capitolele referitoare la componentele specifice din prezentul manual.

Plierea și desfășurarea scaunului cu roțile:

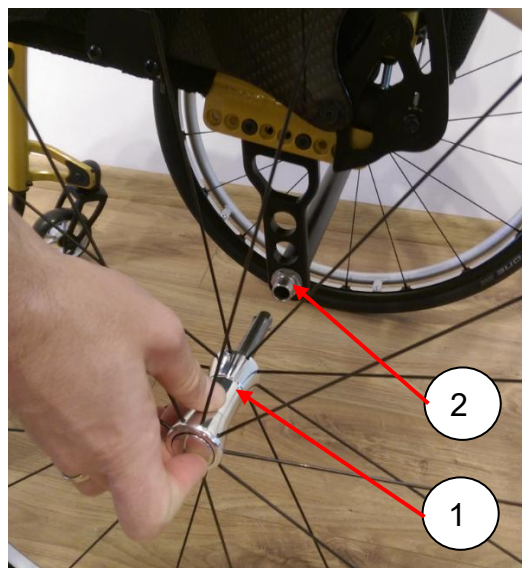


Scaunul cu roțile este livrat pre-asamblat. Pentru a începe să utilizați scaunul cu roțile, trebuie montate roțile motoare din spate și perna scaunului.

Desfășurarea: Treceți axele cu acțiune rapidă prin orificiile pentru rulmenți din roțile motrice (1) și apoi montați roțile cu axele în orificiile de montaj de pe ambele părți ale scaunului (2), astfel încât coardele să fie pe partea exterioară a scaunului cu roțile. Blocați frânele de pe ambele părți ale scaunului cu roțile pe roțile motrice (3), trageți în jos și țineți cablul mecanismului spătarului (4) în timp ce desfășurați spătarul (5) într-o poziție verticală. Fixați perna pe scaun (6).

Plierea: este activitatea analoagă opusă activității de desfășurare.


Recomandare: Apăsarea spătarului împotriva scaunului atunci când este desfăcut face ca mecanismul de blocare să funcționeze liber.

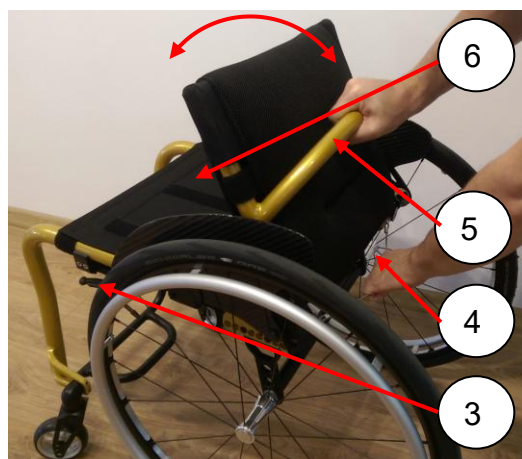

5. Funcționarea scaunului cu roțile

Ridicarea scaunului

La mutarea scaunului cu roțile (urcarea sau coborârea scărilor), scaunul cu roțile încărcat trebuie ridicat numai prin apucarea cadrului scaunului cu roțile (1) și a barei transversale a spătarului (2), după cum se arată în următoarea imagine:

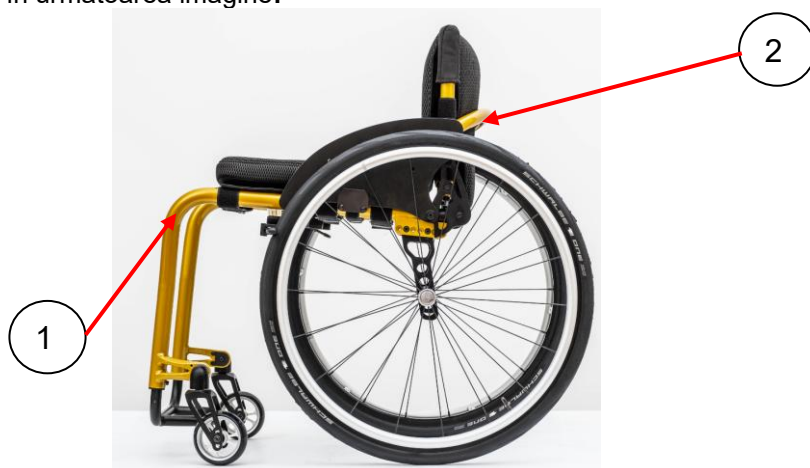

ATENȚIE! Este interzisă deplasarea scaunului încărcat cu ajutorul roților motrice, suporturilor pentru picioare, roților din față, protecțiilor laterale sau mânerelor rabatabile (opționale).

Tehnici de mutare a utilizatorului în și din scaunul cu rotile

Predarea tehnicilor de deplasare a pasagerului trebuie să aibă loc sub supravegherea atentă a personalului calificat. Mai jos sunt prezentate recomandările noastre.



Mutarea utilizatorului din scaunul cu rotile în pat

Utilizatorul trebuie să fie orientat lateral față de pat, indiferent dacă o persoană suplimentară îl asistă sau nu. Aproiați-vă cu scaunul cu rotile cât mai aproape posibil de pat și asigurați-vă că roțile pivotante din față sunt orientate în față. Aplicați frâna, ridicați cotiera / suportul lateral de pe partea scaunului cu rotile de pe care va avea loc transferul către pat



Mutarea utilizatorului de la pat în scaunul cu rotile

Utilizatorul trebuie să fie orientat lateral față de pat, indiferent dacă o persoană suplimentară îl asistă sau nu. Aproiați-vă cu scaunul cu rotile cât mai aproape posibil de pat și asigurați-vă că roțile pivotante din față sunt orientate în față. Acționați frâna, ridicați suportul pentru picioare. Nu vă urcați pe suportul pentru picioare, deoarece acest lucru poate duce la răsturnarea scaunului. Îngrijitorii trebuie să folosească în principal forța musculară a brațelor și picioarelor pentru a muta pasagerul, fără a se apleca excesiv sau a forța spatele.

Distribuția corectă a greutății este un element esențial în utilizarea corectă a scaunului. Funcționarea corectă a scaunului cu rotile este influențată nu numai de greutate, ci și de structura corpului, de poziția persoanei așezate în scaunul cu rotile și de poziția roților din spate ale scaunului cu rotile. Cu cât proporția greutății persoanei transportate se sprijină mai mult pe roțile din spate ale scaunului cu rotile, cu atât acesta este mai ușor de condus. Cu cât proporția greutății persoanei transportate se sprijină mai mult pe roțile din față, cu atât este mai dificilă conducerea scaunului cu rotile.


ATENȚIONARE! Îngrijitorul trebuie să se asigure că frâna este întotdeauna trasă înainte de a se îndepărta de scaunul cu rotile în care este așezat utilizatorul.

ATENȚIONARE! Asigurați-vă că roțile pivotante din față sunt întotdeauna orientate înainte atunci când scaunul cu rotile nu este în mișcare, pentru a spori contactul cu solul.

Vă recomandăm ca tehnicile enumerate mai jos, care sunt efectuate de către utilizator, să fie utilizate numai de către utilizatori experimentați de scaune cu rotile.

Rampă pentru bordură/obstacol

Utilizatorul se apropie de o bordură/obstacol

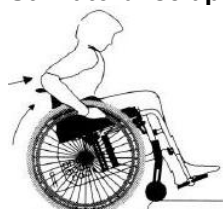

Conduceți scaunul cu rotile aproape de prag. Echilibrați scaunul cu rotile prin ridicarea roților din față la înălțimea necesară în funcție de înălțimea bordurii/obstacolului. Urcați cu roțile din spate până la bordură, astfel încât să lăsați roțile din față pe bordură/obstacol. Schimbați greutatea corpului înainte în timp ce conduceți roțile din spate pentru a le

trece peste obstacol.

ATENȚIE! Primele încercări trebuie făcute numai cu ajutorul unei persoane instruite.

ATENȚIE! Posibilitatea de înclinare pe spate.

Îngrijitorul și utilizatorul se apropie de bordură/obstacol



Îngrijitorul înclină scaunul cu roțile în spate apăsând cu piciorul pe țeava orizontală inferioară a cadrului (echipare opțională) și folosind mânerul de împingere (echipare opțională) pentru a manevra scaunul cu roțile astfel încât roțile din față să se sprijine de bordură. Îngrijitorul împinge apoi roțile din spate pe bordură/obstacol.

ATENȚIE! Trebuie să aveți grijă atunci când coborâți roțile din față și împingeți roțile motrice într-un obstacol. Este posibilă pierderea stabilității persoanei transportate, ceea ce duce la răsturnarea acesteia în direcția de deplasare.

Utilizatorul se apropie de un obstacol cu spatele



ATENȚIE! Tehnica menționată va funcționa numai cu un prag scăzut și dacă suporturile pentru picioare nu ating solul. Conduceți cu spatele spre obstacol până când roțile ating obstacolul. Mutați greutatea corpului înainte. Împingeți roțile înapoi în timp ce vă înclinați simultan în spate. Trageți roțile din față pe obstacol.

Asistentul și utilizatorul se apropie de un obstacol cu spatele



Conduceți cu spatele spre obstacol până când roțile ating obstacolul. Înclinați scaunul cu roțile înapoi prin ridicarea roților din față, folosind tubul orizontal (accesoriu opțional) și bara transversală a spătarului/ bara de ghidare. Trageți scaunul cu roțile înapoi până când roțile din față se pot sprijini la înălțimea bordurii/obstacolului. Apoi, coborâți cu atenție roțile din față pe bază.

ATENȚIE! Aveți grijă când coborâți roțile din față. Este posibilă pierderea stabilității persoanei transportate.

Coborâre de pe prag

Utilizatorul care coboară cu partea din față de pe bordură/obstacol



Conduceți scaunul cu roțile până la margine. Echilibrați scaunul. Apropiați-vă încet de bordură/obstacol. Trebuie să simțiți momentul în care treceți peste obstacol și cădeți de pe el. Întreaga manevră trebuie să fie efectuată în echilibru. Coborâți încet roțile din față la sol.

Îngrijitorul și utilizatorul coboară de pe bordură/obstacol



Înclinați scaunul cu roțile spre spate folosind tubul orizontal (accesoriu opțional), permițând ridicarea roților din față de la sol. Coborâți încet de pe obstacol coborând roțile din față pe sol.

ATENȚIE! Aveți grijă când coborâți roțile din față. Este posibilă pierderea stabilității persoanei transportate.

Utilizatorul conduce cu spatele pe o bordură/obstacol



ATENȚIE! Vă sfătuim să nu utilizați această metodă dacă înălțimea obstacolului este mai mare de 10 cm.

Apropiați scaunul până la margine, cât mai aproape posibil. Aplecați-vă în față. Rotiți roțile din spate în afara pragului. Mutați greutatea corpului pe roțile din spate. Coborâți de pe prag.

ATENȚIE! Această operațiune poate fi periculoasă; ea poate duce la răsturnarea scaunului cu roțile.

Îngrijitorul și utilizatorul coboară de pe bordură/obstacol în marșarier



Conduceți scaunul înapoi spre obstacol, cât mai aproape posibil de margine. Coborâți foarte încet în timp ce înclinați scaunul pe roțile în spate, până când roțile din față sunt în afara drumului. Coborâți încet scaunul pe roțile din față.

ATENȚIE! Aveți grijă când coborâți roțile din față. Este posibilă pierderea stabilității persoanei transportate.

Urcarea pe pante

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos atunci când conduceți pe pante:

- Evitați schimbările de direcție
- Încercați să vă deplasați în linie dreaptă. Fără să vă întoarceți în lateral. Oprirea cu scaunul întors pe o parte poate cauza răsturnarea acestuia,
- Nu ezitați să cereți ajutor pentru a evita riscurile inutile.

- Când urcați o pantă, aplecați-vă înainte pentru a muta centrul de greutate în față, ceea ce va face scaunul mai stabil.
- Când conduceți la vale, aplecați-vă pe spate pentru a muta centrul de greutate în spate, ceea ce va face scaunul cu roțile mai stabil.
- Controlați-vă viteza folosind tracțiunea roților din spate, nu folosiți frânele scaunului cu roțile.

Urcarea și coborârea scărilor

ATENȚIE! Cereți întotdeauna ajutorul altor persoane. Scaunul cu roțile trebuie să fie transportat de cel puțin 2 persoane care sunt apte și capabile să îndeplinească această sarcină.

ATENȚIE! Nu folosiți niciodată scările rulante într-un scaun cu roțile, nici singur, nici cu ajutorul altei persoane.

Urcarea scărilor:



Apropiati scaunul de scări astfel încât roțile din spate să atingă prima treaptă. Înclinați scaunul cu roțile înapoi prin apucarea cadrului scaunului cu roțile și a barei transversale a spătarului scaunului cu roțile. Începeți să ridicați scaunul cu roțile treaptă cu treaptă.

ATENȚIE! Nu ridicați niciodată scaunul cu roțile apucându-l de mânerle pliabile.

Ridicați scaunul încet în sus, pas cu pas. După ultimul pas, trageți scaunul înapoi până când roțile din față sunt coborâte la podea. Participanții trebuie să utilizeze în principal forța musculară a picioarelor pentru a transporta scaunul cu roțile, evitând îndoirea excesivă și slăbirea mușchilor spatelui.

Coborârea scărilor:

Coborârea scaunului cu roțile pe scări trebuie să se facă în mod analog cu ridicarea scaunului cu roțile pe scări.

Transportul într-un autovehicul


ATENȚIE: Dacă scaunul cu roțile este fixat în conformitate cu următoarele orientări, un pasager poate fi rănit grav în cazul unei opriri bruște sau al unei coliziuni. Este recomandabil să transferați pasagerul pe un scaun de vehicul.

Scaunul cu roțile ICON60 a trecut cu succes testele de impact în conformitate cu standardul internațional ISO 7176-19. Pentru a transporta un pasager în scaunul cu roțile Icon 60, vehiculul trebuie să aibă un sistem de siguranță care respectă standardul ISO 10542-1, iar scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu echipamentul opțional de montare - cârlige. Versiunea scaunului cu roțile este configurată pe baza comenzii plasate. Prin selectarea opțiunilor pe formularul de comandă, clientul specifică, de asemenea, dacă scaunul cu roțile urmează să fie echipat cu echipament suplimentar pentru montarea cârligelor. Este posibil să achiziționați kitul și să îl asamblați singur conform instrucțiunilor de mai jos.

Kitul de asamblare a cârligelor este format din:

- (1) cleme (4 buc.),
- (2) conectoare (2 buc.),
- (3) șuruburi (4 buc.),
- (4) piulițe (4 buc.),

- (5) șaibe simple (4 buc.),
- (6) șaibe speciale (4 buc.),]
- (7) autocolante (4 buc.),

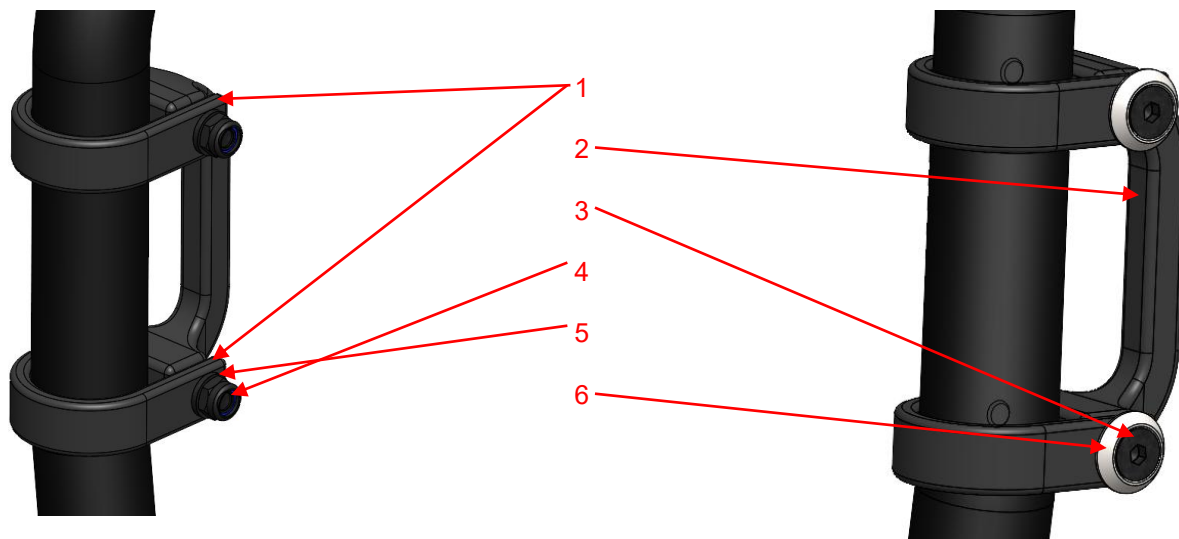


Instalarea de echipamente suplimentare pentru a permite transportul în scaunul cu roțile:

- preinstalați suporturile prin înfășurarea clemelor (1) în jurul tubului cadrului și fixați-le pe conectoare (2) folosind șuruburile, piulițele și șaibe (3, 4, 5, 6), după cum se arată mai sus,
- înșurubați clemele (1) la o distanță de 19 cm, după cum se indică în diagrama de mai jos, folosind o cheie imbus și o cheie hexagonală; conectorul (2) trebuie să fie orientat spre spate în raport cu direcția de deplasare; cuplu de strângere a șuruburilor 10 Nm,
- lipiți autocolantele (7) care indică poziția butucilor pe partea din față a cadrului și pe axul roților mari, după cum se arată mai jos.

ATENȚIE: Este interzisă utilizarea altor componente decât cele incluse în kit (înlocuitori, echivalenți).



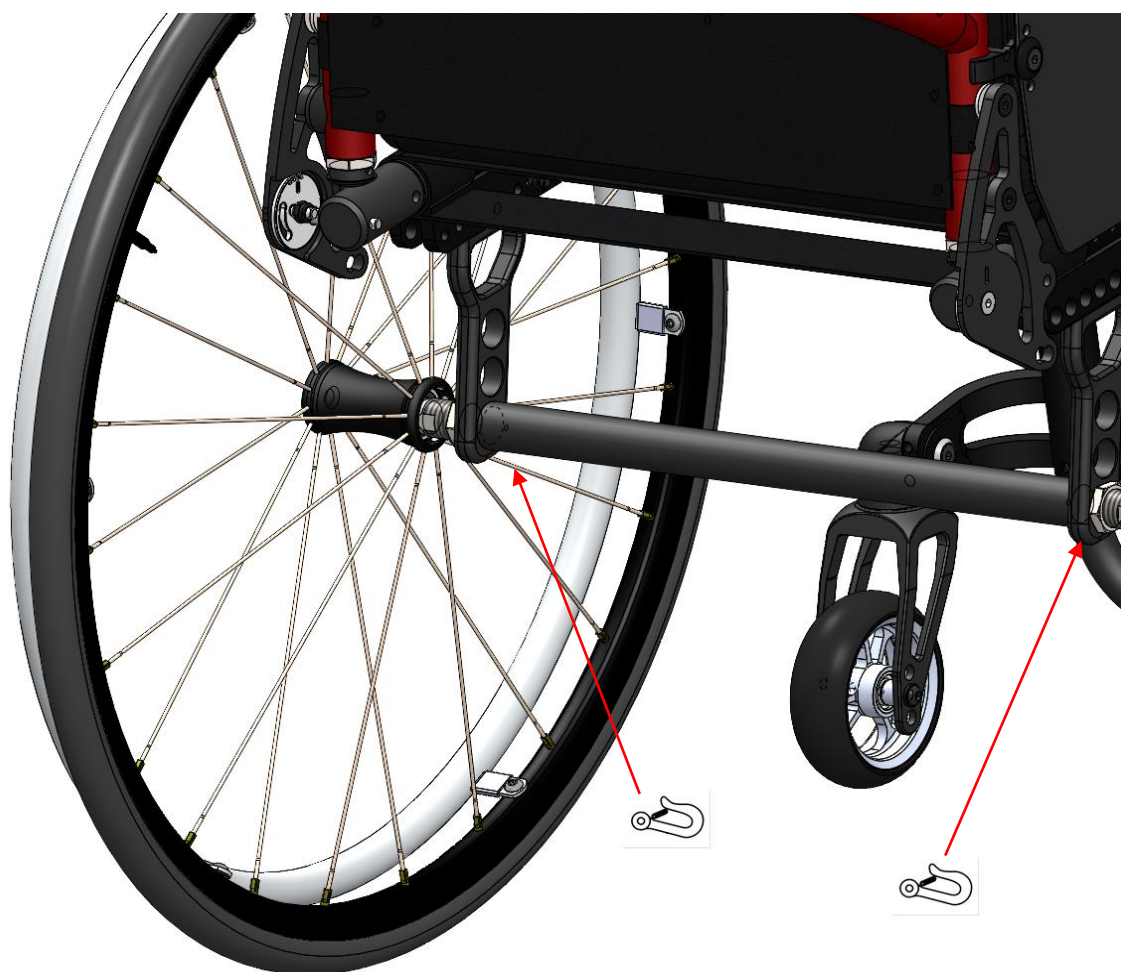

Scaunul cu roțile trebuie fixat cu un sistem de reținere în 4 puncte. Utilizatorul trebuie să fie fixat cu un sistem de siguranță în 3 puncte.

IMPORTANT: utilizatorul trebuie să cântărească cel puțin 22 kg.

IMPORTANT: Pentru a respecta reglementările în vigoare, trebuie utilizată numai o curea de umăr atașată la partea laterală a vehiculului pentru a fixa pasagerul în mod corespunzător.

IMPORTANT: Nu utilizați niciodată un scaun cu roțile ca scaun într-un vehicul care a fost implicat într-o coliziune.

IMPORTANT: Înainte de a fixa scaunul cu roțile în vehicul, verificați dacă toate șuruburile scaunului cu roțile sunt strânse și dacă starea tehnică a scaunului cu roțile este satisfăcătoare. Este interzisă utilizarea unui scaun cu roțile care a fost implicat într-un accident rutier

Procedura:

- Așezați scaunul cu roțile și utilizatorul cu fața în direcția de deplasare. Blocați frânele scaunului cu roțile. Activați protecția la răsturnare (echipare opțională).

- Îndepărtați panourile laterale/apărătorile/îmbrăcămintea pentru a poziționa corect centura transversală. Așezați panourile laterale în portbagajul vehiculului.

IMPORTANT: Punctele de fixare pentru simbolurile centurii de siguranță sunt marcate cu simbolurile cârligelor de prindere.

- Treceți curelele frontale prin suporturile de montare dedicate, așa cum se arată în ilustrația de mai jos.


- Atașați centurile din față la sistemul de ghidare în conformitate cu recomandările producătorului centurilor de siguranță.

- Eliberați frânele de parcare și strângeți curelele din față, împingând scaunul cu roțile înapoi. Aplicați din nou frânele de parcare.


- Treceți curelele din spate prin axul roții din spate în punctele desemnate

- Atașați centurile din spate la sistemul de ghidare în conformitate cu recomandările producătorului centurilor de siguranță. Unghiul dintre ghidajele a=și curelele trebuie să fie de 40-45 de grade.


Atașați la
partea din față
a cadrului

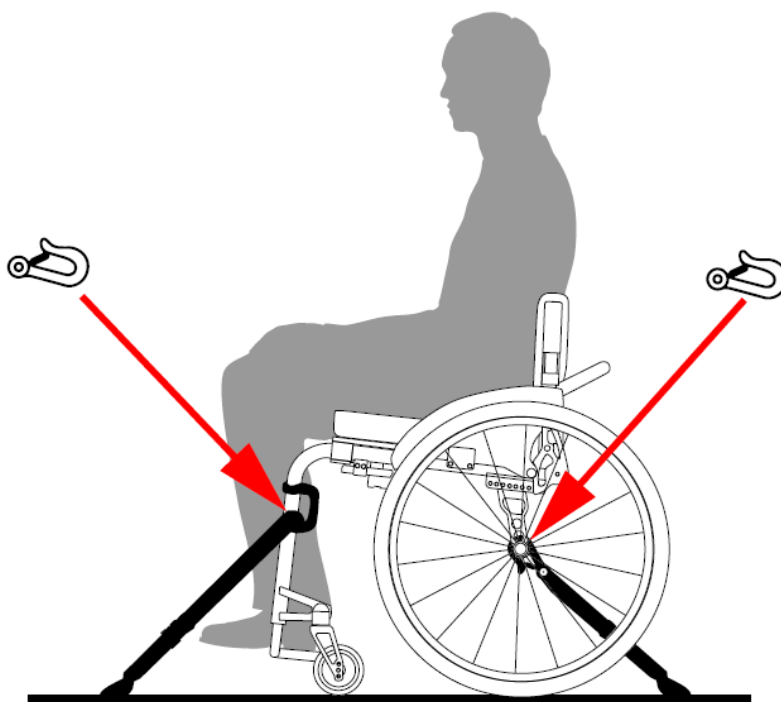



Atașați la
partea din
spate a
cadrului

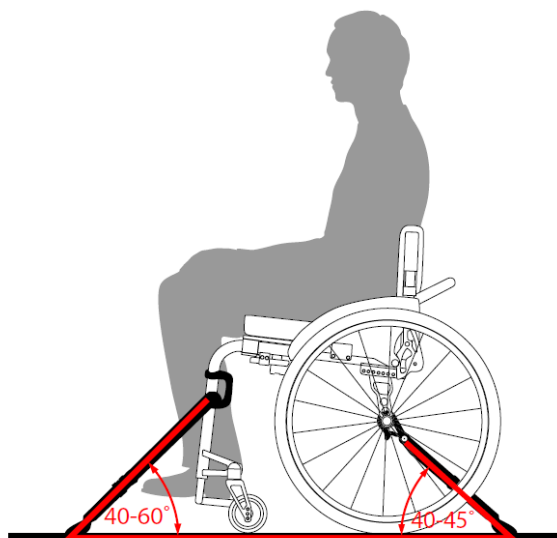


Montați sistemul de siguranță în 3 puncte pentru pasageri în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Centurile trebuie să se potrivească bine pe corpul purtătorului și nu trebuie să fie răsucite. Centura transversală trebuie să treacă pe pelvis, astfel încât unghiul centurii transversale să fie între 30-75 de grade față de corp.

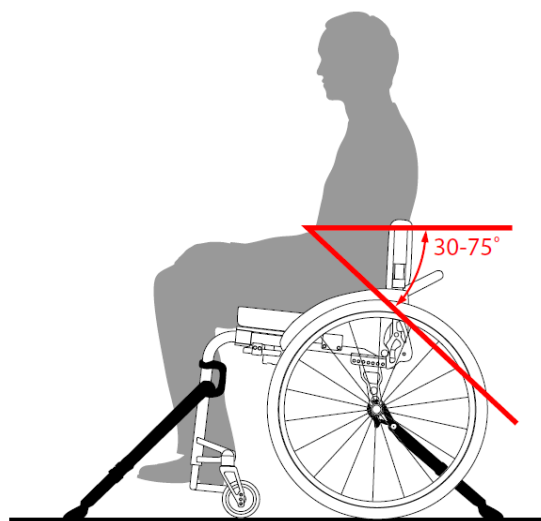

Centura de umăr trebuie să treacă prin mijlocul umerilor, iar centura de fixare trebuie reglată cât mai strâns posibil, menținând în același timp confortul utilizatorului. Exemple de aliniere corectă a centurii sunt prezentate în imaginile de mai jos.

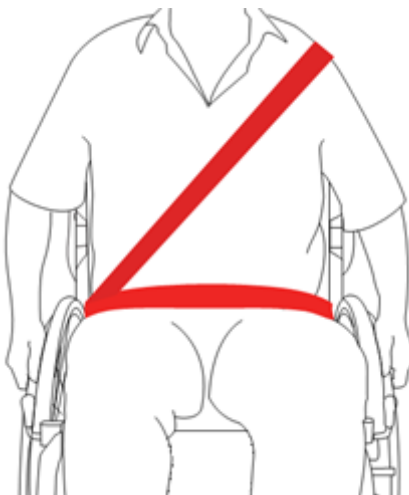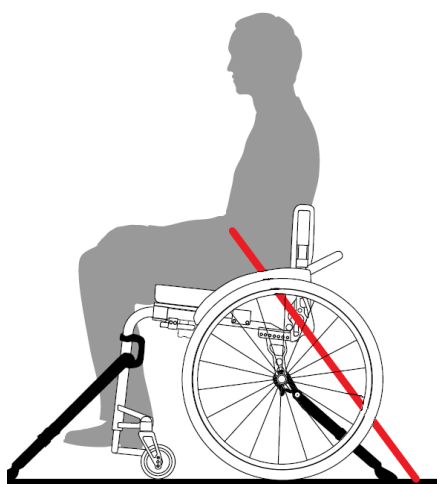

Între utilizatorul scaunului cu roțile și punctul de prindere al centurii nu trebuie să existe nicio parte a vehiculului, a scaunului cu roțile sau a scaunului auto. Exemple de fixare necorespunzătoare a centurilor sunt prezentate în imaginile de mai jos.

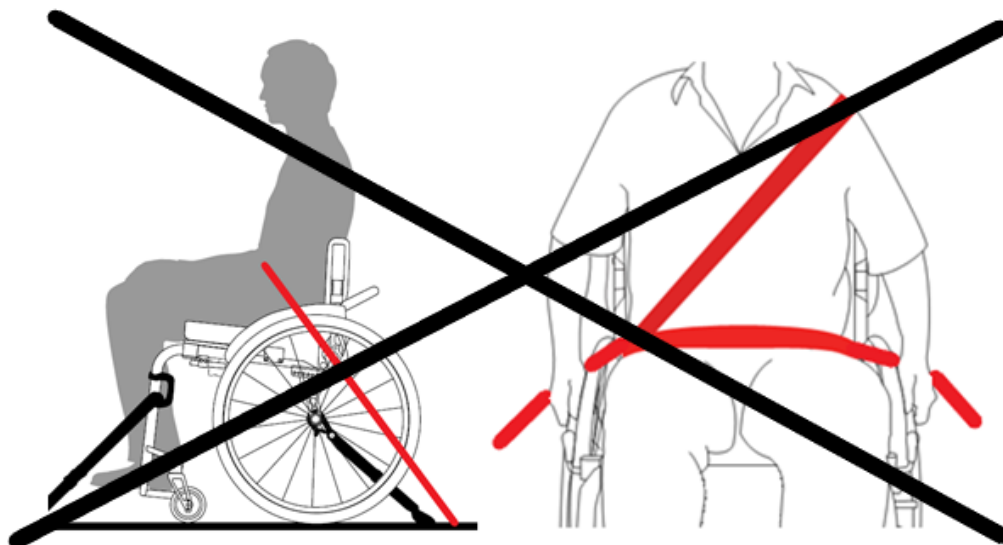

6. Curățarea și dezinfecția

Cadrul trebuie curățat cu o cârpă umedă sau, alternativ, cu un detergent moale. Citiți informațiile specifice despre produs și utilizați numai detergenți din comerț care sunt adecvați pentru curățare și dezinfecție (fără solvenți sau materiale abrazive). Apoi, ștergeți cu o cârpă uscată. Cadrul trebuie inspectat în mod regulat pentru a depista eventualele deteriorări ale vopselei care pot prezenta semne de fisurare a cadrului. Dacă există deteriorări vizibile ale cadrului (fisuri, defecte de vopsea etc.), adresați-vă dealerului local pentru diagnosticare și service.

Scaunul și spătarul sunt realizate din nailon ranforsat foarte rezistent și țesătură tricotată respirabilă. Tapițeria scaunului poate fi îndepărtată cu ușurință prin detașarea elementelor de fixare velcro și scoaterea acestora din tuburile cadrului. Tapițeria scaunului și a spătarului poate fi spălată cu un burete și un detergent ușor sau spălată la mașină conform instrucțiunilor de pe pernă.

Numărul maxim de cicluri de spălare - 8 la temperatura indicată pe tapițerie. Nu se usucă la soare. Utilizați saci pentru spălare pentru a proteja materialul de deteriorarea cauzată de benzile velcro cusute.

Pentru dezinfecție, contactați vânzătorul, pentru a vă asigura că aceasta este efectuată de un personal calificat.

Cu toate acestea, pentru uz individual, recomandăm utilizarea dezinfectanților disponibili în general fără clor sau fenol. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dezinfectanților.

7. Service și întreținere

În ciuda construcției sale robuste și a utilizării de materiale rezistente, produsul este supus uzurii. Prin urmare, este recomandabil să se verifice produsul la intervale regulate. Pentru întreținerea de bază, este suficient un set de chei tubulare, o cheie reglabilă, o șurubelniță plată și o șurubelniță în cruce.

Următoarele elemente trebuie verificate în mod regulat

Verificați:		Frecvența
Presiunea în anvelope	Presiunea trebuie să fie în intervalul specificat de producătorul anvelopei. Presiunea corectă reduce rezistența la mișcare a scaunului cu roțile. Dacă este necesar, umflați la presiunea necesară.	1 lună
Starea benzii de rulare a anvelopelor	O anvelopă trebuie considerată inutilizabilă atunci când stratul de ranforsare a anvelopei (de exemplu, țesătura) se vede la suprafață. Starea bună a benzii de rulare previne imobilizarea bruscă a scaunului cu roțile. Înlocuiți anvelopa dacă este necesar.	1 lună
Tensionarea spițelor	Prinzând spița la jumătatea lungimii sale, verificați dacă spița este tensionată. Tensiunea corectă a spițelor permite roții să se rostogolească corect. Dacă este necesar, consultați un centru de	1 lună

	service.	
Verificați ca axele roților să fie curate	Scoateți axul din roată și îndepărtați orice impurități. Aplicați 2 picături de ulei pentru mașina de cusut. Acest lucru va permite montarea ușoară și fără probleme a axului în roată și a întregii roți în scaunul cu rotile.	1 lună
Starea suprafețelor de tracțiune	Verificați suprafața corzii pentru a depista fisuri, zgârieturi care ar putea duce la rănirea mâinii. Dacă acest lucru se întâmplă, contactați service-ul și înlocuiți corzile.	1 lună
Starea cadrului scaunului cu rotile/ a picioarelor/ a spătarului	Spălați cadrul scaunului cu rotile conform recomandărilor. Inspectați cadrul pentru a detecta fisuri și creștături vizibile. Dacă observați fisuri și creștături adânci, contactați imediat service-ul pentru a preveni fisurarea suplimentară a cadrului și imobilizarea bruscă a scaunului cu rotile.	1 săptămână
Funcționarea frânei	Verificați dacă componentele frânei prezintă joc. Verificați dacă frâna asigură o putere de frânare adecvată prin încercarea de a propulsa ușor roata din spate cu frâna acționată. Frâna nu trebuie să alunece pe banda de rulare a anvelopei, fiind în același timp ușor de deschis și închis. Funcționarea defectuoasă a frânelor poate duce la răsturnarea scaunului cu rotile.	1 săptămână
Starea roților din față cu furci	Îndepărtați toată murdăria. Verificați strângerea șuruburilor din axul roții. Verificați starea benzii de rulare a roții. Verificați dacă roțile se rotesc ușor (nu este nevoie de multă forță pentru a le pune în mișcare). Starea bună a ansamblului permite ca scaunul cu rotile să fie condus ușor, îmbunătățind manevrabilitatea. Pentru a rezolva orice defectiuni, contactați un centru de service.	1 săptămână
Conexiunile cu șurub	Verificați dacă șuruburile sunt strânse.	1 lună
Carcase laterale	Verificați dacă există crăpături vizibile și zgârieturi adânci pe carcase. Pentru a rezolva orice defectiuni, contactați un centru de service.	1 lună

Probleme frecvente și soluții

Dacă observați anomalii în funcționarea scaunului cu rotile, nu îl utilizați - trebuie să contactați punctul de vânzare local sau departamentul de service al furnizorului de scaune cu rotile. Producătorul nu garantează funcționarea corectă a scaunului cu rotile dacă sunt utilizate piese neoriginale.

Problemă	Motivul posibil	Ce trebuie să faceți?
Scaun înclinat pe o parte	● Una dintre roțile motrice poate fi deformată sau mai încărcată	● Umflați anvelopa (în conformitate cu indicațiile producătorului anvelopei) ● Verificați dacă scaunul este încărcat uniform
Scaunul este greu de împins	● Presiune joasă în anvelope ● Axele roților din față sunt murdare ● Prea multă greutate pe roțile din față. ● Rulmenții roților din față și/sau din spate uzați.	● Umflați anvelopa (în conformitate cu indicațiile producătorului anvelopei) ● Îndepărtați murdăria de pe roțile din față ● Echilibrați greutatea ● Verificați starea rulmenților verificând dacă se rotesc ușor - înlocuiți dacă este necesar.
Scaunul cu rotile și-a pierdut capacitatea de manevră	● Presiune joasă în anvelope ● Roțile din față sunt strânse prea mult ● Axele roților din față sunt murdare	● Umflați anvelopa (în conformitate cu indicațiile producătorului anvelopei) ● Verificați șuruburile din osie și slăbiți-le dacă este necesar ● Îndepărtați murdăria și curățați roțile din față.
Frânele nu funcționează corespunzător	● Presiune joasă în anvelope ● Slăbirea componentelor de frână ● Deplasarea frânei în raport cu cadrul	Umflați anvelopa (în conformitate cu indicațiile producătorului anvelopei) Verificați etanșeitățile componentelor frânei. Poziționați frâna în raport cu cadrul și roata astfel încât să nu existe alunecare între frână și banda de rulare a anvelopei atunci când frâna este închisă.
Dificultate în plierea și desfășurarea	● Tapițeria este prea comprimată	● Corectați tensiunea curelelor care susțin tapițeria. Scoateți perna scaunului.

scaunului	● Mecanismul de pliere a spătarului este murdar.	● Curățați cadrul.
Scaunul și-a pierdut stabilitatea	● Presiune joasă în anvelope ● Componentele scaunului nu sunt asamblate corect.	● Umflați anvelopa în conformitate cu indicațiile producătorului anvelopei ● Verificați dacă toate șuruburile de fixare sunt suficient de strânse.
Anvelopă perforată	● Posibilă perforare a unei camere de anvelopă ● Camere de aer și anvelope uzate.	● Contactați cel mai apropiat dealer de scaune cu roțile sau centru de service pentru biciclete pentru a repara sau înlocui camerele și anvelopele deteriorate

Pentru a rezolva orice defecțiuni, contactați un centru de service. Producătorul nu garantează utilizarea corectă a scaunului cu roțile în cazul în care reparațiile sunt efectuate folosind piese neoriginale sau de către un centru de service neautorizat.

ATENȚIE! Vă recomandăm să încredințați întreținerea scaunului dvs. cu roțile numai centrelor de service autorizate.

ATENȚIE! Reparațiile efectuate de centre de service nespecializate pot duce la pierderea garanției.

Centre de service autorizate

Pentru a afla care este cel mai apropiat centru de service autorizat, contactați vânzătorul sau producătorul echipamentului.

Transport și depozitare

Instrucțiuni referitoare la transport

Scaunul cu roțile ICON 60 este ușor de transportat. Acesta poate fi pliat și demontat pentru a reduce dimensiunea și greutatea.

ATENȚIE! Un scaun cu roțile nu este un scaun auto. Este interzis să stați într-un scaun cu roțile atunci când călătoriți în vehicule. Scaunul trebuie să fie pliat și fixat pentru transport.

Trimiterea scaunului cu roțile sau a componentelor acestuia la service

Dacă aveți nevoie de repararea scaunului, vă rugăm să contactați centrul de service sau magazinul de unde ați achiziționat scaunul.

Dacă reparația necesită trimiterea pieselor înapoi la centrul de service, acestea trebuie protejate corespunzător. În acest scop, se recomandă ca ambalajul original să fie păstrat și trimis la service de către compania de transport a producătorului scaunului.

ATENȚIE! Producătorul nu este responsabil pentru daunele de transport rezultate din ambalarea necorespunzătoare a scaunului sau a pieselor sale.

Depozitare

Depozitați echipamentul într-un loc uscat la temperaturi de peste 0°C. Scaunul poate fi pliat pentru a reduce spațiul necesar pentru depozitare. Roțile din spate pot fi, de asemenea, detașate pentru a economisi și mai mult spațiu. Temperaturile scăzute sau umiditatea pot deteriora anvelopele, țesăturile, axele, rulmenții și alte componente ale produsului. Pentru a proteja anvelopele de deformare pe o perioadă îndelungată de depozitare, este recomandabil să așezați scaunul pe cadru folosind suporturi. De asemenea, este recomandabil să acoperiți scaunul pentru a-l proteja de praf și murdărie.

9. Reutilizare

Pașii care trebuie urmați înainte de pregătirea scaunului cu roțile pentru un nou utilizator:

- evaluați starea vizuală și tehnică a scaunului cu roțile: verificați funcționarea tuturor mecanismelor și a intervalelor de reglare, verificați starea cadrului (fisuri, uzură),
- curățați după cum se recomandă în instrucțiuni,
- Dacă este necesar, înlocuiți componentele roților și/sau tapițeria cu unele noi,
- adaptarea, ajustarea la nevoile noului utilizator.

10. Reciclarea și eliminarea

Scaunul cu roțile trebuie eliminat în conformitate cu reglementările legale locale și naționale aplicabile. Contactați agenția locală de eliminare a deșeurilor sau distribuitorul autorizat pentru informații privind eliminarea corectă a ambalajelor, a componentelor metalice ale cadrului, a plasticului și a părților din țesătură.

11. Condiții de garanție

- Producătorul oferă o garanție de 24 luni de la data achiziției.
- În timpul perioadei de garanție, producătorul va înlocui gratuit toate componentele defecte cauzate de un defect de fabricație.
- Defectele rezultate din utilizarea normală a echipamentului nu fac obiectul reparațiilor de garanție. Acestea includ uzura anvelopelor, tapițeriei, spițelor, vopselei etc.
- De asemenea, toate defecțiunile mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare a scaunului cu roțile nu fac obiectul reparațiilor de garanție.
- Orice modificare structurală a scaunului va anula garanția.
- Dacă observați orice deteriorări trebuie să contactați imediat vânzătorul.

Responsabilitățile producătorului

- Garanția nu acoperă costurile de transport.
- Garanția nu acoperă daunele mecanice sau daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a scaunului.
- Garanția nu acoperă daunele cauzate de imposibilitatea de a utiliza produsul.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din nerespectarea recomandărilor și neînțelegerea instrucțiunilor de utilizare.

Modificări structurale și instalarea de elemente suplimentare

Această definiție se referă la orice scaun cu roțile care a fost modificat și care diferă de detaliile prezentate în acest manual sau dacă la produs sunt atașate componente suplimentare care nu sunt furnizate de producător. Dacă echipamentul a fost modificat în modul de mai sus de către utilizator fără o autorizație scrisă din partea producătorului, acesta nu este conform cu cerințele de bază CE și nu va fi acoperit de garanție.

În caz de îndoieli, vă rugăm să contactați producătorul.

12. Etichetă

Marcajul scaunului cu roțile – situat în partea de jos a cadrului



13. Configurarea și ajustările scaunului cu roțile

13.1. SISTEM DE SCAUNE CU ROTILE ACTIVE ICON 60

Sistemul de scaune cu roțile active ICON 60 include o gamă largă de scaune cu roțile de diferite dimensiuni (adâncime și lățime). Acesta are capacitatea de a regla unghiul scaunului, unghiul spătarului și unghiul furcii roții din față, precum și înălțimea și echilibrul scaunului, în funcție de nevoile utilizatorului. Seria ICON 60 are adâncimi reglabile ale cadrului scaunului. Acest lucru permite utilizatorului să ajusteze dimensiunile scaunului cu roțile pentru a

se potrivește cu abilitățile și nevoile sale.

SETĂRILE INCORECTE POT FACE SCAUNUL CU ROTILE INSTABIL ȘI POT PUNE ÎN PERICOL UTILIZATORUL. CONTACTAȚI ÎNTOTDEAUNA DEALERUL DACĂ SUNT NECESARE MODIFICĂRI.


13.1.1. ICON 60 Vario S

ICON 60 Vario S - este modelul de scaun cu roțile activ de bază. ICON 60 este fabricat în principal din aluminiu de înaltă calitate. Are mai multe setări pentru puntea din spate. În funcție de nivelul de activitate al utilizatorului, se pot selecta diferite grade de stabilitate în plan sagital (sau "tipsiness"). Unghiul furcii din față este reglabil, permițând o mare ajustabilitate a înălțimii și unghiurilor scaunului.

13.1.2 Ajustările cadrului

Designul cadrului permite ajustarea unghiului scaunului și a echilibrului scaunului cu roțile prin modificarea poziției axei spate în raport cu structura. Mutarea axei spate spre suportul pentru picioare va face ca scaunul cu roțile să fie adecvat pentru conducerea activă (o opțiune pentru utilizatorii avansați). Deplasarea axei din spate în direcția opusă va duce la un scaun cu roțile pasiv și stabil (pentru utilizatorii începători). Mutarea axei din spate în sus sau în jos modifică unghiul scaunului. Cadrul permite, de asemenea, modificarea adâncimii scaunului și a unghiului spătarului.


Reglarea echilibrului roților din spate (față - spate)

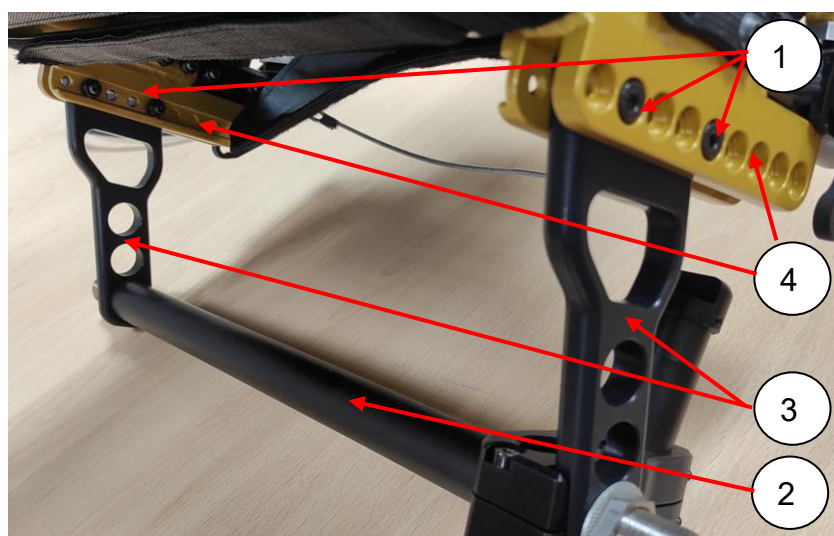



1. Scoateți roțile motrice din scaunul cu roțile,
2. Slăbiți șuruburile (1) de pe partea stângă și dreaptă a cadrului cu o cheie imbus,
3. Îndepărtați șuruburile, șabiele și piulițele (1),
4. Transferați axul (2) cu conectori (3) sub setul corespunzător de găuri (4),
5. Treceți șuruburile (1) prin orificii și înșurubați-le în piulițele cu fantă de pe partea stângă și dreaptă a scaunului cu roțile (5).



Reglarea adâncimii scaunului

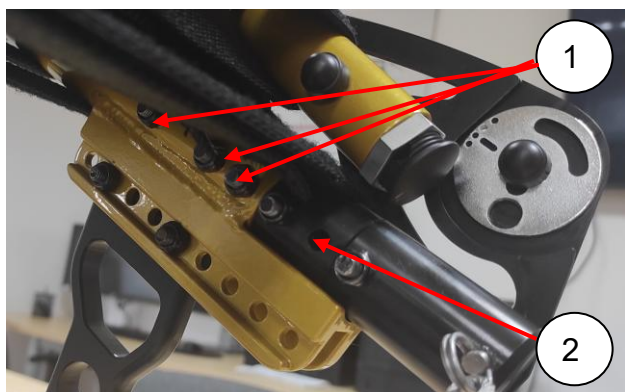


1. Îndepărtarea roții motrice.
2. Slăbiți și îndepărtați șuruburile și piulițele (1) de pe partea stângă și dreaptă a cadrului, folosind o cheie imbus și o cheie plată,
3. Scoateți adaptorul (2) din tubul cadrului,
4. Puneți distanțiere pe țevile adaptorului
5. Introduceți spătarul la lungimea corectă, astfel încât orificiile din cadru și adaptor să fie aliniate,
6. Introduceți șuruburile unul câte unul pe partea stângă și dreaptă a cadrului pentru a stabiliza poziția adaptorului (3)
7. Introduceți și strângeți șuruburile rămase,
8. Verificați dacă mecanismul de pliere a spătarului funcționează corect

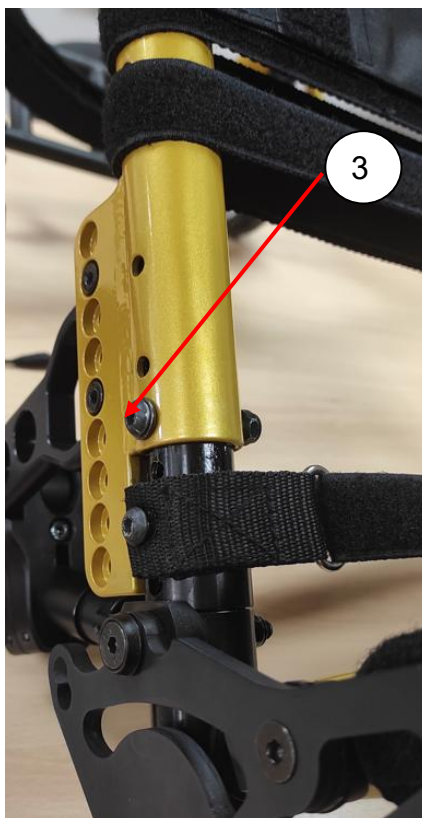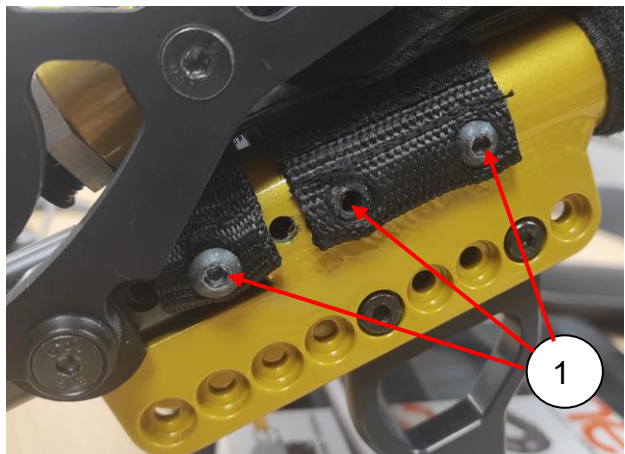


Reglarea roților din spate în sus și în jos

ATENȚIE! Vă recomandăm să ajustați poziția axului la un service.

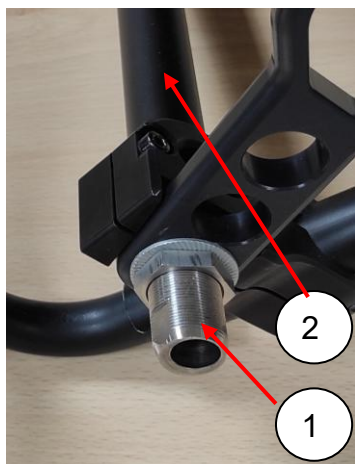


1. Scoateți roțile,
2. Prinzând partea plată cu o cheie, deșurubați bucșa (1),
3. Repetați operațiunea pe cealaltă parte a scaunului cu roțile,
4. Glisați axul din spate (2) pe setul corespunzător de găuri (3),
5. Înșurubați bucșa (1) în poziție cu șaiba (4).

ATENȚIE! Vârfurile plate ale manșonului (1) trebuie să fie perpendiculare pe planul solului, iar orificiul descentrat (5) trebuie să fie orientat în sus. Se recomandă ca roțile să fie deplasate în sus și în jos la un centru de service autorizat pentru a garanta geometria corectă a ansamblului.

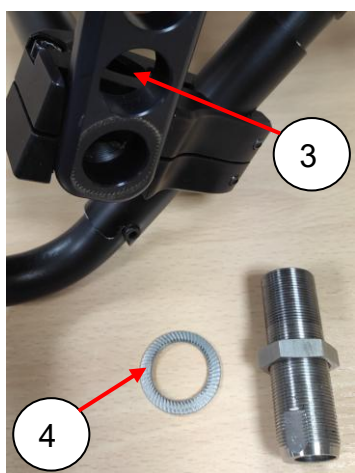

Spătar cu unghi reglabil


ATENȚIE! Vă recomandăm să reglați unghiul spătarului în service.

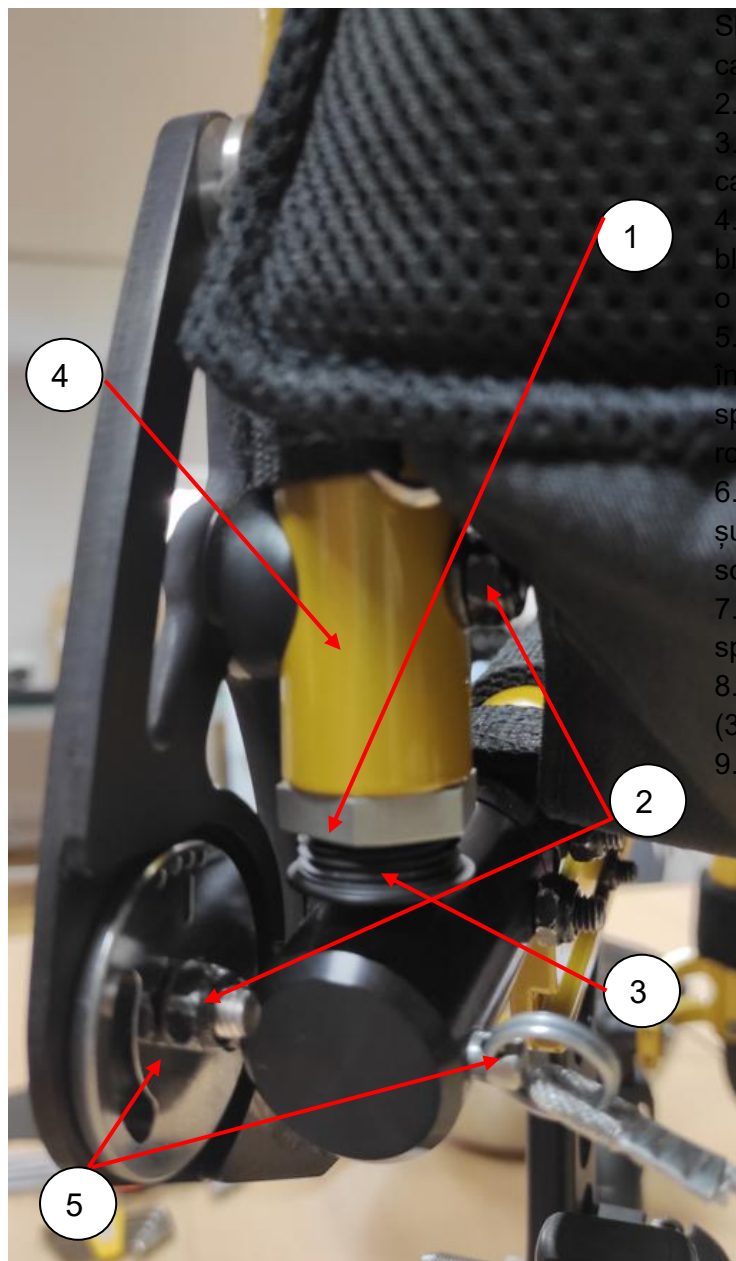

1. Slăbiți piulițele (1) cu o cheie pe ambele părți ale cadrului,
2. Slăbiți piulița (2a)
3. Introduceți/extrageți componenta (3) în tubul cadrului spătarului (4),
4. Cu spătarul desfășurat și cu mecanismul de blocare a spătarului angajat, slăbiți șurubul folosind o cheie plată și o cheie imbus (2b),
5. Rotiți întregul spătar înainte sau înapoi, încuietorile (6) se vor roti în raport cu mecanismul spătarului (5) pe ambele părți ale scaunului cu roțile,
6. Odată ce spătarul este în poziția țintă, strângeți șuruburile și piulițele de pe ambele părți ale scaunului cu roțile (2b),
7. Verificați dacă mecanismul de rabatare a spătarului (5) funcționează corect,
8. Rotiți piulița (1) pentru a poziționa componenta (3) astfel încât să atingă cadrul scaunului cu roțile,
9. Strângeți piulița (1) și (2a)

Spătar cu unghi reglabil

Reglarea înălțimii spătarului este posibilă numai dacă la plasarea comenzii este selectată varianta de spătar cu înălțime reglabilă. Pentru a ridica/coboși spătarul, utilizați o cheie imbus pentru a slăbi clemele (1) de pe părțile stângă și dreaptă ale spătarului, extindeți tubul spătarului (2) și strângeți din nou clemele.

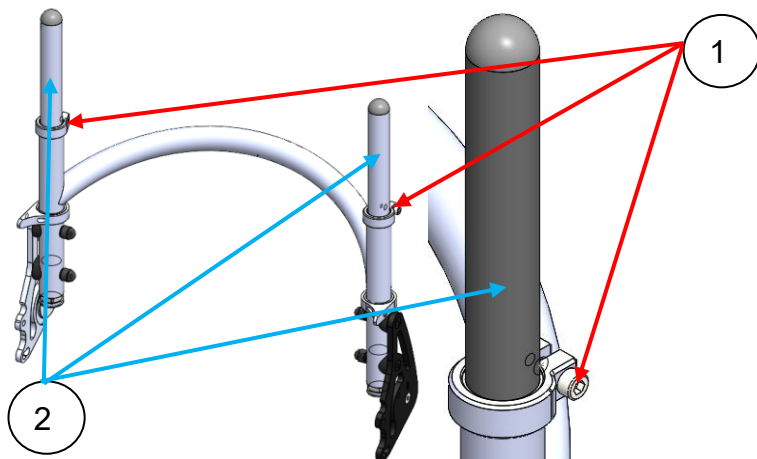

13.1.3 Roțile de tracțiune

Ansamblul roților de tracțiune este format dintr-o roată pneumatică de 24 de inci cu împingere și o axă cu eliberare rapidă. Aceste roți sunt utilizate pentru a pune scaunul cu roțile în mișcare.

În funcție de specificații, scaunul cu roțile poate fi echipat cu roți pneumatice de 24 inch:


1. DAYLITE
2. SKYLITE
3. TENSIO SPIRIT
4. HURRICANE
5. OFF ROAD BUDDY

Roțile sunt echipate standard cu jante de apucare (corzi) pentru a propulsa scaunul cu roțile de către utilizator. Există o gamă de corzi realizate din diferite tipuri de materiale:

1. Corzi din aluminiu argintiu sau negru,
2. Corzi de oțel,
3. Corzi din titan,
4. Corzi speciale pentru a facilita prinderea corzii cu disfuncții de prindere (de exemplu, tetraplegici).

În funcție de specificația aleasă, roțile scaunului cu roțile pot fi echipate cu axe cu eliberare rapidă pentru montarea și demontarea rapidă și ușoară a roților de pe cadru. Există o gamă de axe cu eliberare rapidă standard și axe cu eliberare rapidă pentru a facilita manipularea de către persoanele cu disfuncții de prindere (de exemplu, tetraplegici).

ATENȚIE! Mențineți axele cu eliberare rapidă curate pentru a permite îndepărtarea și fixarea fără probleme a roții pe scaunul cu roțile.

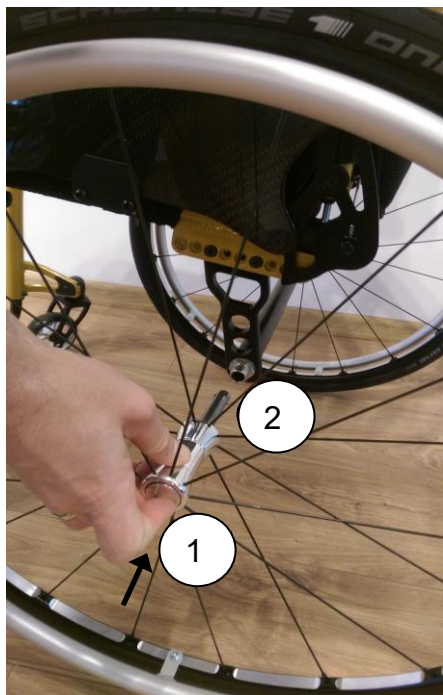

Scoaterea roții:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a axului (1) și scoateți roata.

Montarea roții:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul axului (1), împingeți axul cât mai mult în manșon și eliberați butonul.
2. Verificați dacă roțile sunt montate corect trăgându-le de mai multe ori spre exterior.

ATENȚIE! Aveți grijă la degete atunci când montați sau demontați roțile. Acestea nu trebuie introduse între spițe sau între roți și jantele de apucare.

ATENȚIE! Când conduceți, aveți grijă să nu vă prindeți degetele între coardă și anvelopă.

13.1.4. Roțile din față

Ansamblul roții din față constă dintr-o furcă, o roată cu ax și rulmenți cu role și un conector cu cadrul. Acestea sunt roți auxiliare pentru a menține stabilitatea scaunului cu roțile.

În funcție de specificațiile scaunului cu roțile, pot fi furnizate următoarele:


1. Roți ALUCORE în dimensiuni de 4" și 5" cu butuc în diferite culori (negru sau argintiu),
2. Roți TRISTAR în dimensiuni de 4" și 5" cu butuc argintiu.

Există două modele de furci din care puteți alege:

1. furcă standard,
2. furcă Jazz-Shock cu nivel reglabil de amortizare a denivelărilor.

Reglarea roților din față

Reglarea unghiului roții din față trebuie efectuată numai de către un centru de service autorizat. Acest lucru trebuie făcut de fiecare dată când unghiul scaunului este modificat.

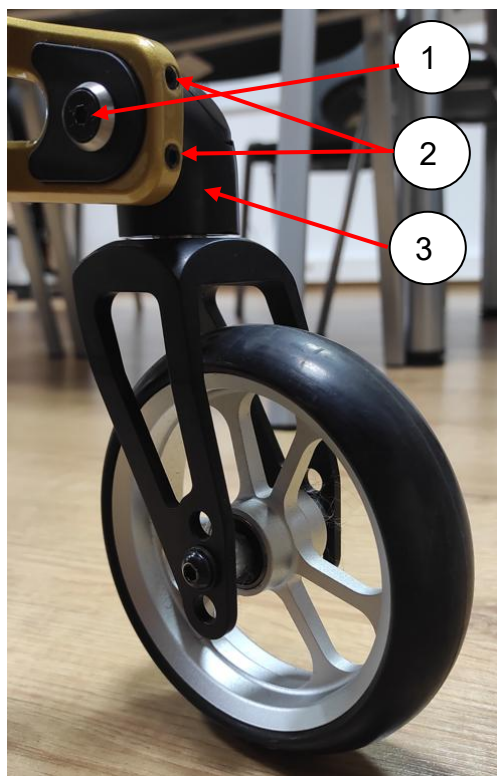

Atunci când se modifică poziția sau dimensiunea roților din spate sau din față, poate fi necesar să reglați unghiul furcii roții din față pentru a evita vibrațiile roții din față și pentru a asigura o rulare lină și dreaptă.

Capul ansamblului furcii față (3) trebuie să fie întotdeauna poziționat la un unghi de 90° față de sol. Odată ce roata a fost repositionată, este necesar să se ajusteze acest unghi.

Pentru a regla unghiul furcii din față:

1. Slăbiți șuruburile cu o cheie imbus (1)
2. Slăbiți șuruburile cu o cheie imbus (2), reglați în unghi ansamblul furcii față (3) până când axa verticală a rulmentului (4) formează un unghi de 90° cu solul,
3. Strângeți din nou șuruburile (1) și (2), verificați din nou unghiul cu solul.
4. Faceți acest lucru simetric pe ambele părți ale scaunului cu roțile.





Pentru a modifica înălțimea scaunului, roțile din față pot fi montate în poziții diferite (4) (în această fotografie, este utilizată o furcă din față cu 3 poziții diferite). Orificiile diferite permit, de asemenea, montarea roților din față cu diametre diferite.



Curățarea ansamblului furcii

1. Slăbiți șurubul (1) prin rotirea celui alt șurub în partea opusă cu ajutorul cheilor imbus,
2. Scoateți axul (2) și șaibele (3),
3. Scoateți roata (4) împreună cu distanțierele (5),
4. Îndepărtați murdăria,
5. Montați ansamblul în mod analog, în ordine inversă.

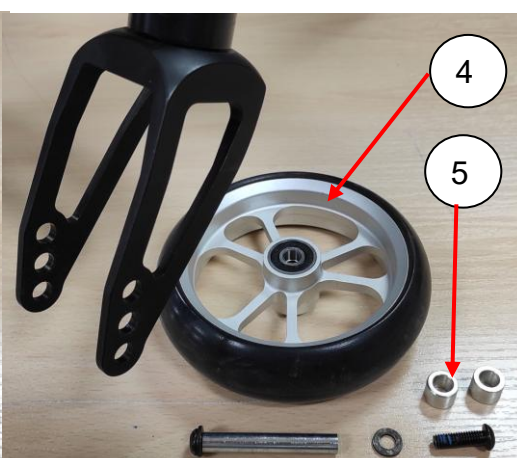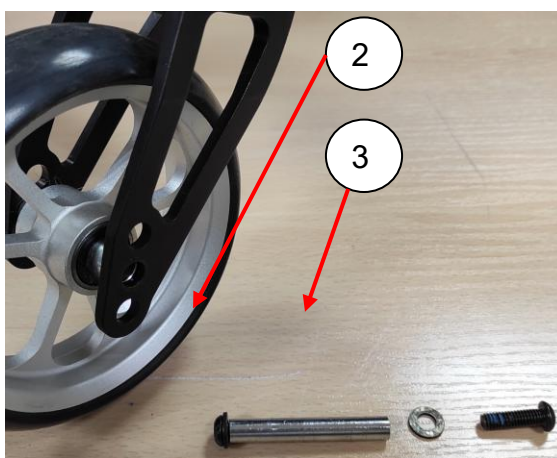

13.1.5. Frâne

Frânele sunt utilizate pentru a imobiliza scaunul cu roțile la staționare. Coardele sunt utilizate pentru a frâna scaunul cu roțile în mișcare.

În funcție de specificație, sunt disponibile frâne din:

1. Oțel B1,
2. Plastic Lock-P,
3. Aluminu Lock-A.



Frână acționată (scaunul cu roțile nu se deplasează)

Frână eliberată (scaunul cu roțile se poate deplasa)


1. Pentru a trage frâna, trageți maneta de frână înainte (1). În această poziție, roțile scaunului cu roțile sunt imobilizate.
2. Frâna este eliberată atunci când deplasați maneta înapoi (2). În această poziție, roțile scaunului cu roțile sunt pregătite să ruleze.

ATENȚIE! Aplicați întotdeauna frâna atunci când scaunul nu este utilizat.

ATENȚIE! Acționați întotdeauna ambele frâne.

ATENȚIE! Frânele nu sunt utilizate pentru a încetini un scaun cu roțile. Acestea au doar funcția de parcare.


Reglarea poziției frânei

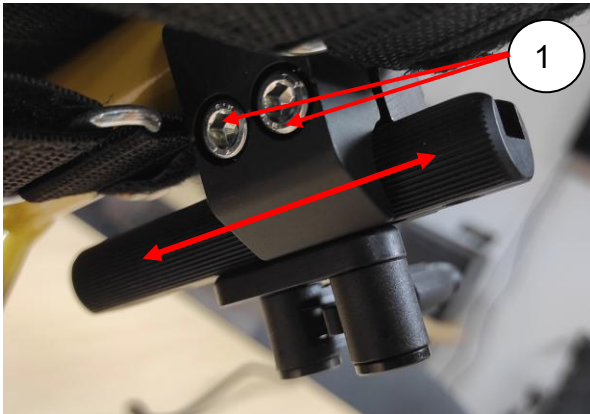

Frânele pot fi adaptate la diferite tipuri de roți motoare.

Pentru a seta distanța corectă între frână și anvelopă:

1. Cu ajutorul unei chei imbus, deșurubați cele două șuruburi (1) care fixează mânerul frânei de cadru,
2. Deplasați frâna înainte sau înapoi pentru a o aduce în poziția corectă.
3. Apoi strângeți cele două șuruburi (1),
4. Dacă este necesar, pentru a mări domeniul de reglare, scoateți frâna din suport, deșurubați șuruburile (2) și transferați frâna într-un alt set de găuri (3),
5. Verificați din nou forța de frânare. Roțile de acționare nu trebuie să se deplaseze, iar frânele trebuie să se închidă și să se deschidă fără efort excesiv.

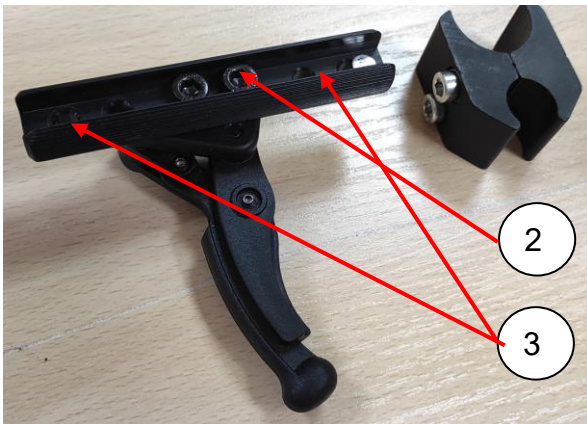

14.1.6. Suport pentru picioare

Suportul pentru picioare este componenta care susține picioarele și conectează și rigidizează cadrul scaunului cu roțile. În funcție de specificațiile scaunului cu roțile, acesta poate fi echipat cu:

1. Suport pentru picioare standard din aluminiu,
2. Suport pentru picioare din oțel, întărit pentru atașarea roții Trackwheel.

ATENȚIE! Suportul pentru picioare nu poate fi îndepărtat pentru utilizare - acesta face parte integrantă din cadrul principal al scaunului cu roțile - închide și rigidizează cadrul).

ATENȚIE! Suportul pentru picioare este reglabil pe înălțime. În cazul în care scaunul cu roțile este utilizat în aer liber, suporturile pentru picioare trebuie poziționate astfel încât să fie la o distanță minimă de 4-5 cm de la sol.

ATENȚIE! Este interzis să stați pe suporturile pentru picioare. Risc de răsturnare a scaunului cu roțile.



Pentru a regla înălțimea sportului pentru picioare:

1. Cu ajutorul unei chei imbus, deșurubați și îndepărtați șurubul (1) în timp ce țineți piulița (2) cu o cheie plată. Repetați acțiunea pe cealaltă parte a scaunului cu roțile.
2. Reglați lungimea suportului pentru picioare prin deplasarea tubului inferior (3) în sus sau în jos și aliniați orificiile din tuburile exterior și interior ale suportului pentru picioare.
3. Reasamblați și strângeți șurubul (1) și piulița (2). Repetați acțiunea pe cealaltă parte a scaunului cu roțile.

14.1.7. Carcase laterale

Protecțiile laterale sunt elemente care susțin utilizatorul lateral și îl separă de roțile de acționare. De asemenea, acestea oferă elemente de sprijin pentru ridicarea de pe scaunul cu roțile și pentru transferuri. În funcție de alegerile făcute în etapa de specificații, scaunul cu roțile poate fi echipat cu:

1. Capace de mascare laterale pliabile, plate, din aluminiu,
2. Capace de mascare laterale pliabile, plate, din fibră de carbon,
3. Panouri laterale detașabile cu apărătoare de noroi din fibră de carbon

Pentru a asambla panoul lateral plat:

1. ridicăți capacul spre spătar (1),
2. înclinați spre interiorul scaunului cu roțile (2).



ATENȚIE! Este interzisă utilizarea capacelor laterale ca mânere de transport pentru scaunul cu roțile.

Pentru a îndepărta panoul lateral cu aripa:

1. Ridicați panoul (1) spre spătar (2),
2. Glisați panoul de pe rola de lângă spătar în direcția indicată de săgeata din fotografie.



Dacă se modifică configurația cadrului (prelungirea scaunului, modificarea unghiului spătarului, modificarea poziției punții spate etc.), poate fi necesar să se modifice poziția rolei de montare a panoului lateral și a plăcilor de montare a panoului lateral pe role.




Pentru a schimba poziția plăcilor de montaj:

1. Slăbiți șuruburile cu o cheie imbus (1),
2. Reglați poziția plăcii (2),
3. Strângeți din nou șuruburile (1) în configurația dorită,
4. Atașați panourile laterale la scaunul cu roțile.



Pentru a schimba poziția rolei de fixare:

1. Cu ajutorul unei chei imbus, aplicând cuplul opus cu o cheie pe cealaltă parte, deșurubați șurubul (1),
2. Introduceți rola (2) în orificiul țință din cadru,
3. Strângeți din nou șurubul și piulița.

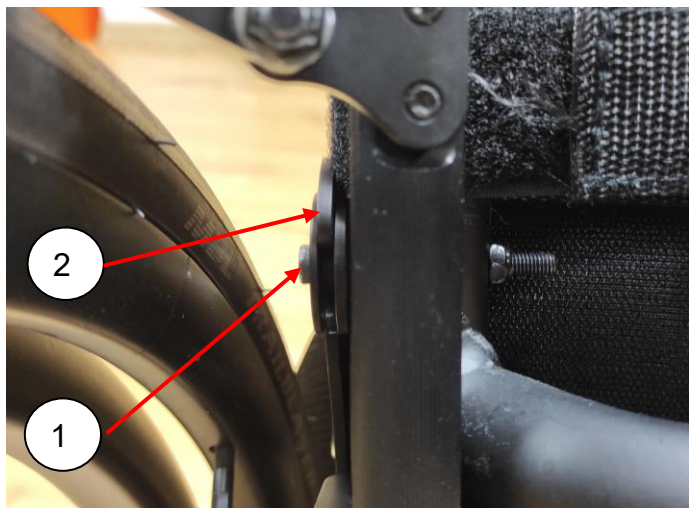

14.1.8. Mânere de împingere, pliabile

Mânerele pliabile sunt piese compacte care facilitează conducerea scaunului cu roțile de către asistent. Acesta este un element opțional în echipamentul scaunului cu roțile.



Metodă de desfășurare a mânerelor pentru împingerea scaunului cu roțile:


1. Trageți și desfășurați maneta mânerului (1) până când se aude un clic distinct.
2. Mânerul trebuie să fie blocat în poziție orizontală atunci când este desfășurat.

Metodă de pliere a mânerelor pentru împingerea scaunului cu roțile:


3. Apăsați și mențineți apăsat butonul (2) de sub maneta mânerului (1).
4. Împingeți și rabatați maneta mânerului (1).

14.1.9. Mânere de împingere, montate pe bara transversală a spătarului

Mânerele de împingere sunt echipamente opționale. Pentru a regla poziția mânerelor la asistent, slăbiți clemele (1), apoi deplasați mânerul în sus/jos (eventual rotiți), apoi strângeți din nou clemele.

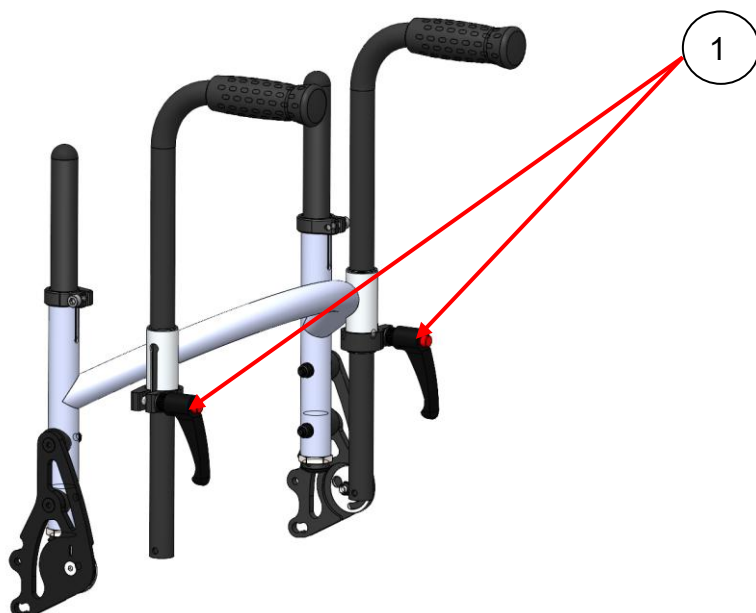

14.1.10. Reglarea tapițeriei spătarului

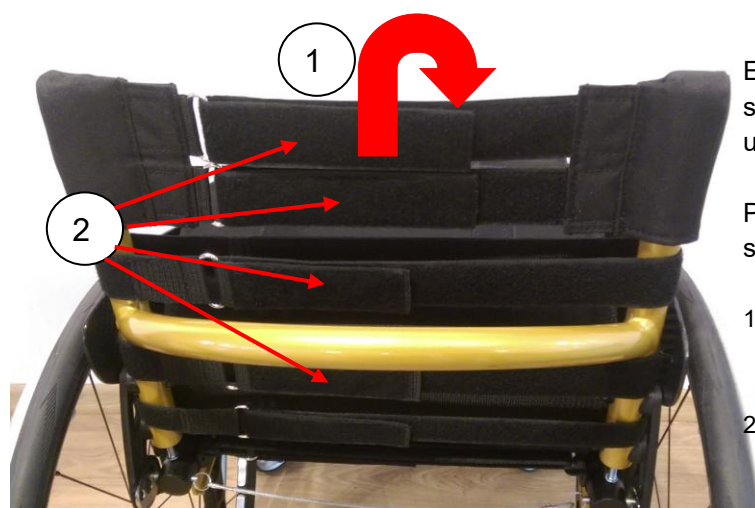


Este posibilă reglarea unghiul tapițeriei spătarului pentru a potrivi forma sa nevoilor utilizatorului.

Pentru a modifica înclinarea tapițeriei spătarului:

1. Ridicați partea din spate a tapițeriei superioare **(1)**.
2. Apoi desfaceți curelele Velcro și reglați tensiunea celor șase curele de reglare **(2)** până când setările lor sunt cele dorite.
3. Coborâți partea din spate a tapițeriei superioare **(1)** pentru a acoperi curelele de reglare.

14.1.11. Reglarea adâncimii scaunului

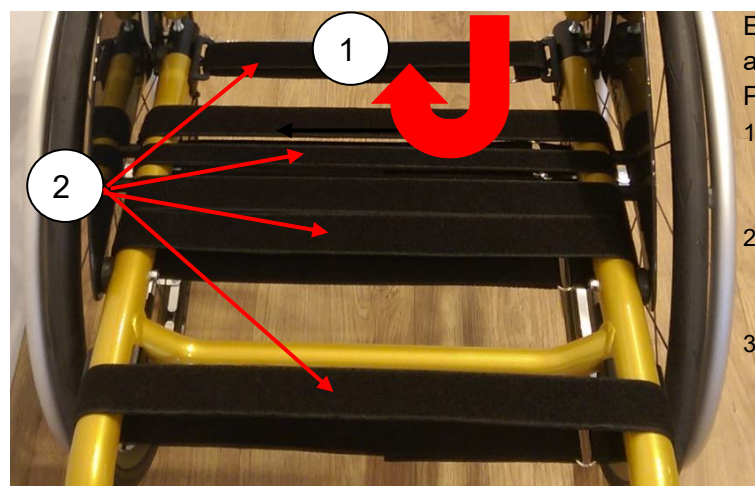

Este posibilă reglarea unghiul scaunului pentru a potrivi forma sa nevoilor utilizatorului.

Pentru a modifica înclinarea scaunului:

1. Ridicați și detașați părțile superioare ale tapițeriei **(1)** - perna scaunului și covorașul de fund al scaunului.
2. Apoi desfaceți curelele Velcro și reglați tensiunea celor șase curele de reglare **(2)** până când setările lor sunt cele dorite.
3. Montați toate părțile tapițeriei superioare în ordine inversă **(1)**, astfel încât curelele de reglare să fie acoperite.



Tapiterie scaun - covor inferior



Tapiterie scaun - pernă

14.1.12. Roți anti-răsturnare

Roțile anti-răsturnare sunt o caracteristică opțională a scaunului cu roțile. Acestea împiedică răsturnarea scaunului cu roțile în spate. În funcție de specificații, se poate face o alegere:

1. O roată anti-răsturnare pe partea stângă sau dreaptă a scaunului cu roțile,
2. Două roți anti-răsturnare pe partea stângă și dreaptă a scaunului cu roțile.

Pliere și desfacere a roții anti-răsturnare


Pentru a desfășura ansamblul roții, apăsați butonul (1) în timp ce îl mențineți, rotiți brațul (2). Eliberați butonul (1) și asigurați-vă că brațul s-a blocat în poziția extinsă.



Reglaje

Ansamblul a fost proiectat astfel încât să fie posibilă o reglare versatilă:

1. Deplasați ansamblul de-a lungul axei scaunului cu roțile - slăbiți șuruburile (1) cu o cheie imbus,
2. Ridicați brațul în cataramă în sus/jos - slăbiți șuruburile (2) cu o cheie imbus,
3. Extinderea brațului - apăsați butonul (3), apoi glisați brațul în/în afară și reglați pentru a bloca din nou butonul.

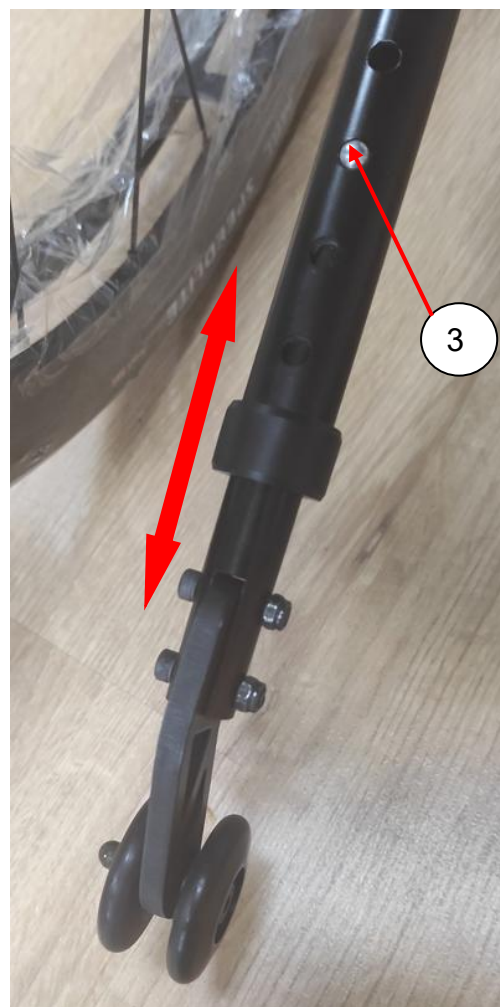

14.1.13. Tip-on

Tip-on este un accesoriu opțional pentru scaunul cu roțile Icon60, care sprijină asistentul persoanei cu dizabilități atunci când scaunul cu roțile este înclinat (de exemplu, atunci când este urcat pe borduri). Asistentul ține mânerul scaunului cu roțile (echipament opțional) și apasă cu piciorul în timp ce înclină scaunul cu roțile cu persoana transportată spre asistent.

Reglaje

Pentru a regla poziția roții de protecție în caz de răsturnare, urmați aceiași pași ca pentru reglarea poziției roții de protecție în caz de răsturnare de-a lungul axei.

14.1.14. Cotiere



Suportul pentru brațe este un accesoriu opțional pentru scaunul cu roțile, care permite obținerea unor suporturi confortabile pentru brațe.

IMPORTANT! Cu cotiera sunt incluse osii cu eliberare rapidă mai lungi și distanțiere pentru osii.

Reglaje

1. Pentru a ridica/coborî cotiera, deșurubați șurubul (1) folosind o cheie imbus, apoi deplasați stâlpul (2) în sus sau în jos.

2. Pentru a deplasa întregul braț de-a lungul cadrului spătarului scaunului, slăbiți șuruburile (3), deplasați brațul astfel încât adaptorul (4) să fie aliniat cu setul corespunzător de găuri (5) din cadrul scaunului cu roțile.

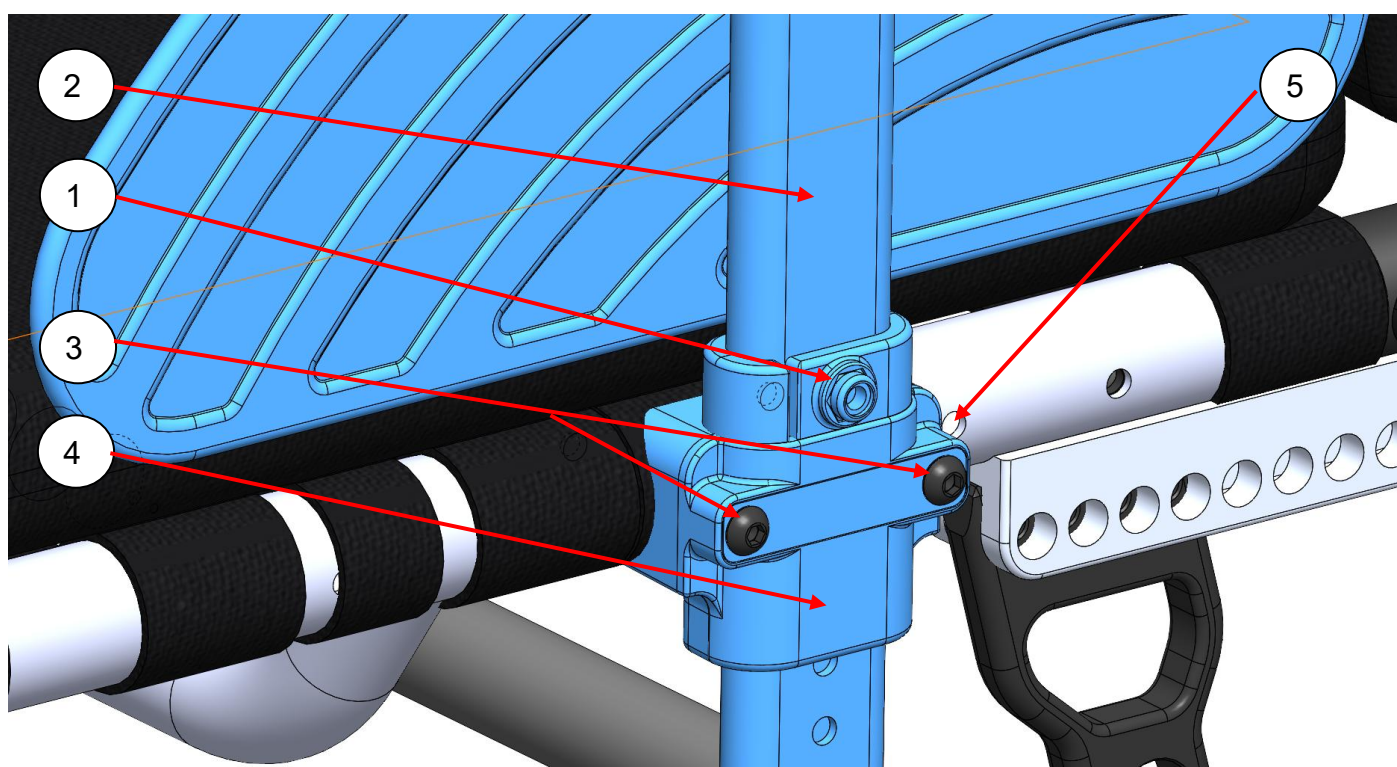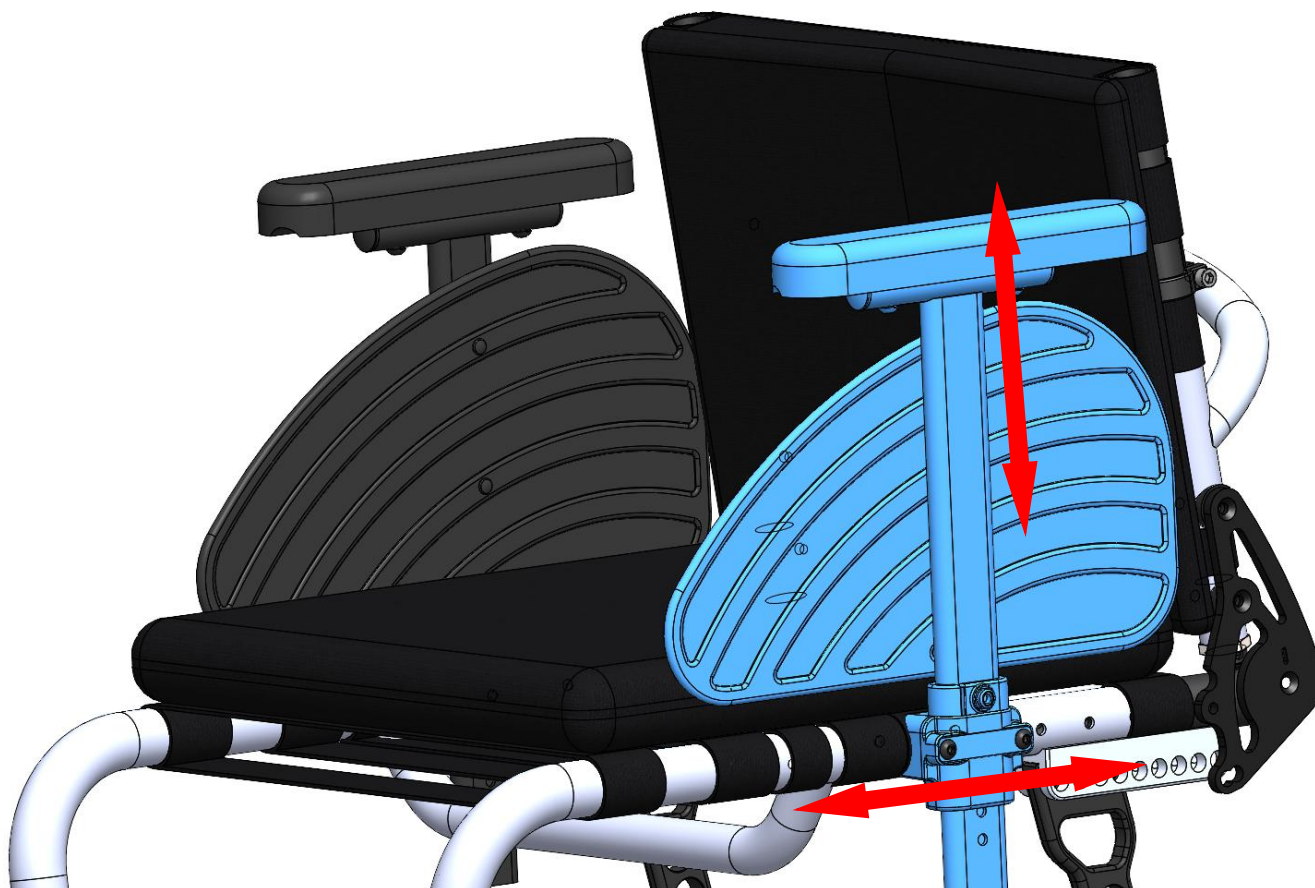

15. Datele de contact ale distribuitorului, producătorului

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați producătorul sau distribuitorul local al produsului.

Distribuitor:

--

PRODUCĂTOR:

Rehasense® sp. z o.o.

Sulejowska 45G

97-300 Piotrków Trybunalski

Poland

www.rehasense.com

info@rehasense.com