

PONDUS



REHASENSE

*rampe de acces
pentru scaune cu rotile*

Instrucțiuni de utilizare (RO)



Stimate utilizator,

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru și, în același timp, dorim să vă oferim informații importante cu privire la utilizarea produsului nostru.

În acest manual veți găsi toate informațiile referitoare la utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv medical, denumit în continuare „Pondus”.

Înainte de a utiliza produsul nostru pentru prima dată, vă rugăm să citiți și să vă familiarizați temeinic cu conținutul acestui manual și să urmați toate recomandările noastre.

Rehasense își îmbunătățește în mod constant produsele și își rezervă dreptul de a face modificări la specificațiile produselor fără avertisment prealabil.

Dacă sunteți interesat și aveți întrebări despre produsele noastre, vă rugăm să contactați magazinele medicale cu care colaborăm sau să contactați direct Rehasense. Date de contact indicate pe ultima pagină a instrucțiunilor.

2 Pondus Rampe**Utilizare**

Rampele “Pondus” sunt un dispozitiv medical pentru a ajuta utilizatorii de scaune cu roțile. Acestea permit utilizatorilor de scaune cu roțile să urce dealuri, borduri și scări, precum și să urce și să coboare din autovehicule. Pot fi utilizate atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor. Este interzisă orice altă utilizare a rampelor decât pentru a asista rampele pentru scaune cu roțile.

3 Pondus Rampe**Norme de siguranță**

Înainte de utilizare citiți aceste instrucțiuni. Producătorul nu este responsabil pentru daunele și accidentele care rezultă din utilizarea necorespunzătoare.

**Rezistența maximă/utilizarea produsului**

- Utilizarea rampelor este permisă numai în stare intactă.
- Dacă observați orice deteriorări trebuie să contactați imediat vânzătorul.
- Consultați marcasele de pe produs.
- Trebuie să citiți instrucțiunile de utilizare. Orice deteriorare a produsului rezultată din utilizarea necorespunzătoare a produsului nu va fi acceptată de producător sau acoperită de reparațiile de garanție.
- Nu încărcați cadrul cu o greutate mai mare decât cea specificată pe eticheta produsului.
- Urmați instrucțiunile privind înălțimea pantelor. Nu utilizați rampe peste înălțimile recomandate ale scărilor, rampelor.
- Utilizați rampele numai în scopul pentru care au fost fabricate.
- Nu efectuați nicio modificare a designului produsului.
- Atunci când desfășurați și pliați rampele, aveți grijă să nu vă striviți degetele sau alte părți ale corpului.
- Rampa ar trebui să fie utilizată numai pe suprafețe stabile.



Vă rugăm să fiți foarte atenți când vedeți acest semn. Degetele sau alte părți ale corpului pot fi atrase atunci când se pliază și se desfac rampele. Acordați atenție tuturor gurilor, intervalelor de rampă și evitați ajustările inutile.

4 Pondus Rampe

Livrare

Rampele sunt fabricate din aluminiu rezistent la rugină. Suprafața șinelor este acoperită suplimentar cu un material antiderapant. Ambalajul rampei conține o pereche de șine identice.

Livrare:

Rampele sunt asamblate și livrate în ambalaje de carton. Ambalajul include:

- 2 rampe
- 1 instrucțiuni de utilizare


Verificați dacă ambalajul conține toate componentele prezentate în imaginea de mai jos. În cazul în care există discrepanțe sau lipsesc elemente, vă rugăm să contactați vânzătorul.

5 Pondus Rampe

Descrierea produsului

Mai jos este prezentat un exemplu de descriere a unei rampe.


Rampă pliabilă (1100F2, 1500F2, 2000F2)

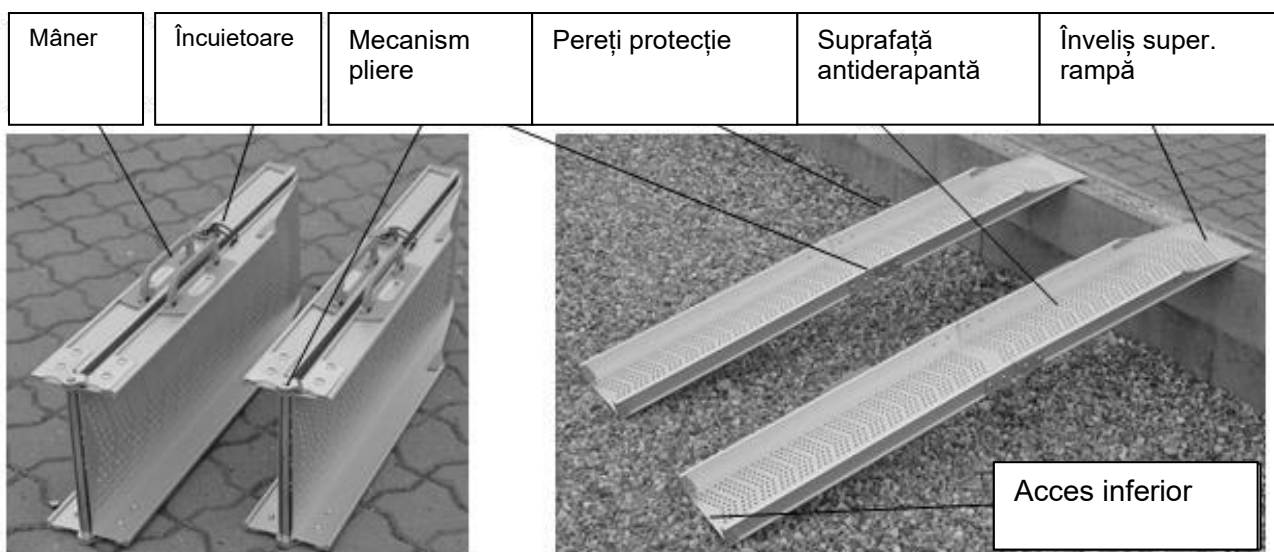

Rampă pliată

Rampă gata de utilizare


Rampă extinsă (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)

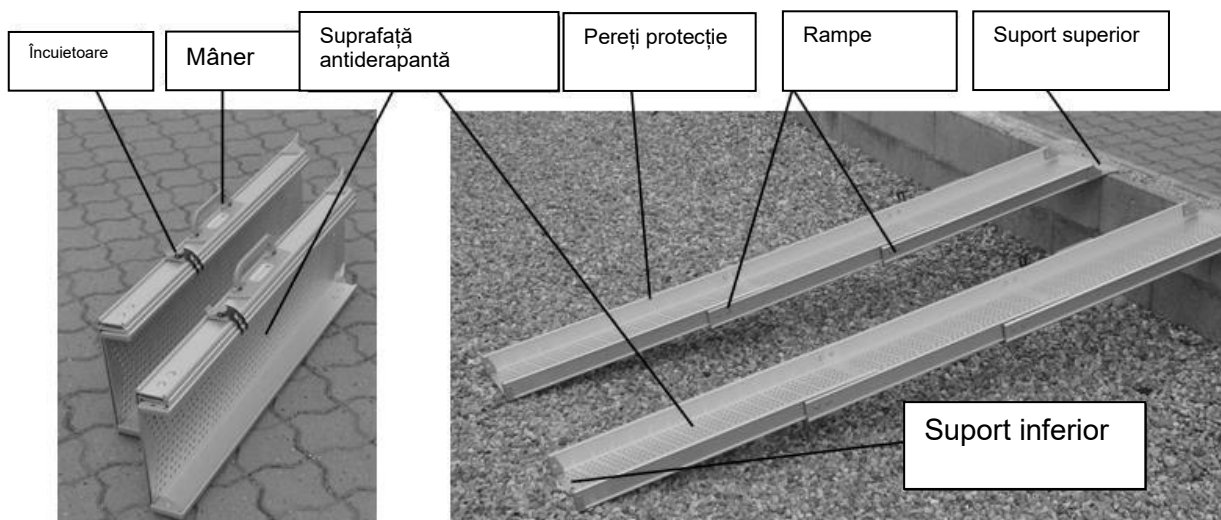

Rampă pliată

Rampă gata de utilizare

Rampă extensibilă pliabilă (2770FT3)

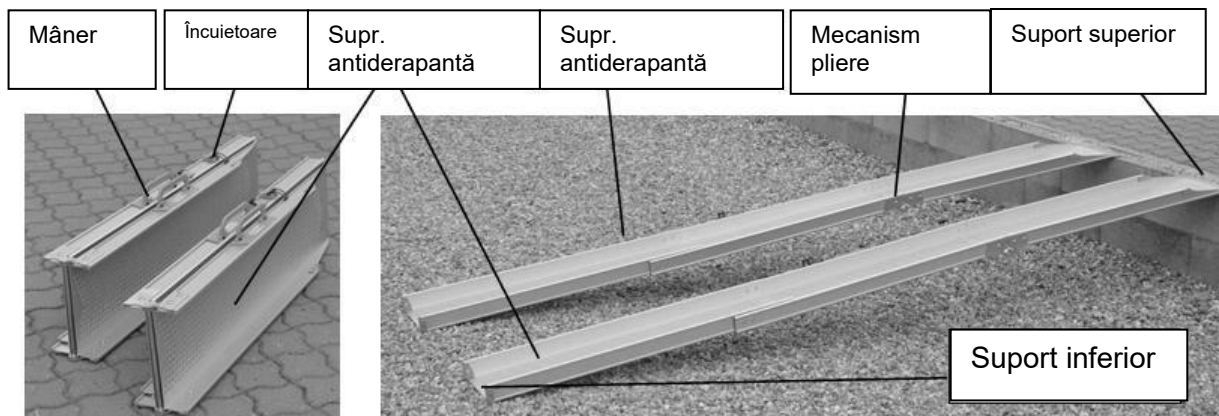

Rampă pliată

Rampă gata de utilizare

Vă rugăm să urmați recomandările producătorului atunci când utilizați rampele:

- Pentru a desfășura rampa, blocajele de siguranță de pe părțile laterale ale rampelor trebuie deblocate. Apoi, desfășurați rampa.
- Rampele au pereți pentru a le împiedica să alunece lateral.
- Partea superioară a rampelor trebuie să fie întotdeauna cu fața în sus în timpul utilizării.
- Partea de jos a rampei trebuie să fie întotdeauna la baza suprafeței.
- Utilizați rampele numai pe o suprafață fermă, stabilă.
- Șinele trebuie să fie întotdeauna paralele între ele.
- Înainte de a urca pe rampe, verificați dacă acestea sunt aplicate corect și dacă sunt stabile.
- Pentru pliere, deblocați încuietoarea de siguranță și pliați/desfaceți rampele - în funcție de modelul de șină.

Informații generale privind modul de utilizare

- Rampele au două profiluri laterale care protejează împotriva alunecării.
- Rampele au două puncte de sprijin:
 - Suportul superior trebuie să fie întotdeauna plasat deasupra obstacolului care trebuie depășit.
 - Suportul inferior trebuie să fie întotdeauna plasat în punctul cel mai de jos din fața obstacolului.
- Rampele trebuie să fie amplasate pe o suprafață stabilă.
- Rampele trebuie să fie întotdeauna dispuse în paralel.
- Verificați înainte de utilizare ca rampa să fie stabilă.



6 Pondus Rampe

Transport

Rampele pot fi pliate foarte ușor și rapid, permițând utilizatorilor să le transporte cu ușurință. În timpul transportului, rampele trebuie să fie întotdeauna fixate și imobilizate pentru a evita orice accident.

7 Pondus Rampe

Date tehnice

Nr Art.	Tip rampă	Lungimea max. (mm)	Lățimea benzii de acces (mm)	Pantă maximă (conf. modelului) (mm)	Sarcina max. pe perechea de șine (kg)	Greutate perechea de șine (kg)
PS000550	550S	550	210	110	400	2,9
PS001170	1200S	1170	210	230	400	5,8
PF201100	1100F2	1100	210	220	400	7,1
PF201500	1500F2	1500	210	300	400	9,2
PF202000	2000F2	2000	210	400	300	11,7
PF201190	1200T2	1190	195	240	350	7,3
PT202030	2000T2	2030	195	400	300	11,3
PT301990	2000T3	1990	180	400	300	12
PT302890	2900T3	2890	180	580	250	16,2
PFT32770	2800FT3	2770	195	600	250	16,6

8 Pondus Rampe

Etichetă

Eticheta tehnică este plasată pe o latură a produsului. Mai jos este prezentat un model de etichetă:

Număr de serie



Denumire produs
Data producției
Număr produs

Greutatea maximă a utilizatorului
Lungimea maximă
Înălțimea maximă
Citiți instrucțiunile de utilizare

Producător

Dispozitiv medical

9 Pondus Rampe

Curățarea

- Păstrați rampele curate și curățați-le în mod regulat.
- Murdăria ușoară și praful trebuie șterse cu o cârpă umedă.
- Murdăria mai mare trebuie îndepărtată cu substanțe chimice neinvazive care nu provoacă coroziune.
- Nu utilizați detergenți puternici, înălbitori.
- Ștergeți cu o cârpă moale.

10 Pondus Rampe

Întreținerea

Rampele nu necesită, practic, întreținere. Cu toate acestea, este întotdeauna recomandabil să verificați dacă suprafața șinelor (calea de rulare) este curată înainte de utilizare. Dacă observați orice semne de deteriorări trebuie să contactați imediat vânzătorul. De asemenea, este recomandabil ca acestea să fie verificate periodic de către profesioniști.

- Verificați toate elementele de siguranță și etanșeitatea rampelor.
- Înlocuiți imediat toate piesele deteriorate sau slăbite.

11 Pondus Rampe

Eliminarea

Rampe uzate trebuie returnate pentru reciclare. Nu aruncați rama cu deșeurile municipale.

12 Pondus Rampe

Garanție

Producătorul oferă o garanție de 2 ani pentru produs. Garanția acoperă defectele cauzate de producător. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului sau defectele care rezultă din utilizarea produsului în alt mod decât cel descris în instrucțiuni.



REHASENSE

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la produs, vă rugăm să contactați Rehasense sau distribuitorul.

Distribuitor:

--

Producător:

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45G

97-300 Piotrków Trybunalski, Polonia

www.rehasense.com

info@rehasense.com