

Instrucțiuni de utilizare

☐ Selectarea mărimii

Pentru a determina mărimea corectă, se măsoară circumferința distală la aproximativ 4 cm deasupra capătului ciotului (Fig. 1).

Pentru montarea inițială, măsurați produsul de aceeași dimensiune; pentru montarea ulterioară, măsurați dimensiunea imediat inferioară.

Vă rugăm să consultați catalogul actual de proteze pentru gama completă de dimensiuni și secțiuni.

☐ Utilizare

Produsele 40L10 și 40L20 ComfortSil.basic, 41L10 și 41L20 ComfortSil.soft, 44L10 și 44L20 PrimoSil.basic (denumite în continuare „produsul”) sunt aprobate pentru nivelurile de activitate 1-3 și nu sunt adecvate pentru activități sportive (de exemplu, sărituri, alergare etc.).

Căptușelile din silicon 46L10 și 46L20 SkinCareSil.basic și 48L10 și 48L20 SkinCareSil.soft (denumite în continuare „produsul”) sunt aprobate pentru nivelurile de activitate 1 și 2 și nu sunt adecvate pentru

activități sportive (de exemplu, sărituri, alergare etc.).

Căptușelile din silicon 50L10 și 50L20 ClassicSil.basic și 60L10 și 60L50 AK-Control.Sil (denumite în continuare „produsul”) sunt aprobate pentru nivelurile de activitate 2-4 și nu sunt adecvate pentru

activități sportive (de exemplu, sărituri, alergare etc.).

Utilizarea adecvată indicațiilor trebuie evaluată de un specialist în proteze.

Produsul poate fi montat numai de un specialist în proteze.

Acest produs este destinat utilizării exclusive de către un singur pacient.

Vă rugăm să rețineți că acest produs este testat și aprobat numai în combinație cu alte componente modulare Streifeneder.

Durata de viață utilă

Durata maximă de viață utilă a produsului este limitată la 6 luni.

☐ Utilizare prevăzută

Produsul este destinat exclusiv pentru protezarea cioturilor membrelor și poate fi utilizat în apă proaspătă, sărată

și clorurată.9/32

☒ Indicații

- Funcție de fixare, asigurarea protezei
- Prevenirea edemului la nivelul ciotului
- Favorizarea revenirii venoase
- Conținerea țesuturilor moi pentru acces facil la proteză
- Cioturi sensibile la presiune

☒ Contraindicații

- Prea mult țesut moale sau țesut moale în exces
- Articulație instabilă a genunchiului
- Imposibilitatea încărcării capătului ciotului
- Igienă precară
- Neuromi foarte sensibili
- Alergie/intoleranță la material
- A nu se purta direct pe pielea rănită, iritată sau deteriorată

☒ Date tehnice/material

ComfortSil.basic

ComfortSil.soft

PrimoSil.basic

SkinCare.basic

SkinCare.soft

silicon medical deosebit de moale

ClassicSil.basic

AK-Control.Sil

silicon de calitate medicală

☐ Tunderea

Produsul

- trebuie tuns drept sau în diagonală cu foarfece cu tăietură ondulată (Fig. 9-11).
- nu trebuie tuns anatomic (Fig. 12).
- este mai bine să fie prea lung decât prea scurt.
- trebuie să depășească nivelul manșonului.

La tăiere, nu utilizați foarfece zig-zag sau foarfece netede.

Există riscul ca marginea produsului să se rupă dacă este întinsă sau să apară iritații ale pielii dacă este purtat.

Aplicare (montare și demontare)

Nu aplicați lubrifianți, de exemplu vaselină, pe ciot sau pe produs, deoarece aceștia pot deteriora

produsul. Ciotul trebuie să fie curat, uscat și fără reziduuri de săpun.

Întoarceți produsul pe dos, astfel încât partea din silicon să fie orientată spre exterior (Fig. 2).

Rotiți produsul până când linia de orientare verticală de pe husa tricotată se află în față. Capătul produsului

trebuie așezat pe capătul curat și uscat al ciotului, de-a lungul liniei ciotului, fără a prinde aer.

Produsul este apoi înfășurat peste ciot (Fig. 3 și 4).

Produsul trebuie rulat peste ciot, nu tras peste el.

Pentru montarea cu o conexiune distală, știftul este atașat la placa de conexiune, iar ciotul este apoi introdus în proteză. Conexiunea distală cu știft trebuie poziționată central pe capătul ciotului și blocată în poziție. (Fig. 5).

Pentru montarea fără fixare cu știft, se utilizează o manșetă pentru genunchi pentru a etanșa mecanismul de vid al manșonului.10/32

Dacă produsul este purtat într-un manșon existent, trebuie respectat principiul contactului complet. Manșonul

nu trebuie să prezinte niciun fel de deteriorări, zone aspre sau margini ascuțite. Dacă este necesar, utilizați un tampon pentru capătul ciotului pentru a asigura

un contact bun în zona distală a ciotului.

Produsul se îndepărtează în ordine inversă. Rulați din nou produsul de pe ciot. (Fig. 6).

Note tehnice

Șurubul trebuie înșurubat manual sau strâns la un cuplu de 3 – 4 Nm folosind o cheie dinamometrică calibrată.

Pentru fixarea șuruburilor trebuie utilizat Loctite 241.

Este esențial să vă asigurați că produsul nu este expus la substanțe chimice și substanțe corozive,

cum ar fi acizi, praf sau nisip!

Proteza trebuie clătită bine cu apă proaspătă de fiecare dată când intră în contact cu apa.

Apoi, căptușeala trebuie așezată pe suport (furnizat) pentru a se usca.

Nerespectarea acestor instrucțiuni va face ca orice reclamație împotriva Streifeneder ortho.production GmbH

să fie nulă și neavenită.

Vă rugăm să informați pacientul în consecință!

☒ Șosete pentru ciot

Protejați produsul de posibile deteriorări cauzate de frecare utilizând o șosetă subțire pentru ciot din nailon sau bumbac.

Fluctuațiile de volum ale ciotului pot fi compensate cu șosete din material textil pentru ciot.

Șosetele pentru ciot se

poartă peste produs.

☒ Curățare

Interiorul produsului trebuie curățat bine cu apă caldă și loțiune de spălat pentru îngrijirea pielii înainte de a intra în contact cu pielea.

Produsul trebuie apoi așezat pe suportul furnizat pentru a se usca.

Toate produsele conțin un aditiv antibacterian (cu excepția PrimoSil.basic) care reduce în mod eficient

recolonizarea bacteriilor în interior.

Cu toate acestea, acest lucru nu înlocuiește curățarea zilnică: pentru a evita iritarea pielii, atât ciotul, cât și

produsul trebuie curățate temeinic zilnic și/sau după fiecare utilizare.

Pentru acest scop, recomandăm loțiunea lichidă delicată Skin Care.

În mod ideal, produsul nu trebuie purtat timp de 24 de ore după curățare, pentru a permite evaporarea completă a

umidității pătrundă.

☑ Curățarea zilnică

Rulați produsul de pe ciot, astfel încât partea din silicon să fie din nou orientată spre exterior.

Pulverizați produsul, întors

pe dos, cu loțiunea Skin Care, apoi spălați-l bine cu apă caldă (Fig. 7).

Nu folosiți o perie pe produs. Aceasta poate aspră suprafața produsului, ceea ce poate

duce la o reacție cutanată.

Uscați partea din silicon a produsului cu o cârpă curată, fără scame. Întoarceți produsul pe dos, astfel încât

partea din material textil să fie orientată spre exterior, iar partea din silicon spre interior. Așezați produsul pe suportul de uscare furnizat,

cu partea din material textil orientată spre exterior. Membrele sunt apoi curățate.

Produsul trebuie verificat zilnic pentru a detecta eventualele deteriorări (de exemplu, fisuri, abraziune a materialului).11/32

☑ Curățarea și dezinfectarea săptămânală

- Aplicați puțin alcool etilic, de exemplu 2-3 pulverizări de spray pentru îngrijirea pielii, pe o cârpă moale și curată.

- Întreaga parte din silicon a produsului trebuie ștersă, iar dezinfectantul trebuie lăsat să acționeze timp de două minute.

Produsul nu trebuie înmuiat sau scufundat în alcool etilic, deoarece contactul prelungit va

determina întărirea siliconului.

Nu utilizați solvenți precum acetonă sau benzină.

☒ Îngrijire

Multe produse uzuale de uz casnic sau pentru baie, inclusiv săpunuri, deodorante, parfumuri, aerosoli, spray-uri cu alcool

sau produse exfoliante pot provoca sau contribui la iritarea pielii. Loțiunea hidratantă Skin Care poate fi

aplicată zilnic pe pielea uscată. Loțiunea nu trebuie aplicată imediat înainte de a purta produsul, deoarece

are nevoie de timp pentru a fi absorbită în piele (Fig. 8). Opțional, crema de protecție a pielii Skin Care poate fi aplicată

pe ciot pentru a proteja zonele pielii deosebit de solicitate. Crema de protecție a pielii creează un film protector eficient

pe piele dacă este aplicată în strat subțire și uniform.

☒ Depozitare

Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat. Dacă nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, acoperiți produsul cu o pungă de plastic curate.