

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun de duș cu spătar – fără scule

Cod produs: TGR-R KP 350L



1. Caracteristici

Scaunul de duș este format din cadru de aluminiu, spătar și scaun lat din PVC rezistent. Scaunul este echipat cu picioare reglabile pe înălțime cu varfuri de cauciuc anti-alunecare și manere integrate care facilitează utilizarea produsului. Vârfurile din cauciuc special concepute împiedică alunecarea scaunului pe suprafețele umede. Scaunul este livrat suplimentar cu sistem Tool-Free (TF) care facilitează asamblarea.

Setul include:

- spătar – 1 buc
- scaun – 1 buc
- baza scaunului – 2 buc
- picioare reglabile pe înălțime – 4 buc
- tuburi pentru spătar – 2 buc
- șuruburi de montaj (șuruburi cu aripă) – 9 buc

Elementele scaunului de duș:

- a. spătar
- b. tuburi pentru spătar
- c. scaun
- d. tuburi de bază
- e. reglare înălțime – sistem TF
- f. vârfuri anti-alunecare



2. Aplicație

Scaunul de dus este un echipament auxiliar care ajută utilizatorul să desfășoare activități de igienă. Scaunul este recomandat persoanelor cu mobilitate redusă care împiedică sau împiedică efectuarea neasistată a

activităților zilnice. Scaunul poate fi folosit la dus, în baie, în bai și în alte încăperi umede acasă și în spitale.

3. Asamblare

Pasul 1. Așezați scaunul cu susul în jos pe o suprafață plană.

Pasul 2. Fixați tuburile de bază încrucișate cu scaunul în mijloc folosind un șurub cu aripă cu șaibă.

Pasul 3. Uniți tuburile de bază cu picioarele.

Pasul 4. Înșurubați tuburile pentru spătar la tuburile de bază folosind patru șuruburi cu aripă cu șaibe.

Pasul 5. Așezați scaunul de duș asamblat pe picioare și strângeți spătarul folosind patru șuruburi cu aripă cu șaibe.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII

- Pentru a regla înălțimea scaunului de duș, apăsați știftul de metal, selectați înălțimea corespunzătoare a piciorului și blocați poziția tuburilor unul față de celălalt cu ajutorul știftului metalic. Picioarele sunt reglabile în trepte de 2,5 cm .

Nota! Știfturile trebuie așezate la același nivel în fiecare picior.

4. Date tehnice

Lățime	49 cm
Adâncime	44 cm
Înălțimea scaunului	36-46 cm
Înălțimea totală	64-74 cm
Dimensiunile scaunului	49 x 29 cm
Greutate	3,38 kg
Capacitate maxima	136 kg

5. Note

Timago International Group nu își asumă responsabilitatea pentru

utilizarea necorespunzătoare a scaunului de duș, nerespectarea normelor de siguranță și utilizarea necorespunzătoare.

6. Întreținere

- Curățați scaunul de duș în mod regulat folosind numai apă, burete și detergenți blânzi pentru materiale plastice, cum ar fi săpunul. Uscați bine.
- **Nu utilizați** pentru curățare: detergenți puternici, agenți abrazivi, înălbitor, benzină sau solvenți (poate cauza deteriorarea cadrului, defecte vizibile și în consecință - pierderea drepturilor de garanție).
- Cel puțin o dată la trei luni verificați:
 - strângerea șuruburilor cu aripă
 - starea știfturilor de blocare
 - starea tuburilor (dacă se fisurează)

Se recomandă să verificați în mod regulat vârfurile de cauciuc. În caz de uzură, înlocuiți vârfurile cu altele noi.

7. Conditii de depozitare si transport

Dispozitivul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui, apă sau umezeală.

8. Informații despre garanție

Toate produsele distribuite de compania noastră sunt acoperite de o garanție, ai cărei termeni sunt descriși în cardul de garanție disponibil pe site-ul nostru. Vă rugăm să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să rețineți că, în scopuri de garanție, dovada achiziției (chitanța sau factura) trebuie păstrată

9. Marcaje

	Numărul de referință		Producător
	Numărul seriei		Data de producție

	Numărul de serie		Dispozitiv medical
	Atenție		Citiți instrucțiunile
	Producătorul a evaluat conformitatea cu cerințele esențiale pentru dispozitivele medicale.		

Întreaga ofertă vă stă la dispoziție la distribuitorii noștri. Aflați mai multe la **www.timago.com**
 Vă mulțumim că ați ales Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2025(I)